



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ISTRUZIONI D'USO
INSTRUCTION FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
GEBRAUCHSANWEISUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ITALIANO

Descrizione:

Lo schermo facciale antiappannante è composto da un pezzo in PET con pellicola protettiva, un supporto in schiuma e una fascia elastica. Indicazioni per l'uso:

Lo schermo facciale antiappannante serve a proteggere il viso dalla potenziale contaminazione da agenti patogeni del sangue, fluidi corporei o schizzi di sostanze chimiche pericolose durante le visite o i trattamenti.

Controindicazioni:

Nessuna.

Effetti collaterali del prodotto:

Questo prodotto non ha effetti collaterali.

Avvertenze:

1. L'esposizione ad un ambiente con un'elevata umidità può compromettere l'efficacia e l'effetto antiappannamento del prodotto.
2. Sospendere l'uso del prodotto se è danneggiato o se si allenta.
3. Non toccare al centro della visiera durante l'uso.
4. I materiali che entrano in contatto con la pelle dell'operatore possono causare reazioni allergiche nei soggetti sensibili.

Funzionamento:

Fase 1: Rimuovere la pellicola protettiva interna.

Fase 2: Tirare la fascia elastica e farla passare sulla testa.



Conservazione:

Conservare il prodotto in un luogo asciutto ad una temperatura di 0-30°C.

Mantenere lontano dalla luce solare diretta

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

	Data di scadenza		Dispositivo monouso, non riutilizzare
	Numero di lotto		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Data di fabbricazione		Conservare al riparo dalla luce solare
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2016/425		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Fabbricante		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Codice prodotto		

REF 98602 (Gima 25662)

Zhejiang Wellong Medical Technology Co., Ltd.
Lvshan Industrial area, Changxing Country, Huzhou City, Zhejiang
Province, R.P.C.
MADE IN CHINA

DPI CE di Cat. II rilasciato da:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Organismo Notificato 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLINO, GERMANIA ai sensi dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 - Standard armonizzato EN 166:2001

CE PPE Cat.II issued by:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (notified body 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, GERMANY according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 - Harmonized EN 166:2001

CE EPI Cat.II délivrée par:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (organisme Notifié 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, ALLEMAGNE conformément à l'Annexe II du règlement (UE) 2016/425 - la norme harmonisée EN 166:2001

CE PPE Cat.II emitido por:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Organismo Notificado 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, ALEMANIA según el Anexo II del Reglamento (UE) 2016/425 - Armonizado EN 166:2001

EPI CE Cat. II emitido por:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Organismo Notificado 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, ALEMANHA de acordo com o Anexo II do Regulamento (UE) 2016/425 - Diretiva 2001/95/CE EN 166:2001 harmonizada

CE PPE Kat.II ausgestellt von:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Notified Body 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, DEUTSCHLAND gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2016/425 - harmonisierte EN 166:2001

Έκδοση CE ΜΑΠ Κατ.ΙΙ από:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Notified Body 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, GERMANY σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 - Εναρμονισμένο πρότυπο EN 166:2001

CE PPE Kat.II wystawiony przez:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Jednostka notyfikowana 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, NIEMCY zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia (UE) 2016/425 - Zharmonizowanego z EN 166:2001

CE PPE Cat.II eliberat de către:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Notified Body 0196) Alboinstraße 56, 12103 BERLIN, GERMANY în conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) 2016/425 - armonizat EN 166:2001

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/
Eingeführt von/Importowane przez/Εισαγωγή από/Importat de:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Dichiarazione di conformità scaricabile al seguente link/Declaration of conformity downloadable at the following link/Déclaration de conformité téléchargeable au lien suivant/Declaración de conformidad descargable en el siguiente enlace/Declaração de conformidade disponível para download no seguinte link/Konformitätserklärung unter folgendem Link herunterladbar/Deklaracja zgodności do pobrania pod poniższym linkiem/Δήλωση συμμόρφωσης με δυνατότητα λήψης στον παρακάτω σύνδεσμο/Declarația de conformitate poate fi descărcată de la următorul lin <https://www.gimaitaly.com/>

