



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - PICCOLI ANIMALI DIGITAL SMALL PET SCALE

Manuale utente - User manual

ITALIANO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Ci auguriamo il prodotto risulterà soddisfacente per tutta la sua vita utile.

Si prega di studiare attentamente l'intero manuale d'uso prima di iniziare a utilizzare il prodotto. Conservare il manuale in un luogo sicuro per la futura consultazione. Assicurarsi che le persone che utilizzano il prodotto siano a conoscenza di queste istruzioni.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Assicurarsi di seguire la polarità contrassegnata delle batterie quando queste vengono inserite o sostituite.
- Se l'apparecchio rimane inutilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o scarse conoscenze, se non sotto sorveglianza o dopo adeguata preparazione riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto nel manuale d'uso.
- Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie orizzontale stabile.
- Prima di pulire, montare o smontare il coperchio, spegnere l'apparecchio e rimuovere la batteria!
- Non utilizzare sostanze abrasive o chimicamente aggressive per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o in caso di caduta, danneggiamento o esposizione a qualsiasi liquido. Portare l'apparecchio a un centro autorizzato di assistenza per sottoporlo a prova e riparazione.
- L'apparecchio è idoneo solo per uso domestico. Non è destinato all'impiego commerciale.
- Tenere l'apparecchio al riparo da sorgenti di calore quali radiatori, forni e così via. Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole o a umidità.
- Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Il prodotto è un dispositivo di misurazione delicato. Evitare cadute o urti.
- Non riparare l'apparecchio. Rivolgersi a un centro autorizzato di assistenza.

LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE PUÒ COMPORRE LA PERDITA DEL DIRITTO DI RIPARAZIONE IN GARANZIA!

SPECIFICHE TECNICHE

- Funzione hold automatica
- Sistema di misurazione di precisione
- Funzione di visualizzazione della differenza di peso
- Funzione tara
- Indicatore di carica bassa della batteria ("Lo")
- Spegnimento automatico

Parametri tecnici

Tensione	2 batterie al litio CR2032 da 3 V
Intervallo di pesatura	20 kg
Incrementi di pesatura	10g
Unità di peso	Kg, Lb, St
Temperatura di funzionamento/conservazione	20-25°C /15-40°C
Dimensioni dello schermo	LCD diametro = 8,0 cm; 3,15 pollici

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1 Superficie di pesatura (piatto)
- 2 Pulsante ON/OFF
- 3 Pulsante TARA
- 4 Pulsante Kg/Lb/St
- 5 Schermo



PULSANTI

- La bilancia può essere accesa e spenta con il pulsante ON/OFF (premere il pulsante una volta).
- Con il pulsante TARA può essere utilizzata la funzione tara. Sullo schermo appare "0.00" per 2 secondi dopo che il pulsante viene premuto.
- Il pulsante Kg, Lb, St è idoneo per selezionare l'unità di misura occorrente; l'unità di misura impostata può essere letta sul lato destro dello schermo.

UTILIZZO DELLA BILANCIA

- 1 La bilancia funziona con 2 batterie al litio sostituibili. Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'uso (Fig. 1).
2. Prima di pesare un animale, avvitarlo al piatto alla superficie di misurazione, in modo tale che il piatto rimanga stabile.

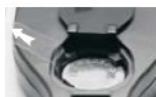


Fig. 1

3. Premere una volta il pulsante ON/OFF: sullo schermo apparirà "0.00" (Fig. 2).

4. Posizionare l'animale sulla bilancia. Il peso misurato verrà visualizzato in pochi secondi e memorizzato automaticamente. Verrà visualizzata una "M", che indica la presenza di dati in memoria. Alla successiva pesata, lo schermo visualizzerà il peso misurato e la differenza tra il peso misurato e il peso precedente a intervalli di 2 secondi.

L'ultimo peso misurato viene memorizzato automaticamente in caso di spegnimento, sia manuale sia automatico.

5. Premere il pulsante ON/OFF una volta per spegnere la bilancia. Se non viene utilizzata per 30 secondi, la bilancia si spegne automaticamente.



Fig. 2

FUNZIONE MEMORIA

All'accensione della bilancia, una "M" viene visualizzata per indicare che l'ultimo peso misurato è memorizzato e che la differenza ponderale può essere visualizzata. Per evitare di visualizzare la differenza ponderale, premere due volte rapidamente il pulsante ON/OFF per cancellare i dati dalla memoria. In questo modo la "M" scomparirà dallo schermo. Anche la rimozione della batteria comporta la cancellazione della memoria.

LA TARA

In caso di aggiunta di peso al piatto (copertina, cuscino e così via), se il peso supplementare è inferiore a 5 kg, premendo il pulsante TARA lo schermo visualizzerà "0.00" e il peso massimo misurabile sarà pari a 20 kg. Se invece il peso supplementare è superiore a 5 kg, premendo il pulsante TARA lo schermo visualizzerà "0.00", ma il peso massimo misurabile sarà inferiore a 20 kg (più precisamente: 20 kg meno il peso supplementare).

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDO ALLO SCHERMO

Se appare la scritta "Lo" all'accensione (Fig. 3) o se lo schermo è vuoto, la batteria è scarica e deve essere sostituita.



Fig. 3

Se la scritta "ERR" appare sullo schermo (Fig. 4), significa che la bilancia è sottoposta a un carico eccessivo e in questo caso il peso deve essere ridotto (un carico eccessivo può causare guasti ai sensori).



Fig. 4

Il messaggio "OUT2" sullo schermo (Fig. 5.) indica un guasto ai sensori (a seguito di sovraccarico o di applicazione repentina di un carico dinamico elevato). Questo caso non è coperto dalla garanzia del prodotto.



Fig. 5

PULIZIA E MANUTENZIONE

La superficie dell'apparecchio deve essere pulita solo con un panno umido. Non utilizzare detersivi o oggetti duri, in quanto potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio!

Non lavare mai l'apparecchio sotto acqua corrente, non sciacquarlo e non immergerlo in acqua!

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Qualsiasi operazione importante di manutenzione o riparazione richiede l'accesso ai componenti interni del prodotto e deve essere eseguita da un centro di assistenza specializzato.

PROTEZIONE AMBIENTALE

- I materiali di imballaggio e gli apparecchi obsoleti devono essere riciclati.
- La scatola utilizzata per il trasporto deve essere smaltita con la raccolta differenziata.
- I sacchetti in polietilene devono essere sottoposti a riciclo.












Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Simboli - Symbols

	IT Codice prodotto GB Product code		IT Numero di lotto GB Lot number		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight		IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal
	IT Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB Product complies with European Directive		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture

REF 27261

Importato da / Imported by:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
 Made in Hungary

