


**MISURATORE A NASTRO****MEASURING TAPE****RUBAN À MESURER****CINTA DE MEDICIÓN****FITA MÉTRICA****ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ****ITALIANO**

Il misuratore a nastro è uno strumento per la misurazione della circonferenza fino ad un massimo di 150 cm. Può essere utilizzato su ogni parte del corpo di forma circolare (addome, bicipiti, ecc.).

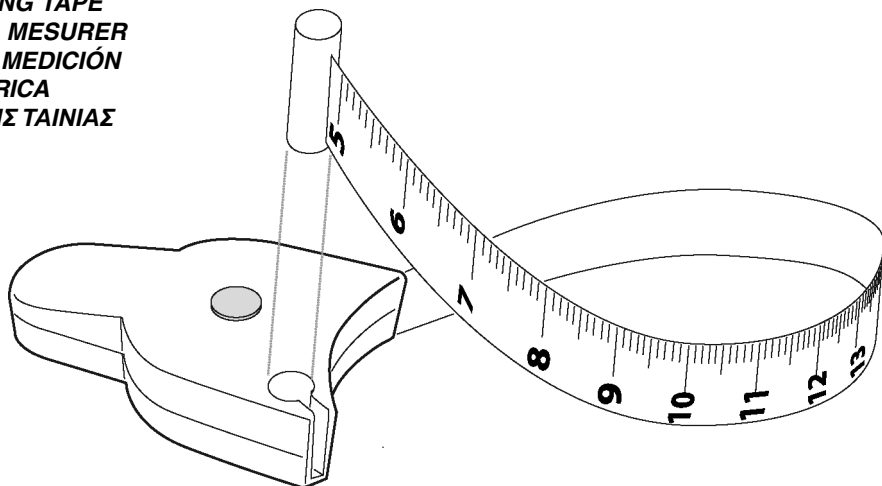

*Non tirare con violenza; poiché la molla o il nastro potrebbero rompersi o deformarsi.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini.*

Tirare lentamente il nastro e avvolgerlo, senza attorcigliarlo, alla parte del corpo da misurare; premere il pulsante per facilitare il rilascio del nastro.

Inserire il terminale del nastro nell'apposita sede (foro rotondo) rispettando l'orientamento e premere il pulsante per riavvolgere il nastro fino a che sia ben teso.

Leggere la misura in corrispondenza della fessura di uscita del nastro.

Consigliamo di pulire lo strumento con un detergente delicato che non intacchi o rovini il nastro e la stampa. Riavvolgere sempre il nastro al termine dell'uso.