



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MISURATORE CORPOREO

BODY METER

RUBAN PÉRIMÉTRIQUE

MEDIDOR CORPORAL

KÖRPERFETTMESSGERÄT

MEDIDOR CORPORAL

Μεζούρα Σώματος

مِسْجَلَا سَايَقَام

REF

27347 - 27350

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/
Eingeführt von/Εισαγωγή από/مِسْجَلَا سَايَقَام:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China




Nastro per la valutazione della distribuzione del tessuto adiposo. Corpo in ABS con impugnatura ergonomica. Il nastro è fatto con uno speciale materiale plastico indeformabile, con doppia scala di valutazione colorata per le indicazioni di rischio diviso, uomo donna.

Utilizzabile su tutte le circonferenze corporee, grazie al suo bottone retrattile e al fermo flessibile che ne permette una lettura agevolata dei dati.

La particolare flessibilità del suo braccio in materiale termoplastico atossico, ne permette uno specifico uso in ambito pediatrico

Posizione del nastro, per una corretta misurazione della circonferenza addominale

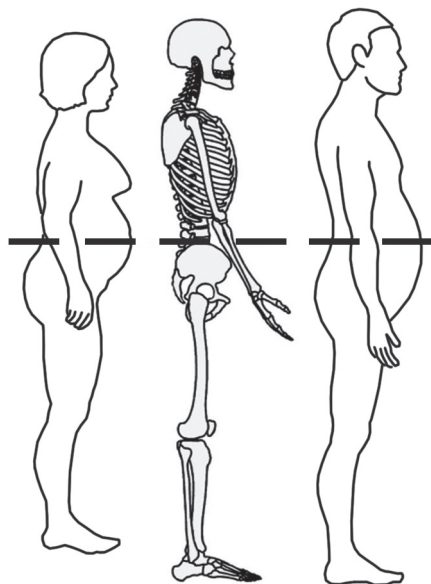

Individuo in posizione eretta.

Localizzare il margine superiore dell'anca e l'apice della cresta iliaca destra.

Posizionare il nastro orizzontale attorno all'addome a livello del margine della cresta iliaca.

Prima di rilevare la misura assicurarsi che il nastro sia aderente ma che non comprima la cute e che sia parallelo al pavimento.

Rilevare la misura al termine di una espirazione normale.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.