

ITALIANO

## LINEA PREVENTIVA DECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

### AVVERTENZE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Gima non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

### DESCRIZIONE

Protezioni per la prevenzione del decubito realizzati in fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in cotone con sistema di fissaggio a velcro. L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

### INDICAZIONI

Prevenzione del decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione di aria.

### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito.

Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene.

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

### CONTROINDICAZIONI






Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### COMPOSIZIONE

Interno: Fibra cava siliconata

Fodera: Cotone 100%

### MODALITÀ DI LAVAGGIO

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| LAVARE<br>MAX 40°                                                                  | NON<br>CANDEGGIARE                                                                  | NON<br>STIRARE                                                                      | NON UTILIZZARE<br>L'ASCIUGATRICE                                                    |
|  | UTILIZZARE QUALSIASI SOLVENTE ECCETTO<br>TETRACLORETILENE                           |                                                                                     |                                                                                     |

### CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### COME USARE IL DISPOSITIVO

Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista. La successiva applicazione della protezione deve avvenire a cura di personale tecnico specializzato. Applicare ed avvolgere sulla parte interessata.

Fissare con la chiusura in velcro qualora ci fosse.

### SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia

di tutela ambientale e raccolta differenziata.

|                                                                                   |                                                          |                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | Codice prodotto                                          |   | Dispositivo medico                     |
|  | Numero di lotto                                          |  | Fabbricante                            |
|  | Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 |  | Leggere le istruzioni per l'uso        |
|  | Conservare al riparo dalla luce solare                   |  | Conservare in luogo fresco ed asciutto |
|  | Data di fabbricazione                                    |                                                                                   |                                        |

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

---

**REF** 28555 - 28556 - 28557



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in Italy

