



# GIMA


PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## ITALIANO


**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**

Grazie! Avete acquistato un ausilio destinato ad essere utilizzato nei servizi igienici o bagni. Il suo scopo è di agevolare l'utenza disabile ad uti-


lizzare i servizi igienici. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto. **NON** installare questo prodotto senza aver prima letto e compreso questo manuale di istruzioni. La mancata consultazione delle istruzioni potrebbe creare lesioni gravi.

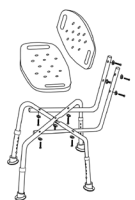


REF FS798L (27730)

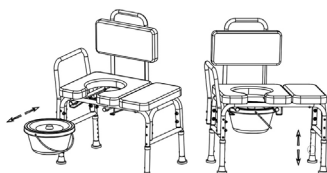


REF FS7992LU (27758)

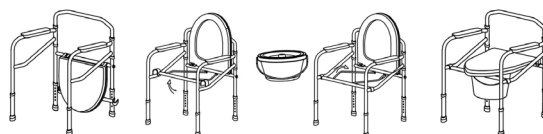


REF FS894L (27759)

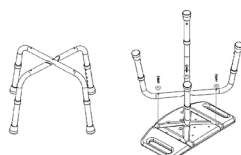


REF FS797L (42900) / FS7972L (42903) (SEDILE ROTONDO)

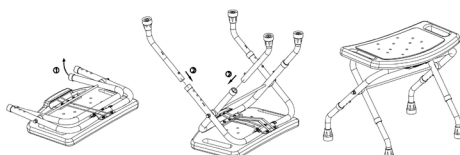





REF FS7963L (42901)

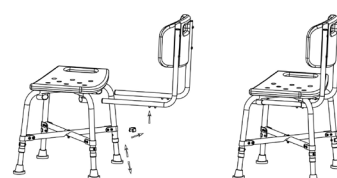

REF FS794L-1 (42910)

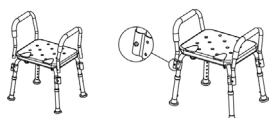

REF FS7985L (42907)

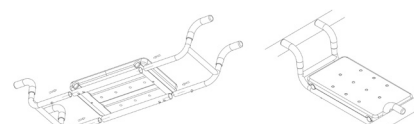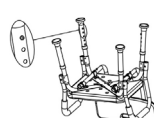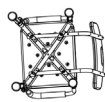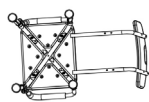

REF FS-794L-1 (42910)



REF FS7962L (42915)

### Pulizia

Utilizzare sempre un panno umido con detersivi neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detersivi abrasivi in polvere o a base di candeggina.

### Avvertenze

- Il sedile è raccomandato per persone con un peso massimo di 100 kg, per il codice 42906 150 kg.
- Il fabbricante e i distributori declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.
- Verificare sempre che il prodotto sia integro, ben funzionante e in perfetto stato prima di usarlo.
- Evitare di tenere il prodotto all'esterno. Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti, così come lo stato dei puntali in gomma.
- Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile. Non salire in piedi, non usare con schiuma o sapone sul sedile.
- Evitare durante il posizionamento movimenti bruschi. Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi in genere, potrebbero rendere difficile il posizionamento del paziente.
- Il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile per un uso improprio o imprudente del prodotto.
- Prima di ogni utilizzo verificare che tutte le giunzioni e raccordi a banco siano ben serrate.
- NON posizionare il prodotto su superfici irregolari.
- NON usare se traballante, instabile o non livellato.
- NON girarsi mentre si è seduti sul dispositivo, ciò potrebbe causare la piegatura del telaio.
- Verificare che i puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli immediatamente se usurati o mancanti.

- Aggiungere regolarmente l'olio lubrificante alle giunzioni.

### Condizioni di esercizio

Temperatura: 5 ÷ 38°C  
 Percentuale umidità: 20÷ 90%  
 Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

### Condizioni di conservazione e trasporto

Temperatura: - 10°C ÷ 50°C  
 Percentuale umidità: 20÷ 90%  
 Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

	Conservare in luogo fresco ed asciutto	<b>REF</b>	Codice prodotto
	Conservare al riparo dalla luce solare	<b>LOT</b>	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso	<b>MD</b>	Dispositivo medico
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF

FS798L (27730) - FS7992LU (27758) - FS894L (27759) - FS797L (42900) - FS7963L (42901) - FS7972L (42903) - FS7981L (42906) - FS7985L (42907) - FS794L-1 (42910) - FS7962L (42915)



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**  
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China

EC REP

**MedNet EC-Rep GmbH**  
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by:

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com  
export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

MD

