



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## CARROZZINA PIEGHEVOLE FOLDING WHEELCHAIR

### Manuale d'uso - User manual

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

**REF** 43220 - 43225 - 43230 - 43251



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China



## **1. Istruzioni generali di sicurezza**

**1.1** Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere la sicurezza dell'utente. Tuttavia, non è possibile scongiurare e offrire protezione contro ogni circostanza o in situazioni imprevedibili.

**1.2** Non salire o scendere scale senza l'assistenza di un addetto.

Usare, se disponibili, rampe e ascensori. In assenza di un accesso per disabili, sono necessarie due persone per sollevare la sedia a rotelle e superare l'ostacolo.

**1.3** Se possibile, piegare le pedane verso l'alto prima di salire o scendere dalla sedia a rotelle.

**1.4** Attenzione se non si ha esperienza nel portare la sedia a rotelle.

Si rischia infatti di cadere o incorrere in situazioni pericolose.

Pertanto, esercitarsi con la nuova sedia a rotelle facendo prima pratica su superfici regolari e diritte. Imparare come la sedia a rotelle reagisce allo spostamento del baricentro; ad esempio, su pendenze o rampe quando si superano ostacoli come gradini e bordi di marciapiede. Svolgere queste attività solo con l'aiuto di un'altra persona.

**1.5** Rischio di danni causati da sovraccarico.

**1.6** Le ruote di guida vanno sostituite in caso di gomme danneggiate.

Controllare periodicamente lo stato di usura.

## **2. Consegna e preparazione all'uso**

(NB: Le foto presenti nel manuale possono mostrare un prodotto diverso dalla sedia a rotelle che avete effettivamente ricevuto).

La sedia a rotelle è solitamente consegnata completamente assemblata, piegata e con le ruote posteriori montate.

Sono sufficienti pochi gesti per prepararla all'uso.

**1.** Spingere verso il basso la guida del sedile per aprire la sedia a rotelle. Non mettere le dita tra la guida del sedile e i lati.



**2.** Carrozzina pieghevole: piegare verso l'alto le piattaforme e sollevare il cuscino del sedile per piegare.

**3.** Regolare l'altezza del piattello con il bullone del poggiapiedi.




**4.** L'utente può spostarsi da solo facilmente da solo utilizzando il bordo della ruota

**5.** Premere verso il basso l'estremità delle manopole posteriori della sedia quando salite i gradini.



**6.** Non utilizzare il poggiapiedi per alzarsi.

**7.** Tenere saldamente la sedia a rotelle sulle pendenze.

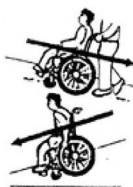

**8.** Per bloccare la ruota in posizione, spingere la maniglia del freno verso il basso.

**9.** Per rimuovere il bracciolo, premere il blocco inferiore con il dito e sollevare il bracciolo.



**10.** Per rimuovere il poggiapiedi, spingere la piastra di bloccaggio verso l'esterno del gancio del piedistallo.

## Avvertenze per l'uso

Non utilizzare la sedia a rotelle su un pendio ad una velocità superiore a 8km/h.

Non utilizzare la sedia a rotelle sulla superficie accidentata della strada.

I fermi sono utilizzati solo per il parcheggio della sedia a rotelle a terra.

Non utilizzare i fermi per bloccare la sedia quando si muove.

**Le serrature delle ruote devono essere agganciate entrambe sulle ruote posteriori più grandi prima di sedersi o di alzarsi dalla sedia.**

### 3. Pulizia e disinfezione

- 3.1** Pulire il tessuto con acqua calda e detergente. Rimuovere eventuali macchie con una spugna o una spazzola morbida. Sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare i componenti.
- 3.2** Non usare detergenti aggressivi, solventi o spazzole dure.
- 3.3** Pulizia a secco. I componenti non sono lavabili in lavatrice. Per la disinfezione, usare detergenti a base di acqua (es. concentrato Sagrotan originale).
- 3.4** Prima di disinfettare, pulire tessuti e maniglie. Le parti in plastica, i componenti del telaio, della struttura e delle ruote possono essere puliti con un detergente delicato. Lasciare asciugare completamente dopo la pulizia.

### 4. Riuso

#### Informazioni per il riuso

Il prodotto può essere riutilizzato. Così come accade con le auto o le macchine di seconda mano, i prodotti usati sono soggetti a maggiori sollecitazioni. Non è possibile apportare modifiche a caratteristiche e funzioni che mettano in pericolo pazienti o terze persone durante la vita utile del prodotto.

#### Simboli

	Codice prodotto		Fabbricante
	Numero di lotto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso		

#### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.