

TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 3 SEZIONI
3 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE
TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 3 SECTIONS
3-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH
CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE TRES SECCIONES
MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 3 SEÇÕES

Manuale d'uso - User's manual - Mode d'emploi - Bedienunghandbuch - Manual del usuario - Manual do usuário



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

REF 44011 - 44013




 Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in P.R.C.



ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

1. Effettuare manutenzione periodica del tavolo. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che il cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Verificare che non vi siano cricche o spaccature nella struttura di legno.
2. Non sovraccaricare il tavolo oltre il limite di peso consigliato. Potrebbero verificarsi infortuni anche gravi per l'utente. Il prodotto è testato per sostenere un carico di lavoro massimo pari a 227 kg.
3. Nella pulizia della parte in vinile non utilizzare detergenti a base di alcool. Potrebbero verificarsi danni al materiale in vinile. Per la pulizia impiegare acqua calda e sapone e asciugare strofinando con un panno.
4. Prima di utilizzare il tavolo assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano allo stesso livello. L'impiego del tavolo con le gambe non allineate potrebbe causare instabilità e conseguenti infortuni.
5. Impedire il montaggio o lo smontaggio del tavolo da parte di bambini, a meno che non siano sotto la vostra supervisione.
6. Prestare attenzione quando si utilizzano oggetti taglienti o aghi, poiché potrebbero forare la copertura. Tenere il tavolo al riparo da oggetti taglienti o aghi.

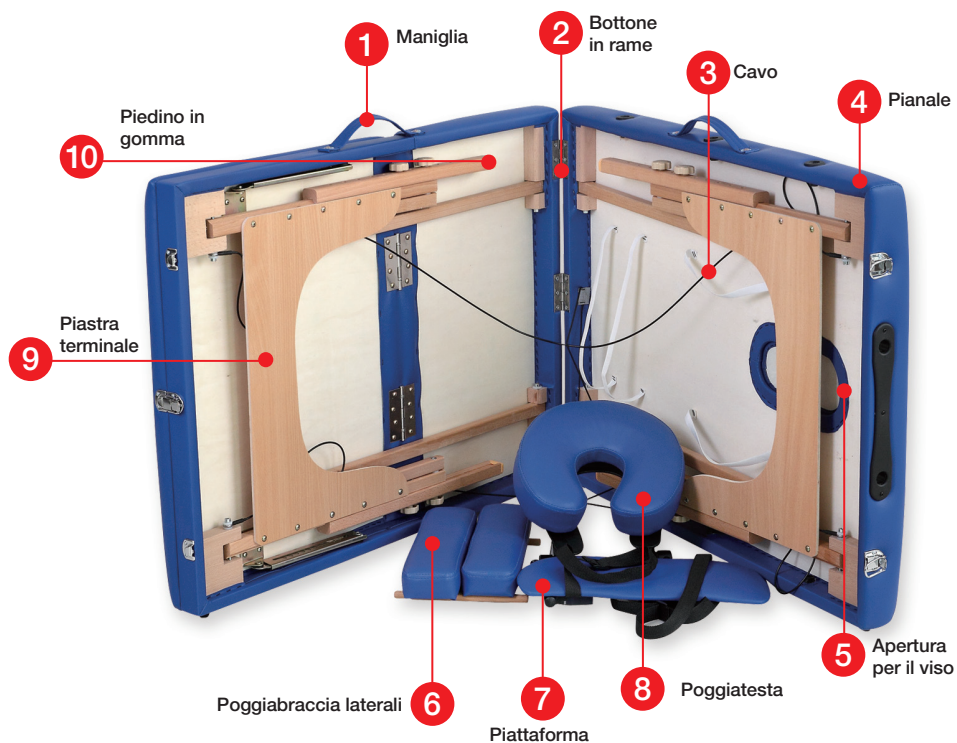

MONTAGGIO DEL TAVOLO

Passi da seguire:



1



2



3



4



5



6

1. Sbloccare la chiusura.
2. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma sul pavimento; aprire il tavolo allungando al massimo tutte e quattro le gambe. Estrarre tutti gli accessori.
3. Alzare il tavolo ponendolo nella sua normale posizione con tutte e quattro le gambe poggianti sul pavimento.
4. Collocare gli accessori nelle loro rispettive sedi; fissare il poggiatesta sospeso e inserire il supporto del poggiatesta.
5. Alzare uniformemente e lentamente lo schienale fino alla posizione richiesta.
6. A questo punto il tavolo è pronto all'uso.

L'altezza del tavolo può essere regolata girando i pomelli sulla gamba ed estraendo la gamba mobile per la regolazione dell'altezza (selezionando gli appositi fori sulla stessa gamba mobile). Quindi reinserire la gamba e serrare per bene i pomelli. Tutte e quattro le gambe vanno regolate nella medesima maniera, una alla volta, assicurandosi di impostarle tutte allo stesso livello di altezza.

CHIUSURA E TRASPORTO DEL TAVOLO

1. Alzare lo schienale al massimo e poi spingere verso il basso; bloccare la chiusura.
2. Estrarre tutti gli accessori.
3. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma a terra.
4. Collocare tutti gli accessori sotto la cinghia elastica dietro il rivestimento superiore.
5. Piegarle le gambe del tavolo su ciascuna estremità premendo i bracci di supporto corrispondenti.
6. Piegarle il tavolo e bloccare la chiusura.
7. Il tavolo può essere trasportato per la maniglia come una valigia.



Attenzione: Se la struttura del telaio/gambe/tavolo presenta qualsiasi tipo di danni, non utilizzare il tavolo. L'impiego del tavolo danneggiato può causare pericoli o infortuni gravi per voi o per i vostri pazienti. Il tavolo va riparato immediatamente.



