

LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D'EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC

MANUALE D'USO - ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI - INSTRUCTIONS ET MONTAGE
BETRIEBSANLEITUNG - MONTAGEANWEISUNGEN
MANUAL DE USO - INSTRUCCIONES Y MONTAJE
MANUAL DE USO - INSTRUÇÕES E MONTAGEM



ATTENZIONE! Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

INTRODUZIONE / INTRODUCTION

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE

Il Lettino basic da visita è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura, particolarmente adatto a studi medici / ambulatori.

Il lettino ha dimensioni contenute; il materassino, lavabile ed ignifugo, è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni. A seconda del modello, la struttura può essere verniciata oppure cromata.

- Struttura cromata o verniciata, composta da gambe, telaio e alzatesta
- Materassino rivestito con tessuto lavabile ed ignifugo
- Su richiesta: portalenzuolini

COMPONENTI

- N.2 Gambe
- N.1 traverso con alza schienale ▲
- N.3 traversi corti senza fori ☆
- N.2 traversi corti con fori ●
- N.1 traverso lungo ◆
- Imbottitura schienale
- Imbottitura seduta

Sacchetto con materiale di montaggio

- N. 16 VITI TBE 8X50
- N. 18 RANELLE M8
- N. 6 PANELVITI TPS 4,5X45 (per fissare il materassino al telaio)
- BRUGOLA 5 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:


Il lettino si fornisce completamente smontato.

Fare attenzione ad usare i traversi corretti seguendo la simbologia indicata

1. Prendere le gambe del lettino e assemblarle con i n.5 traversi tramite le viti e relative rondelle.
2. Prendere il traverso lungo e fissarlo ai due traversi forati che sono stati precedentemente fissati alle gambe.
3. Fissare alla struttura anche il traverso con l'asta dell'alzatesta già montata all'imbottitura

dello schienale tramite vite esagonale e relativo dado.

4. Per ultimo fissare le imbottiture al telaio attraverso le viti.

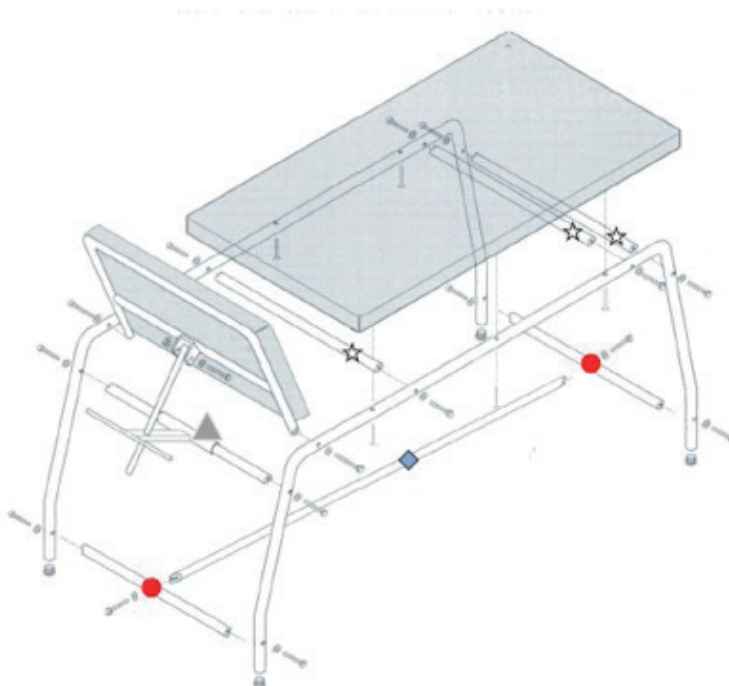

SCHEDA TECNICA

Misure	187x65x73 cm
Peso	27,50 kg
Portata massima	120 kg

AVVERTENZE D'USO

- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.
- Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: **RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!**
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.

- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- *Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.*
- *Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.*

GARANZIA









- *Il prodotto è garantito un anno per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.*
- *Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del prodotto comportano la decadenza immediata della garanzia.*
- *Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.*
- *Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.*

INDICAZIONI DI PULIZIA PER IL TESSUTO:

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.

Non usare solventi, candeggina e detergenti chimici o spray per lucidare.

Attenzione: In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Codice prodotto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Numero di lotto