



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

MASCHERINA FACCIALE MONOUSO CON CUSCINETTO D'ARIA DISPOSABLE AIR CUSHION MASK

Manuale d'uso - User manual



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

ITALIANO

Modello:

REF 57700 / CM65304
REF 57701 / CM65314
REF 57702 / CM65324
REF 57703 / CM65334
REF 57704 / CM65344
REF 57705 / CM65354
REF 57706 / CM65364

MASCHERINA MONOUSO N.0 - neonato
MASCHERINA MONOUSO N.1 - infante
MASCHERINA MONOUSO N.2 - bambino
MASCHERINA MONOUSO N.3 - bambino/large
MASCHERINA MONOUSO N.4 - adulto
MASCHERINA MONOUSO N.5 - adulto/large
MASCHERINA MONOUSO N.6 - adulto/extra large

Avvertenze:













1. La legge federale degli USA impone la vendita del presente dispositivo esclusivamente sotto prescrizione medica.
2. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, al riparo da calore e luce.
3. Il paziente deve essere costantemente monitorato durante l'utilizzo del presente dispositivo.
4. Utilizzare esclusivamente su un solo paziente. L'eventuale riutilizzo può causare infezioni crociate. Non mettere a bagno, non risciacquare, non lavare e non sterilizzare il dispositivo. Questi procedimenti potrebbero lasciare pericolosi residui sulla maschera.
5. Distruggere il dispositivo dopo l'avvenuto utilizzo (smaltire secondo regolamentazioni in materia in vigore).

Istruzioni per l'uso:

1. Prima dell'uso, controllare che il flusso d'aria passi in modo regolare.
2. Collegare al circuito respiratorio o al dispositivo di rianimazione tramite gli adattatori appropriati.
3. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano compatibili e che siano ben saldi.
4. Tenere fermo il dispositivo con la mano o assicurarlo tramite adeguato supporto a fascia per la testa.


Avvertenze:

1. Il prodotto deve essere posto in un luogo asciutto e pulito e in condizioni idonee.
2. Il dispositivo deve essere utilizzato solo da operatori specializzati nelle tecniche di rianimazione CPR.

Simboli / Symbols					
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea Product complies with European Directive		Codice prodotto Product code		Data di scadenza (vedi scatola / bustina) Expiration date (see box / package)
	Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso Read instructions carefully		Fabbricante Manufacturer		Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso Please read instructions carefully		Data di fabbricazione Date of manufacture		Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea Authorized representative in the European community		Dispositivo monouso, non riutilizzare Disposable device, do not re-use		Numero di lotto Lot number

REF 57700 - 57701 - 57702 - 57703
57704 - 57705 - 57706

 Besmed Health Business Corp. Taipei, Taiwan
No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd. Wu-Ku District,
New Taipei City, Taiwan 24888
Made in China

 Mdi Europa GmbH, Langenhagener Str. 71,
30855 Hannover-Langenhagen, Germany

   2460

