

**GIMA**

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: fax 199 400 403 - gima@gimaitaly.com
Export: - fax + 39 02 95380056 - export@gimaitaly.com
- www.gimaitaly.com

Cod. 80210/80211 BILANCIA VETERINARIA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Attenzione! Gli utenti devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

SPECIFICHE:

- Sistema di misura di precisione
- Funzione tara
- Indicatore di sovraccarico "Err"
- Indicatore di batteria scarica
- Display LCD separabile con supporto a parete

PARAMETRI TECNICI:

Tensione: batteria alcalina a 9 V e adattatore per la connessione all'alimentazione elettrica (inclusi)

Peso massimo misurabile: 300 kg

Incrementi di pesatura: 100 g

Peso minimo misurabile: 2 kg

Piattaforma: 600x800 mm

Unità di misura: kg/lb/st

Temperatura di funzionamento/conservazione: 10-40°C/-10-50°C

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA:

- Assicuratevi di seguire la polarità segnata sulla batteria quando la inserite o sostituite.
- Se prevedete di non utilizzare il dispositivo per lungo tempo, rimuovete la batteria.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
- Questo dispositivo non è concepito per essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e competenza, a meno che non siano state controllate o istruite relativamente all'apparecchio stesso da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Utilizzate il prodotto esclusivamente per lo scopo specifico indicato nel Manuale d'uso.
- Utilizzate l'apparecchio solo su una superficie orizzontale stabile.
- Prima di pulire, montare o smontare la copertura, spegnete l'apparecchio e rimuovete la batteria!
- Non utilizzate sostanze abrasive o chimicamente aggressive per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzate l'apparecchio se esso non funziona correttamente, o se è stato fatto cadere, danneggiato o esposto a liquidi. Portate il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato perché sia testato e riparato.
- L'apparecchio è idoneo al solo uso domestico: non è progettato per scopi commerciali.
- Tenete l'apparecchio al riparo da fonti di calore, come radiatori, forni, ecc. Non esponetelo alla luce diretta del sole o all'umidità.
- Non toccate l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Questo prodotto è un fragile dispositivo di misura: evitate che si rompa o cada.
- Non riparate personalmente l'apparecchio: contattate un centro di assistenza autorizzato.