



CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 – 33100 UDINE (Italy)
Tel. ++39 0432 621621
Fax ++39 0432 621620
Internet : www.chinesport.it

ART. 01805
CARROZZELLA
DA TRASPORTO




Aprire



1. Tenete fermo il sedile e sollevate lo schienale. 2. Tirate il cordino alla base dello schienale finche il meccanismo non scatta nel foro del tubo del sedile. 3. Premete verso il basso il sedile e assicuratevi che sia stabile. 4. Posizionate i braccioli 5. posizionate il supporto piedi. 6. Assicurate al morsetto il tubolare posteriore basso del sedile. 7. Fatto!

Chiudere

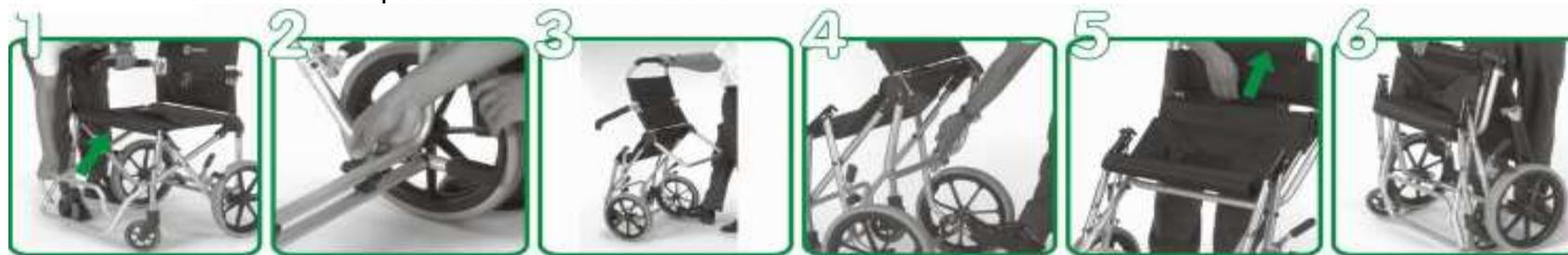

1. Sollevate il supporto piedi. 2. Rilasciate dal morsetto il tubolare posteriore in basso. 3. Tenete fermo con un piede il tubolare posteriore e tirate verso l'alto la maniglia da spinta. 4. Spingete all'interno il tubolare posteriore del sedile. 5. Tirate verso l'alto il cordino e ripiegate lo schienale. 6. Fatto!

ATTENZIONE! 1. Assicuratevi che i tubolari siano ben stabili, per evitare incidenti. 2. Fate particolare attenzione quando aprite/chiodete la carrozzella. 3. Non usate il supporto piedi per salire / scendere dalla carrozzella. 4. Azionate il freno prima di salire / scendere dalla carrozzella.

MADE IN CHINA