

SKEMA[®]FORM

MA MI440 01 A ITA_05-2016


PIANTANA PER IPODERMOCLISI

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO

INDICE

1. CODICE	pag.3
2. INTRODUZIONE.....	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.4
5. AVVERTENZE GENERALI.....	pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE.....	pag.4
6.1 Vista e descrizione delle parti - MI440 Piantana per ipodermoclisi professionale in acciaio inox, su ruote, ad elevazione oleodinamica).....	pag.4
7. MONTAGGIO.....	pag.4
7.1 Istruzioni di montaggio - MI440 Piantana per ipodermoclisi professionale in acciaio inox, su ruote, ad elevazione oleodinamica.....	pag.4
8. MODALITÀ D'UTILIZZO	pag.5
9. PULIZIA E DISINFEZIONE.....	pag.5
9.1 Pulizia.....	pag.5
9.2 Disinfezione	pag.6
10. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.6
10.1 Condizioni di smaltimento generali	pag.6
11. ACCESSORI CON SUPPLEMENTO	pag.6
12. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag.6
12.1 Dimensioni e peso	pag.6
13. GARANZIA.....	pag.6
14. RIPARAZIONI.....	pag.6
14.1 Riparazioni in garanzia	pag.6
14.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag.7
14.3 Prodotti non difettosi.....	pag.7
15. RICAMBI.....	pag.7
16. CLAUSOLE ESONERATIVE	pag.7

 Dispositivo medico di classe I

D. Lgs 24/02/97 n. 46 attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

1. CODICE

MI440 Piantana per ipodermoclisi professionale in acciaio inox, ad elevazione oleodinamica

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto le **piantane per ipodermoclisi** della linea **SKEMAFORM by MORETTI S.p.A.** Il loro design e la loro qualità garantiscono la massima funzionalità, la massima sicurezza ed affidabilità. Le piantane per ipodermoclisi della linea **SKEMAFORM by MORETTI S.p.A.** sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze. Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente. Il presente manuale fa riferimento alla piantana professionale in acciaio inox per ipodermoclisi della linea **SKEMAFORM**. Consultare solo le istruzioni relative al modello da voi scelto.

3. DESTINAZIONE D'USO

La piantana per ipodermoclisi professionale in acciaio inox SKEMAFORM è un dispositivo di supporto all'attività medica e sanitaria, durante la somministrazione al paziente di sostanze per via endovenosa.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia piantane per ipodermoclisi professionali in acciaio inox è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.


5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili e comunque non superiori a 10 anni;
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini;
- Tenere il prodotto imballato lontano da fonti di calore;
- Non superare mai la capacità di carico degli uncini così da prevenire rotture o deformazioni;
- Prima di usare il dispositivo, controllare sempre il corretto assemblaggio.

6. DESCRIZIONE GENERALE

6.1 Vista e descrizione delle parti - MI440

Piantana per ipodermoclisi professionale in acciaio inox, su ruote, ad elevazione oleodinamica

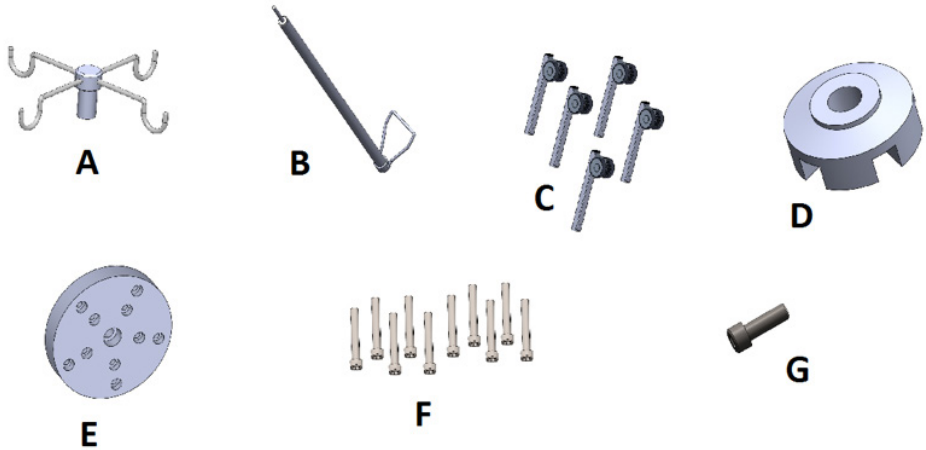

Elenco delle parti

- A. Supporto a gancio in acciaio inox (1pz)
- B. Asta con pompa oleodinamica a pedale (1pz)
- C. Gamba in acciaio inox con ruota (5pz)
- D. Base per asta da flebo professionale (1pz)
- E. Piastra di montaggio base per asta da flebo professionale (1pz)
- F. Viti per fissaggio delle gambe alla base (10pz)
- G. Vite per fissaggio asta oleodinamica su base (1pz)

7. MONTAGGIO





ATTENZIONE!

Eseguire queste operazioni prestando molta attenzione per evitare lesioni fisiche e/o danni alle cose durante il montaggio del dispositivo



7.1 Istruzioni di montaggio - MI440

Piantana per ipodermoclisi professionale in acciaio inox, su ruote, ad elevazione oleodinamica

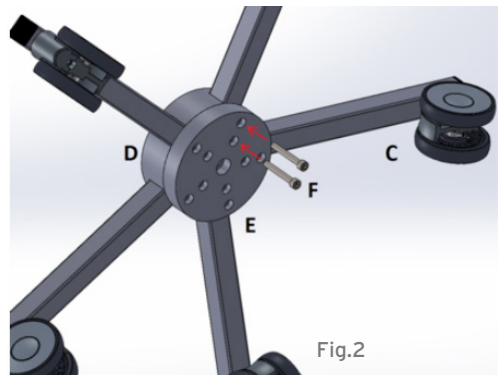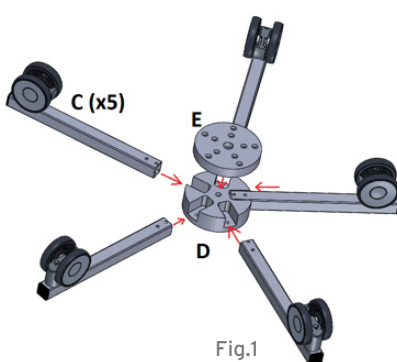




1. Inserire le gambe con ruote (rif.C) nelle apposite sedi della base (rif.D); (Fig.1)
2. Apporre la piastra di fissaggio (rif.E) sulla base con ruote curando il posizionamento dei fori;
3. Stringere le viti di fissaggio (rif.F per 10pz), per collegare stabilmente le gambe con ruote alla base, tramite la piastra di fissaggio; (Fig.2)

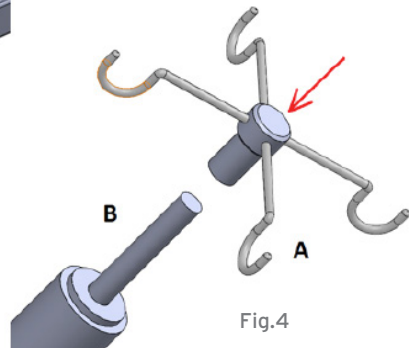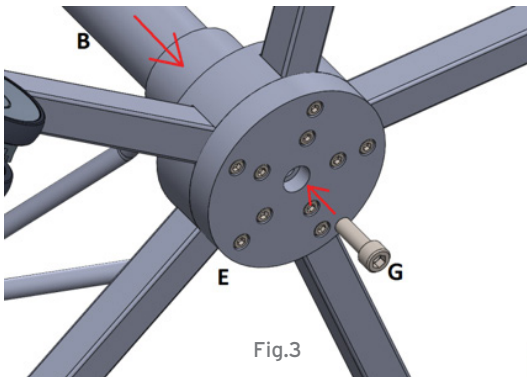

4. Collegare l'asta con pompa oleodinamica (rif.B) alla piastra di montaggio per base (rif.E), stringendo l'apposita vite (rif.G); (Fig.3)
5. Inserire ed avvitare il supporto a gancio (rif.A) nella parte superiore dell'asta oleodinamica (rif.B); (Fig.4)
6. A questo punto la vostra asta da flebo è correttamente montata e pronta all'uso.

8. MODALITÀ D'UTILIZZO

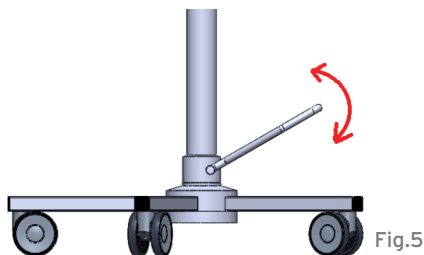

Per incrementare l'altezza dell'asta da flebo oleodinamica, applicare una forza intermittente ripetuta sul pedale di elevazione, come indicato in figura, per estendere completamente l'asta da flebo sono necessari circa 30 azionamenti del pedale (Fig.5). Per decrementare l'altezza dell'asta da flebo oleodinamica, premere a fondo il pedale di regolazione e mantenere la pressione fino al raggiungimento dell'altezza desiderata.

AVVERTENZE:

- Verificare la piantana prima di ogni uso verificando la presenza di eventuali danneggiamenti op di usura che ne possano compromettere il funzionamento. In questo caso non usare la piantana;
- Verificare sempre che il posizionamento della piantana sia tale in modo da garantire la massima comodità e sicurezza del paziente, fare particolare attenzione al movimento su ruote;
- Non superare mai il carico massimo per gancio indicato nelle caratteristiche tecniche.

9. PULIZIA E DISINFEZIONE

9.1 Pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro.



ATTENZIONE!

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcool, detersivi a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

9.2 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante.

10. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

10.1 Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

11. ACCESSORI CON SUPPLEMENTO

MIA441 Maniglia in acciaio inox per MI440

MIA442 Maniglia con cestello in acciaio inox per MI440

MIA443 Maniglia con vaschetta in acciaio inox per MI440

MIA444 Cestello e vaschetta in acciaio inox per MI440

12. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piantana per ipodermoclisi da sala operatoria;
- Acciaio inox 18/10 (AISI304);
- Elevazione tramite pompa idraulica a pedale;
- 4 ganci antisganciamento;
- Portata max 60kg uniformemente distribuito, 15kg a gancio;
- Base appesantita antiribaltamento;
- 5 ruote piroettanti Ø 75mm, 2 con freno.

12.1 Dimensioni e peso

Codice	MI440
Altezza (min/max)	1540mm / 2550mm
Ingombro base(mm)	650mm
Portata massima consentita per gancio	15kg
Portata massima consentita	60kg

13. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

14. RIPARAZIONI

14.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a

sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

14.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

14.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

15. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

16. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com