# Tavolino inclinabile richiudibile TA6 BIANCO

# Istruzioni d'uso e manutenzione



questo prodotto è conforme al REGOLAMENTO-UE-745/2017 sui Dispositivi Medici.

# Termigea s.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via Delle Catene 1/3 – Località Madonna dell'Acqua - 56017 San Giuliano Terme (PI) TEL. +39 050 878741 - FAX +39 050 878742 – info@termigea.it



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza. Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente a Termigea s.r.l.

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Termigea®

1. Avvisi per la sicurezza	_ 2
2. Destinazione prevista	_ 3
3. Schede tecniche	_ 3
4. Etichettatura	_ 3
6. Uso	_ 6
7. Pulizia e Manutenzione	_ 6
8. Deposito	_ 6
	_ 6
10. Dichiarazione di Conformità UE (Allegato IV – Art. 19 REGOLAMENTO-UE-745/2017 sui Dispositivi Medici)	
11. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA	_ 6
12. Resi	_ 8

# 1. Avvisi per la sicurezza

Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto.



Ed.02 Rev.00 del 06/10/2020

- Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia.
- Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- Non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avvisate immediatamente il Vs. rivenditore.

# 2. Destinazione prevista

I tavolini **Termigea s.r.l.** sono Dispositivi Medici destinati a compensare una disabilità o inabilità dell'utente costretto a letto.

**Termigea s.r.l.** declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

#### 3. Schede tecniche

# 3a. Misure tecniche

Articolo: TA6 BIANCO
Struttura: Acciaio verniciato
Dimensione piano: cm 60(l)x40(p)

Altezza piano da terra: altezza minima 66(da terra a sopra al piano)- 63,5 (da terra a sotto al piano) – altezza massima 93 cm (da terra a sopra al piano) – 90,5 5 (da terra a sotto al piano)

Ruote: n.2 ø 5 cm

Ruote frenanti: n.2 ø 5 cm

3b. Classificazioni RDM: 2333393 CND: Y1803

# 3c. Descrizione estesa


Struttura in acciaio verniciato grigio regolabile in altezza e piano inclinabile in laminato color bianco, con bordo di contenimento. Quattro ruotine piroettanti, due con bloccaggio. Altezza regolabile manualmente mediante manopola. Pieghevole e richiudibile per essere riposto con facilità.

#### 4. Etichettatura




# 5. Installazione

Il tavolino viene consegnato quasi completamente assemblato, da montare ci sono le 4 ruote ( 2 dotate di freno di arresto , che possono essere facilmente montate con la apposita chiave in dotazione, e la manopola di bloccaggio in posizione di lavoro verticale del montante del tavolo

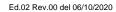



745-168-TA6 BIANCO travolino inclinabile Mod. TER 21 - Istruzioni d'uso e manutenzione

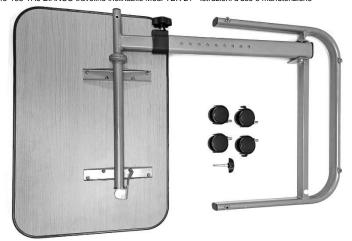

Una volta ricevuto il tavolino, e prima di usarlo, controllare che non ci siano parti danneggiate: sostituite subito eventuali parti rotte.

1. Montare le 4 ruote con la apposita chiave fornita facendo attenzione a serrare bene il bullone di fissaggio ed avendo cura che le 2 ruote con freno di bloccaggio siano posizionate entrambe nella parte anteriore o in quella posteriore della base , ad ogni modo entrambe dalla stessa parte.





2. Posizionare la manopola di fissaggio nel suo alloggio, sollevare il montante fino a fargli raggiungere la posizione verticale e fissare la manopola con cura stingendo con forza





3. La giusta inclinazione del piano di lavoro può essere ottenuta allentando la leva di bloccaggio del piano situata sotto il piano stesso, come nella prima foto sotto e una volta



Ed.02 Rev.00 del 06/10/2020

posizionato il piano alla inclinazione voluta riportandola nella posizione di blocco come nella seconda foto sotto riportata.





4. per la regolazione in altezza del piano allentare la manopola indicata nella prima foto sotto e posizionare premendolo il bottone a molla indicato nella seconda foto, al foro corrispondente alla altezza che si vuole ottenere, quindi serrare nuovamente la manopola





A questo punto il tavolo è pronto per l'uso



#### 6. Uso

▲ ATTENZIONE!:Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. In caso di dubbio sull'utilizzo oppure sull' adattamento del prodotto ai proprio bisogni rivolgersi al proprio rivenditore oppure a chi ha prescritto il prodotto.

Avviso: In caso di riutilizzo del Dispositivo Medico da parte di altro utente si raccomanda di eseguire le normali operazioni di pulizia e sanificazione oltre a un completo checkup di manutenzione.

- 1. Non oltrepassare il peso massimo consentito o indicato sul prodotto.
- 2. Assemblare, se necessario, il prodotto secondo allegate avvertenze per l'assemblaggio.
- 3. Verificare prima di qualsiasi utilizzo del prodotto che sia stabile, rigido e che tutte le viti siano strette.
- 4. Se il prodotto è danneggiato o consumato, non utilizzarlo. Prendere contatto col proprio rivenditore per far sostituire i pezzi consumati o che funzionano male.
- 5. Non stoccare il prodotto a delle temperature estreme (<0° >40°) o all'esterno.

# 7. Pulizia e Manutenzione

Pulire regolarmente il dispositivo utilizzando dei prodotti domestici non abrasivi e seguendo le istruzioni per l'utilizzo. Asciugare con uno straccio morbido.

Per disinfettare il prodotto nel caso di un utilizzo del dispositivo da parte di più persone, seguire le raccomandazioni del responsabile dell'igiene.

# 8. Deposito

Immagazzinate il tavolino in luogo protetto dalla polvere.

#### 9. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

# 10. Dichiarazione di Conformità UE (Allegato IV – Art. 19 REGOLAMENTO-UE-745/2017 sui Dispositivi Medici)

La Dichiarazione di Conformità UE è reperibile sul sito web www.termigea.it o contattando l'azienda all'indirizzo mail commerciale@termigea.it.

# 11. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

# 11.1. Oggetto

**Termigea S.r.l.** ("**Termigea**"), garantisce i propri prodotti contro ogni difetto di fabbricazione e contro ogni difetto di conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di vendita e/o nelle "Istruzioni d'uso e manutenzione" del singolo prodotto.

I difetti coperti dalla presente garanzia sono esclusivamente quelli già presenti al momento della consegna del prodotto.

### 11.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre i difetti sopravvenuti successivamente alla consegna, né i difetti già evidenti o rilevabili al momento dell'acquisto con l'uso della normale diligenza.

La presente garanzia non copre altresì i difetti derivanti da:

- rormale usura;
- remontaggio imperfetto o errato per mancato rispetto o non corretta esecuzione delle apposite Istruzioni.
- rimpropria manutenzione, non conforme alle istruzioni fornite da Termigea e allegate alla presente



Ed.02 Rev.00 del 06/10/2020

- danni o deterioramento della superficie esterna, finitura o apparenza estetica del prodotto per impropria manutenzione o lavaggio (ad. es. con alcool, solventi chimici, strumenti abrasivi o comunque in modo non conforme a quanto prescritto nelle apposite istruzioni);
- manomissioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio del prodotto;
- rdanni causati da colpi, urti, incidenti;
- @ danni causati da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo;
- danni causati da incidenti nella fase di spedizione o trasporto, incluso lo smarrimento del prodotto;

L'acquirente non ha diritto alle prestazioni di cui alla presente garanzia nel caso in cui il prodotto sia stato riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche e alterazioni siano state espressamente autorizzate per iscritto da Termigea.

Sono a carico dell'acquirente:

- ☞ le spese di trasporto del prodotto da/a un rivenditore autorizzato
- 🕶 i costi di manodopera necessari per disinstallare il prodotto e/o sue componenti.

Non sono altresì coperti dalla presente garanzia i danni per il mancato utilizzo del prodotto durante il periodo necessario per la riparazione o la sostituzione.

Il prodotto oggetto della presente garanzia (o parti dello stesso) non sarà mai considerato "difettoso" per gli effetti della presente garanzia qualora esso (o sue parti) si discordi dai livelli qualitativi/tecnici resi standard da normativa entrata in vigore successivamente alla data di acquisto, o comunque stabiliti da normativa in qualsiasi tempo in vigore al di fuori del territorio italiano. Pertanto, eventuali adattamenti, cambiamenti o regolazioni da apportarsi per conformare il prodotto (o sue parti) a tali livelli qualitativi/tecnici non sono compresi nella presente garanzia.

# 11.3. Prestazioni oggetto della garanzia

Il prodotto riconosciuto difettoso da Termigea verrà riparato o sostituito a discrezione di **Termigea** a titolo gratuito entro 30 gg lavorativi (salvo ritardi imputabili ai fornitori) dalla data di ricevimento della merce. In nessun caso sarà riconosciuta all'acquirente una riduzione del prezzo d'acquisto.

L'esecuzione di qualsiasi servizio di riparazione o sostituzione in virtù della presente garanzia non costituisce ammissione o accettazione della non conformità del prodotto o della responsabilità di Termigea in merito al difetto riscontrato.

# 11.4. Procedura

Qualora l'acquirente riscontri un difetto del prodotto coperto dalla presente garanzia, per ottenere le prestazioni previste a carico di Termigea, è tenuto a restituire il prodotto difettoso al proprio negoziante.

Il prodotto difettoso dovrà essere restituito preferibilmente nel proprio imballaggio originale o in analogo imballo atto a prevenire ogni danneggiamento durante il trasporto, accompagnato dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto e la data d'acquisto al dettaglio.

Il materiale va spedito in porto franco (il pagamento del trasporto è a carico del mittente), salvo diversa indicazione a **Termigea srl presso l'indirizzo specificato in copertina e nella Dichiarazione di conformità.** 

**Termigea** ha diritto di rifiutarsi di adempiere le obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni presenti sui documenti comprovanti l'acquisto sono state alterate o cancellate dopo l'acquisto da parte dell'acquirente, o mancano nel momento della richiesta della riparazione/sostituzione. Il materiale non correttamente imballato o con imballo danneggiato sarà respinto al mittente.

Qualora il prodotto di cui si chiede la riparazione o sostituzione non presenti alcun difetto, le spese di controllo, di intervento e di spedizione saranno a carico dell'acquirente.



Ed.02 Rev.00 del 06/10/2020

**Termigea** declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti o smarrimenti della merce spedita o resa al cliente.

#### 11.5. Termini

La presente garanzia copre esclusivamente i difetti manifestati entro e non oltre il termine di due (2) anni dalla data di consegna del prodotto (quale risulta dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto o dalla bolla di consegna, se posteriore). L'acquirente decade dai diritti previsti dalla presente garanzia se non denuncia il difetto del prodotto entro il termine di trenta (30) giorni dalla data in cui è stato scoperto.

#### 11.6. Estensione territoriale

La presente garanzia copre i difetti dei prodotti Termigea venduti/acquistati in Italia.

# 11.7. Esclusività e prevalenza

La presente garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia, dichiarazione o impegno resi per iscritto o oralmente da Termigea, e regola per intero l'impegno di Termigea nei confronti dell'acquirente di sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul prodotto, qualora il medesimo presenti difetti coperti dalla presente garanzia.

#### 11.8. Divieto di cessione

La presente garanzia viene offerta unicamente all'acquirente del prodotto e non è estensibile a terzi. I diritti dell'acquirente in virtù della presente garanzia non sono cedibili.

#### 11.9. Modifiche

Nessun rivenditore, distributore. agente o dipendente di Termigea è autorizzato a modificare, estendere o ampliare le condizioni e i termini di cui alla presente garanzia.

# 11.10. Legislazione applicabile e foro di competenza

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Eventuali controversie relative all'interpretazione, validità, applicazione della presente garanzia saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pisa (PI), Italia.

#### 11.11. Avvertenza

Si raccomanda di effettuare tutte le procedure di installazione, uso e manutenzione seguendo scrupolosamente le istruzioni del prodotto ivi contenute.

#### 12. Resi

Il Modulo di Reso è reperibile sul sito web www.termigea.it o contattando l'azienda all'indirizzo mail commerciale@termigea.it.

AVVISO: In caso di incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalarlo Termigea segnalazioniautorita@termigea.it e al Ministero della Salute.