

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE ED INDICAZIONI

Sedia regolabile a sette differenti livelli d'altezza con struttura in acciaio verniciato e schienale e braccioli estraibili. Dispositivo particolarmente indicato, tra l'altro, in fase di riabilitazione a seguito di interventi all'anca ed in presenza di difficoltà motorie in seduta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Dimensioni della seduta | 28 x 36 cm |
| Dimensioni dello schienale | 15 x 29 cm |
| Altezza schienale dalla seduta | 28 cm |
| Distanza tra i braccioli | 49.5 cm |
| Regolazione in altezza | da 55 a 70 cm |
| Peso | 5.6 kg |
| Portata | 135 kg |

MATERIALI COMPONENTI

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Struttura | Acciaio verniciato |
| Braccioli e supporti schienale | Acciaio cromato |
| Poggia-braccia | Poliuretano morbido |
| Seduta e schienale | Ecopelle con imbottitura |
| Puntali | Gomma |

PRECAUZIONI

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo.

Controllare lo stato e la tenuta dei puntali in gomma ed il corretto fissaggio di braccioli e schienale. Prestare attenzione in presenza di superfici bagnate o scivolose.


PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire con panno morbido e detersivi non aggressivi avendo cura, in seguito, di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive.

Verificare periodicamente il corretto serraggio di viti e bulloni nonché la tenuta delle saldature.

Controllare la funzionalità delle spine di bloccaggio e lo stato dei puntali in gomma.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

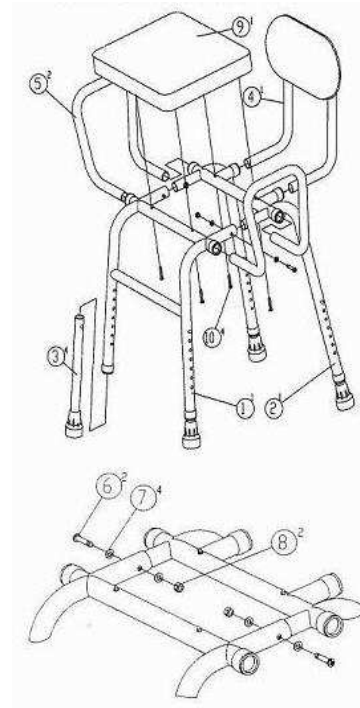

1. Unire la parte anteriore della struttura (1) con la parte posteriore (2) tramite le viti con bulloni (6, 7 e 8).
2. Inserire le gambe del dispositivo (3).
3. Fissare la seduta (9) alla struttura utilizzando le viti (10) con rondella sagomata.
4. Assemblare lo schienale (4) fissando il poggia-schiena ai supporti in acciaio cromato tramite le viti (10) con rondella sagomata.
5. Posizionare i braccioli (5) e lo schienale (4) assicurandoli alla struttura attraverso le spine di bloccaggio.
6. Regolare, infine, le gambe all'altezza desiderata avendo cura di verificare il corretto posizionamento delle spine di bloccaggio nei fori selezionati.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione di tutte le avarie dovute a negligenze, uso improprio o mancanza di manutenzione. La garanzia non è applicabile ai prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEDIA SUBITO-IN-PIEDI AQ-70



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it