



**MOPEDIA**


**SEDIE MULTIFUNZIONE PER BAGNO  
MANUALE D'ISTRUZIONE**

---

**MULTIFUNCTION CHAIRS FOR BATHROOM  
INSTRUCTION MANUAL**

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>2. DESTINAZIONE D'USO.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>4. AVVERTENZE GENERALI .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>5. DESCRIZIONE GENERALE .....</b>	<b>pag.3</b>
5.1 Sedie multifunzione per bagno.....	pag.3
<b>6. PRIMA DI OGNI USO.....</b>	<b>pag.4</b>
<b>7. PRIMA DEL MONTAGGIO .....</b>	<b>pag.4</b>
<b>8. MONTAGGIO .....</b>	<b>pag.4</b>
<b>9. SEDUTA.....</b>	<b>pag.4</b>
9.1 Alzare i braccioli (solo RP783) .....	pag.4
9.2 Abbassare i braccioli (solo RP783).....	pag.4
<b>10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>11. MODALITA' D'USO .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>12. MANUTENZIONE .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>13. PULIZIA E DISINFEZIONE.....</b>	<b>pag.5</b>
13.1 Pulizia .....	pag.5
13.2 Disinfezione .....	pag.6
<b>14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO .....</b>	<b>pag.6</b>
14.1 Condizioni di smaltimento generali .....	pag.6
<b>15. CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>pag.6</b>
<b>16. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI .....</b>	<b>pag.6</b>
<b>17. GARANZIA .....</b>	<b>pag.7</b>
<b>18. RIPARAZIONI .....</b>	<b>pag.7</b>
18.1 .....	pag.7
18.2.....	pag.7
18.3.....	pag.7
<b>19. RICAMBI .....</b>	<b>pag.7</b>
<b>20. CLAUSOLE ESONERATIVE .....</b>	<b>pag.7</b>

 Dispositivo Medico di classe I D.Lgs 24/02/97 n.46  
 attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

## 1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un ausilio della linea **MOPEDIA** by Moretti. Le sedie multifunzione per bagno Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il dispositivo. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

## 2. DESTINAZIONE D'USO

Le sedie multifunzione per bagno **MOPEDIA** by Moretti fungono da ausilio per doccia e bagno e sono adatte a persone con difficoltà di deambulazione. Comprendono quattro funzioni in un: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia.

### ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel presente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

## 3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

## 4. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta
- Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da fonti di calore
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

## 5. DESCRIZIONE GENERALE

### 5.1 Sedie multifunzione per bagno

- RP780** Modello fisso
- RP781** Modello pieghevole
- RP782** Modello smontabile su ruote
- RP783** Modello con braccioli pieghevoli

Le sedie multifunzione per bagno **MOPEDIA** sono realizzate in alluminio anodizzato (RP783 è in foto a scopo illustrativo)

acciaio), con confortevole sedia in PVC e puntali in gomma antiscivolo (ad eccezione del modello RP782 dotato di ruote piroettanti). Regolabili in altezza ogni 2,5 cm. Comprendono quattro funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia. Disponibili nelle versioni fissa, pieghevole e smontabile su ruote.

## 6. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Verificare il corretto inserimento del pulsante nel foro nonché l'assemblaggio del dispositivo

## 7. PRIMA DEL MONTAGGIO

Sballare il prodotto e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato, si prega di contattare il rivenditore più vicino.

## 8. MONTAGGIO

**RP780** Inserire il supporto per WC al prodotto che viene fornito già montato facendo attenzione ad incastrare correttamente il supporto con la barra orizzontale posteriore.

**RP781** Allargare le parti laterali della struttura alzare la parte con il supporto WC già montato e fissare le due estremità alle parti laterali.

**RP782** Allargare le parti laterali della struttura alzare la parte con il supporto WC già montato e fissare le due estremità alle parti laterali. Inserire il supporto per WC facendo attenzione ad incastrare correttamente il supporto con la barra orizzontale posteriore.



**RP783** Inserire il supporto per WC facendo attenzione ad incastrare correttamente il supporto con la barra orizzontale posteriore. Inserire la barra dello schienale rivolto verso l'alto negli appositi fori delle guide posteriori facendolo bloccare dalle clip di sicurezza.



(fig.1)



(fig.2)

## 9. SEDUTA

Premere la clip di sicurezza per regolare l'altezza delle sedie sfilando la parte interna della gamba e portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata. Controllare che tutte e quattro le gambe siano regolate alla stessa altezza.

### 9.1 Alzare i braccioli (solo RP783)

Fare ruotare verso l'alto i braccioli fino alla posizione di bloccaggio di sicurezza delle apposite clip. (fig.1)

### 9.2 Abbassare i braccioli (solo RP783)

Premere le clip di sicurezza verso l'interno e quindi ruotare i braccioli verso il basso. (fig.2)

**NOTE** Prima di sedersi:

(foto a scopo illustrativo)

- Posizionare il prodotto su una superficie piatta e solida e se presenti, bloccare i freni delle ruote
- Assicurarsi che il fermo del bloccaggio sia fissato bene e che il prodotto sia in una posizione stabile

## 10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose
- Non superare il peso massimo paziente riportato sull'etichetta prodotto e nel capitolo caratteristiche tecniche del presente manuale
- La sedia può essere usata solo su una superficie solida e piatta. Non usare la sedia su scale, salite o discese
- Non utilizzare la sedia in modo diverso da quanto indicato nel presente manuale. Si declina qualsiasi responsabilità per un uso improprio della sedia
- Evitare di lasciare il dispositivo all'esterno e a contatto con l'acqua per un periodo di tempo prolungato
- Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto nonché lo stato dei puntali di appoggio e delle ruote. Sostituirli una volta usurati
- In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore
- Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini

## 11. MODALITÀ D'USO

- Mettersi a sedere distribuendo il peso su tutto il sedile. Non sedersi spingendo solo su un lato
- Appoggiarsi sempre su entrambi i braccioli per alzarsi e mantenere l'equilibrio
- In caso di utilizzo della sedia da parte di persone con particolari difficoltà motorie, aiutarle sempre nel sedersi e nell'alzarsi dalla sedia



### ATTENZIONE!

Non movimentare l'ausilio con il paziente seduto

## 12. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea **MOPEDIA** by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto.

Per ispezione periodica si intende un esame delle seguenti parti:

- La struttura portante della sedia e parti di collegamento
- Controllare montaggio e funzionamento delle ruote con relativo freno
- Verificare tutti i punti di saldatura
- Verificare l'usura dei puntali ove presenti

In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

## 13. PULIZIA E DISINFEZIONE

### 13.1 Pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro.



### ATTENZIONE!

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detersivi a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

### 13.2 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante.

## 14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

### 14.1 Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

## 15. CARATTERISTICHE TECNICHE

Codici	Portata max	Altezza braccioli	Altezza seduta	Base	Materiali utilizzati
RP780	130 kg	Da 66 a 76 cm	Da 45 a 55 cm		Struttura in tubolare d'alluminio
RP781		Da 64 a 74 cm	Da 46 a 56 cm		Struttura in tubolare d'alluminio
RP782		Da 64 a 74 cm	Da 47 a 57 cm		Struttura in tubolare d'alluminio
RP783		Da 60 a 78 cm	Da 40 a 58 cm		Struttura in tubolare d'acciaio

Le misure hanno una tolleranza di  $\pm 1$  cm

## 16. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI



### RV7058-4

Seduta e coperchio per sedia comoda  
**RP780 - RP781**  
**RP782**  
 Misure foro:  
 20,5 x 24 cm



### RV7058-5

Seduta e coperchio per sedia comoda  
**RP783**



### RV7069-1

Secchio, manico e coperchio per sedia comoda  
**RP78x**



### RV7024

Ø 29mm  
 Puntali per  
**RP78x**  
 4 pezzi



### RV7051

Ruote piroettanti per **RP782** paio

## 17. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

## 18. RIPARAZIONI

**18.1 Riparazione in garanzia:** Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

**18.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia:** Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

**18.3 Prodotti non difettosi:** Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

## 19. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

## 20. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto \_\_\_\_\_

Acquistato in data \_\_\_\_\_

Rivenditore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Venduto a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)