

# HUGO Maniglia per la vasca

Istruzioni per l'uso




Grazie per aver acquistato la maniglia da vasca HUGO. Questo prodotto vi accompagnerà attraverso la vostra vita quotidiana. Approvato e utile per la vostra assistenza perché HUGO è facile da installare e garantisce il miglior supporto alle vostre esigenze.

I nostri prodotti sono stati designati e fabbricati secondo le attuali norme di sicurezza e con la disposizione del Consiglio Direttivo 93/42/EEC dei Dispositivi Medici.

## IMPORTANTE

*Si prega di leggere le seguenti istruzioni per la Vostra sicurezza e per conoscere le caratteristiche di questo prodotto. Si prega di non usare il prodotto senza aver prima letto queste istruzioni.*

**Conservare questo manuale cosicché le informazioni possano essere consultate nuovamente in futuro.**

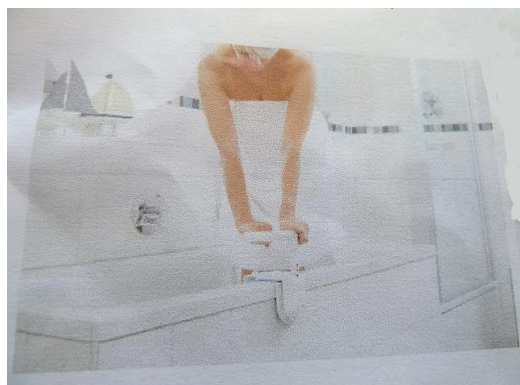

## **Istruzioni**

si prega di accertarsi che tutte le istruzioni siano state interamente comprese prima di procedere al montaggio e all'uso del prodotto per la prima volta. In caso di problemi nel capire le istruzioni di sicurezza di montaggio e di uso, si consiglia di contattare il proprio rivenditore per qualsiasi informazione, per evitare danni al prodotto e alle persone che ne fanno uso. Consultarsi con il proprio terapeuta o medico specializzato che si accerti che il prodotto sia "adatto" alle vostre esigenze, e si consiglia di non utilizzare il prodotto affinché tale consultazione non sia avvenuta.

## **Garanzia**

Il produttore offre 24 mesi di garanzia sul prodotto contro ogni difetto o problema riguardante la progettazione e costruzione dei materiali. La garanzia non copre danni causati da un utilizzo incorretto, smantellamento, da riparazioni effettuate da persone non autorizzate, danni risultanti da una non osservanza delle istruzioni, da una pulizia incorretta o per un uso commerciale.

La riparazione o il cambio del prodotto non estenderà il periodo di garanzia. Conservare la fattura/scontrino poiché esso certificherà l'acquisto.

## **Dati Tecnici**

Capacità massima: 120 kg

Peso del prodotto: 2.5 Kg

Larghezza del morsetto: Dai 2.9 cm ai 13.5 cm

Altezza della maniglia: Dai 8.0 ai 14 cm

Materiali: Plastica, acciaio inossidabile, gomma antiscivolo

## **Precauzioni, servizio e manutenzioni**

- Ispezionare tutte le parti della maniglia e accertarsi che sia in condizioni ottimali prima di montare e usare la maniglia per la prima volta.
- Prestare sempre attenzione alla capacità massima di 120 kg.
- Controllare costantemente lo stato del prodotto. Se alcune parti sono difettose, danneggiate o logorate, queste vanno immediatamente sostituite da personale autorizzato
- Pulire il prodotto costantemente con una spugna umida e detergenti non aggressivi e con disinfettanti di uso domestico.
- Non usare spazzole, detergenti aggressivi. In caso di pulizia in un ospedale o in una struttura simile, saremo noi a comunicare all'responsabile dell'igiene la procedura corretta di pulizia.

## **Implementazione - istruzioni per l'uso**

La maniglia da vasca HUGO è essenziale per persone che hanno difficoltà nel gestire il loro equilibrio. HUGO offre sicurezza e il miglior confort nella quotidianità. Con la possibilità di regolar la lunghezza e la larghezza, questo prodotto può essere comodamente montato sul bordo della vasca. Fissare la maniglia sul bordo della vasca.

## **Contenuto della confezione**

1x Morsetto con gomma antiscivolo blu

1x Impugnatura principale con tubo per la regolazione in altezza.

1x Impugnatura piccola per la presa.

1x borsa con: 2 chiavi a brugola, 2 viti lunghe, 2 corte, 4 rondelle, 2 tappi di copertura, 3 piastre distanziatrici autoadesive.


## Montaggio

1. Inserire il manico principale col tubo nel buco superiore del morsetto, come mostrato in figura 1(1). Regolare la maniglia all'altezza desiderata e usare la chiave a brugola per stringere entrambe le viti lunghe. Dopodiché inserire i due tappi bianchi dentro i buchi per le viti.

2. Montaggio della maniglia per la presa: Allentare PAD-1 con la manopola di regolazione finché la due piccole viti e le rondelle possano essere inserite dall'interno attraverso i buchi in metallo per fissare la maniglia come illustrato nella figura 1 (2). Stringere le viti usando la chiave a brugola piccola. La maniglia può essere montata al lato che si desidera (destra, sinistra) per ottenere il miglior supporto.


La maniglia può essere montata sia a destra che a sinistra della vasca; ciò dipende dalla posizione che viene assunta nella vasca.

HUGO ora è pronto per esser posizionato nella vasca.

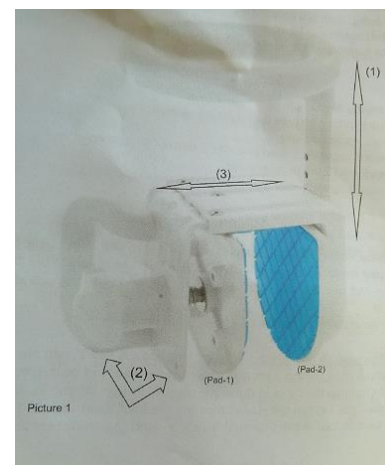

## Montaggio di HUGO nella vasca

Importante: Ispezionare la superficie dove si vuol applicare HUGO ed assicurarsi che essa sia completamente asciutta e libera da sapone o altre sostanze scivolose. Per trovare la giusta posizione si consiglia di sedersi all'interno della vasca (asciutta) e posizionare la maniglia nell'area che viene raggiunta dalle mani sul bordo della vasca. Ora allentare la manopola del pad-1 affinché HUGO non appoggi completamente sul bordo della vasca. Se la distanza tra i due pad non è abbastanza larga, allentare le 3 viti sopra con la piccola chiave a brugola e tirare fuori la piastra di metallo finché non si crei la distanza necessaria tra i due Pad per consentire a HUGO di appoggiarsi completamente sul bordo della vasca (Figura 2). Dopo ciò, stringere le 3 viti allentate in precedenza e mettere il prodotto sul bordo della vasca. Assicurarsi che la parte superiore sia solidamente posizionata sul bordo della vasca. Ora regolare la posizione del pad 1 affinché la sua superficie appoggi completamente sulla parete interna della vasca. Stringere la manopola del pad-1 affinché HUGO non si muova minimamente. (Figura 3)

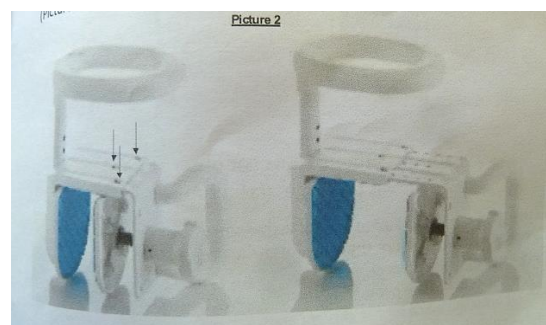

## Vasche senza superficie esterna del bordo piana

In questi casi usare le piastre autoadesive per chiudere il distacco che c'è tra il pad e la superficie della vasca. Rimuovere la pellicola protettiva sulla piastra adesiva e inserirla nello spazio tra il pad e il bordo della vasca. Se non dovesse bastarne una, usare la seconda e se necessario anche la terza.

