

MANUALE D'USO SUPPORTO PER LA SEDUTA AUTO METRO

La ringraziamo per aver acquistato la maniglia per il supporto seduta auto METRO.


La invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza e le funzioni di questo prodotto

IMPORTANTE: Evitare d'inserire la maniglia METRO nel chiavistello in qualsiasi direzione che non sia quella che vedete riporta sotto. Se non si segue questa istruzione potrebbero accadere incidenti e si potrebbe rovinare il chiavistello o la porta dell'auto.



Osservate la figura sottostante. Questa figura rappresenta il METRO in sezione, inserito nel chiavistello così che sia chiaro come la parte in alluminio deve essere inserita all'interno del chiavistello prima di fare qualsiasi tipo di pressione.

Quando il METRO è inserito il più possibile allora il chiavistello si inserirà all'interno della cavità predisposta (vedi sotto).

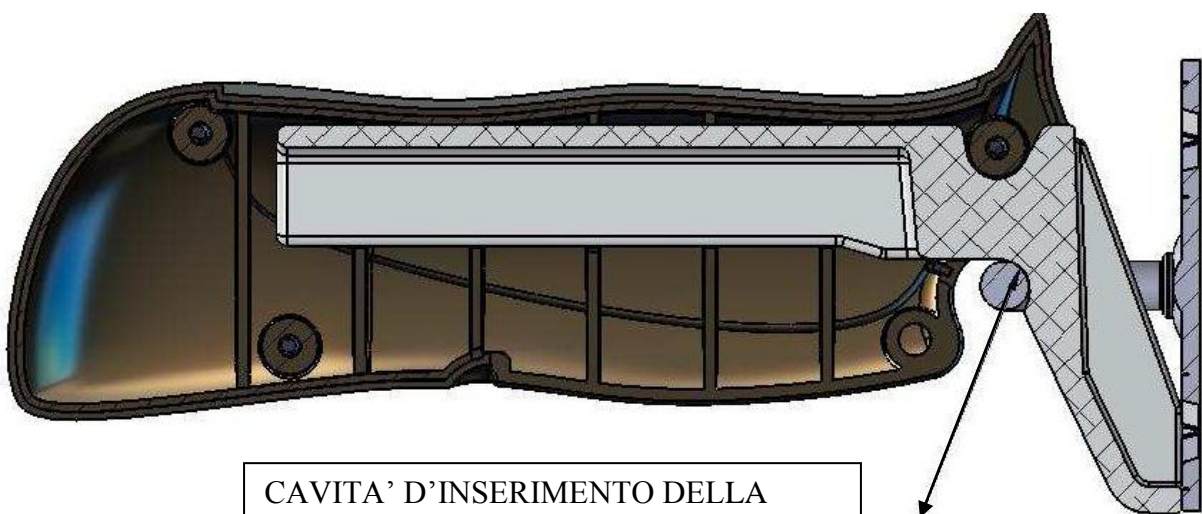

CAVITA' D'INSERIMENTO DELLA
MANIGLIA

ATTENZIONE: E' importante leggere con cura le seguenti informazioni.

Se non si colloca la maniglia METRO nella giusta posizione c'è il pericolo di incidenti o perfino morte. **Non collocare la maniglia METRO in altre posizioni che non sia quella indicata precedentemente.** Standers Inc. ha l'incarico di provvedere le norme di sicurezza e le istruzioni per evitare incidenti.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

1. Assicurarsi che la maniglia METRO sia ben inserita nel chiavistello. La maniglia deve essere inserita nel chiavistello il più possibile.
2. Ulteriori misure di sicurezza sono da prendere per utilizzatori ad alto rischio. Utilizzatori ad alto rischio includono quelli che sono mentalmente inconsci (inclusi gli utenti sotto medicazioni), coloro che per dimensioni, peso o altre condizioni che impediscono l'uso di METRO senza assistenza.

Se soffrite di disturbi fisici, avete appena subito un incidente o state prendendo medicinali questo potrebbe influire sul vostro equilibrio e sull'abilità di stare in piedi o sedersi. Perciò prima di utilizzare METRO è meglio consultare il vostro medico. Se la maniglia METRO non è usata correttamente potrebbero esserci pericoli di incidenti e ferite.


Il prodotto non è stato progettato per portare tutto il peso di una persona. Questo prodotto è stato testato per una portata massima di 113 kg, se il peso è sulla parte centrale della maniglia. In altre parole una persona che ha un peso di 136 kg può usare questo prodotto fino a che il peso posto sulla maniglia nella parte centrale non superi i 113 kg. Il prodotto è inteso per dare equilibrio e supporto nell'alzarsi o sedersi sull'auto.

Le istruzioni devono essere seguite con attenzione per assicurarsi che il prodotto sia assemblato e posizionato nel modo corretto. Se non si seguono le istruzioni con attenzione potrebbero avvenire incidenti anche seri.

I bambini non dovrebbero usare o giocare con la maniglia METRO.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: Sia la STANDERS Inc che i produttori e i distributori compresa l'ALLMOBILTY TRADING s.r.l. **non sono responsabili** per ogni incidente o danno derivante dal l'uso e dall'assemblaggio improprio della maniglia METRO.

CARATTERISTICHE:

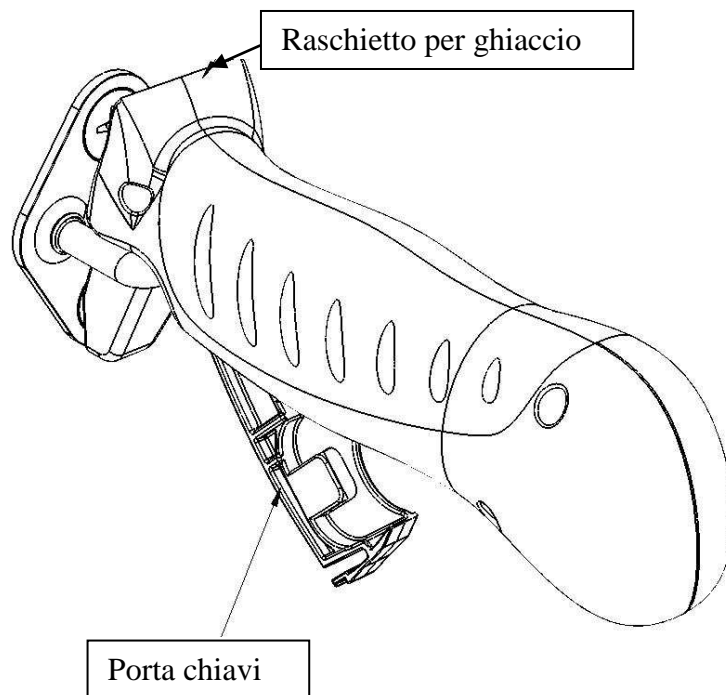

Raschietto per ghiaccio: Ruotare la maniglia di 180° in modo da tenere il palmo della mano sopra il compartimento porta chiavi e usare il raschietto per togliere il ghiaccio dalla macchina.

Porta chiavi: Il compartimento porta chiavi può essere aperto premendo sulla piccola levetta presente sulla maniglia e girandola come riportato in figura.



Via G. Balla, 4 - 42124 Reggio Emilia
www.allmobility.it info@allmobility.it
Tel 0522 941078 - Fax 0522 946625