

## PANCA DA DOCCIA – Manuale d'uso



Attenzione: Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione

### Fasi di montaggio:

1. Capovolgere la Panca da doccia in modo che la seduta sia rivolta al pavimento.
2. Installare lo schienale attraverso i due tubi a fissaggio immediato e scorrevole posizionati sotto lo schienale. I tubi presentano un foro di fissaggio per installare fermamente lo schienale garantendo la massima sicurezza dell'utente, provvedere pertanto a bloccare all'interno dei fori gli appositi pulsanti con molla. Per smontare lo schienale è sufficiente premere i due pulsanti presenti sui fori e far scorrere lo schienale sui tubi.  
NB: lo schienale è reversibile e può essere posizionato sia sul lato destro che sul lato sinistro della panca da doccia, per meglio adattarsi alle esigenze dell'utente.
3. Installare il supporto laterale attraverso i due tubi a fissaggio rapido presenti sul telaio della panca e bloccando all'interno dei fori i pulsanti con molla.
4. Installare le gambe della sedia da doccia (dotate di ventose che consentono di ancorare la panca al pavimento o al piatto doccia) bloccandole in sicurezza attraverso i fori di fissaggio inserendo all'interno i pulsanti con molla.



figure 2

