



CE

## SEDIA PER DOCCIA CHIUDIBILE CON BRACCIOLI



Via G. Balla, 4

42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 941078 Fax 0522 946625

E-mail: [info@allmobility.it](mailto:info@allmobility.it) [www.allmobility.it](http://www.allmobility.it)

## Parti della sedia per doccia



1. Schienale
2. Braccioli
3. Seduta
4. Piedi regolabili (in altezza)
5. Bloccaggio della seduta

## Indicazioni per l'uso

L'utilizzo della sedia doccia chiudibile è consigliata a tutti coloro che hanno problemi di funzionalità agli arti e/o malattie che interessano la stabilità (ad esempio, perdita di forza, malattie circolatorie e cardiache).

## Riutilizzo

È possibile utilizzare il prodotto successivamente al primo acquirente. Per utilizzare il prodotto bisogna assolutamente leggere attentamente questo manuale d'uso.




## Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni
- Prima di utilizzare la sedia, controllare tutti i componenti per eventuali danni e controllare la stabilità della seduta.
- Mentre ci si alza, ci si siede o si è semplicemente seduti sulla sedia fare attenzione alla seduta che potrebbe pizzicare parti del corpo o rovinare i vestiti.
- La stabilità della sedia doccia è nettamente inferiore rispetto ad una sedia normale. Per evitare danni di qualsiasi genere la sedia è utilizzabile da persone che non superano i 130 kg (portata massima).

## Materiale all'interno della confezione

- Sedia per doccia chiudibile con braccioli (sedia chiusa)
- Manuale d'uso

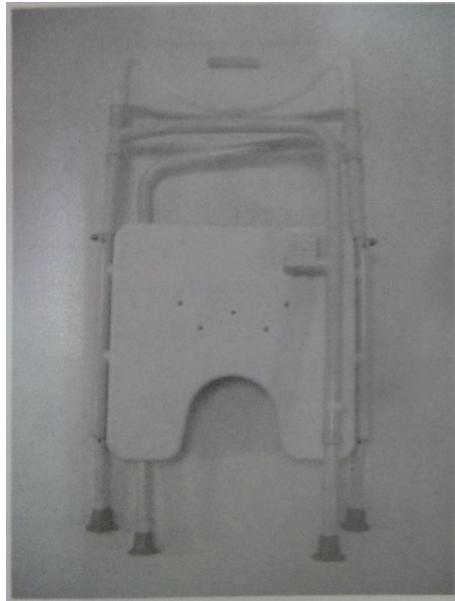

## Montaggio

La sedia doccia è pre-assemblata. Lo schienale deve essere solo bloccato mentre i 4 piedi devono essere montati (vedi capitolo successivo).

Eseguiti questi passaggi (vedi anche la figura) bisogna mettere il sedile.



Posizionare le gambe della sedia per doccia in avanti e appoggiare la seduta sulle clip di bloccaggio come raffigurato nella figura 1.



Una volta posizionato il sedile sulle clip di bloccaggio, premere sul sedile con forza fino a quando non si sente il suono delle clip di destra e sinistra (il sedile ora è bloccato – figura 2).



Verificare il corretto posizionamento del sedile nelle clip di bloccaggio (figura 3)



### **Regolazione dell'altezza dei piedi**

Per poter regolare l'altezza della sedia per doccia bisogna schiacciare i 4 perni posizionati sui piedi della sedia. Dopo averli schiacciati la sedia può essere spostata in alto o in basso a seconda dell'altezza desiderata (5 altezze diverse).

### **Pulizia, disinfezione e manutenzione**

Pulire regolarmente con un panno umido e con i normali detergenti utilizzati in casa. Utilizzare disinfettanti a spruzzo. Non usare nessun tipo di detergente aggressivo. Le viti devono essere controllate regolarmente e, se necessario, stringerle nuovamente.

### **Dati tecnici e dimensioni**

LARGHEZZA	510 mm
ALTEZZA DELLO SCHIENALE	480 mm
ALTEZZA	960 – 1040 mm
PROFONDITA' DELLA SEDUTA	430 mm
PROFONDITA' COMPLETA	450 mm
ALTEZZA DELLA SEDUTA	450 – 530 mm
LARGHEZZA DELLA SEDUTA	410 mm
REGOLAZIONE DEI PIEDI	5 altezze possibili
PESO	3,4 kg
PORTATA	130
MATERIALE DEL TELAIO	Tubo di alluminio, verniciato a polvere
MATERIALE DELLA SEDUTA E DELLO SCHIENALE	Polietilene ad alta densità molecolare

### **Garanzia**

Garanzia assicurata di 24 mesi dalla data di acquisto. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori ed omissioni.



Via G. Balla, 4

42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 941078 Fax 0522 946625

E-mail: [info@allmobility.it](mailto:info@allmobility.it) [www.allmobility.it](http://www.allmobility.it)