

Egregio Cliente, ci congratuliamo e La ringraziamo per aver scelto questo prodotto. Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale: esso fornisce informazioni, consigli e avvertenze dirette all'utilizzo di questo ausilio. Conservi questo manuale con cura.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



All Mobility trading s.r.l. dichiara sotto la propria unica responsabilità, che il dispositivo medico:

### TRAVEL CHAIR

è conforme alle disposizioni della direttiva 93/42/CE e successive modifiche, e alle disposizioni nazionali di attuazione.



## 1. Campo di applicazione

Il prodotto è stata progettato e studiato per l'impiego da parte di persone con capacità motoria ridotta. Esso deve essere utilizzato esclusivamente per questo scopo: ogni altro uso è da considerarsi improprio. I costruttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

## 2. Caratteristiche tecniche

Lunghezza totale	Larghezza totale	Larghezza seduta	Profondità seduta	Altezza	Peso	Peso max. utilizzatore
Chiusa 28 cm Aperta 78cm	Chiusa 61 cm Aperta 61 cm	40 cm	36 cm	Chiusa 66 cm Aperta 88cm	8,5 kg	90 Kg
<b>Materiale ALLUMINIO</b>						

## 3. Avvertenze di sicurezza



**Il carico massimo consentito per garantire la necessaria sicurezza è di 90 Kg.**

## 4. Garanzia

Questo Ausilio è garantito 18 mesi su qualsiasi difetto di produzione, materiale, saldature ecc. esclusi i danni causati da usura, manomissioni od uso improprio.

Per l'intervento in garanzia il dispositivo dovrà essere consegnato presso un rivenditore autorizzato unitamente alla relativa ricevuta fiscale o fattura di vendita, ed alla presente garanzia.

## 5. APERTURA DELLA TRAVEL CHAIR



1. Travel chair chiusa



2. Aprire la chiusura in velcro presente sul lato sinistro



3. Sollevare lo schienale dal basso verso l'alto



4. Spingere verso il basso la seduta per permettere l'apertura della Travel chair, spingere pertanto alla base dello schienale (punto indicato dalla freccia) e poi tra lo schienale e la seduta (dove è collocata la mano in foto)



5. Verificare che l'apertura dello schienale sia totale quindi bloccare lo schienale con l'apposito fermo

6. Si prega di verificare che lo schienale e la seduta siano fissate in sicurezza, pertanto prestare attenzione ai punti 5 e 7



7. Completata l'apertura della carrozzina bloccare in sicurezza il telaio ruote attraverso l'apposito pomello (indicato in figura)



8. Tirare verso l'esterno il pomello e spingerlo verso il basso fino al termine della guida poi rilasciarlo, completando questa operazione il telaio basso sarà fissato nella posizione aperta



9. Spingere verso il basso i braccioli al lato dello schienale



10. Bloccare in sicurezza i braccioli grazie all'apposito fermo da spingere verso il basso



11. Spingere verso il basso la pedana poggipiedi



12. La carrozzina Travel chair è pronta per l'uso