


- ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE -

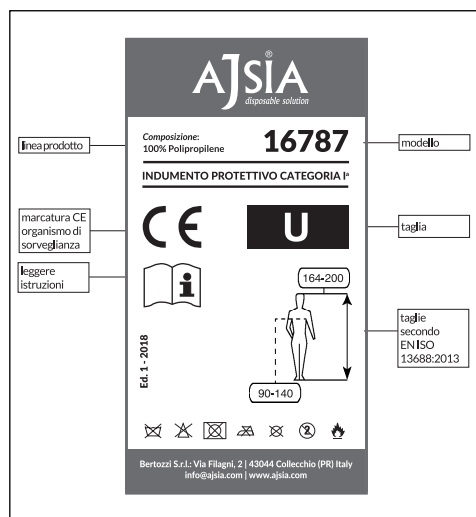

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni causati da uso improprio del DPI o in disaccordo con i contenuti delle presenti istruzioni.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Cuffia rotonda in PLP con elastico. Colore bianco (16787), azzurro (16788), verde (16789), rosso (14537), giallo (14538).

IMPIEGO

Gli indumenti possono essere abbinati con eventuali dispositivi di protezione previsti per i casi specifici.

MODALITA' DI INDOSSO

Togliere l'indumento dalla confezione, infilare la testa ed indossarlo facendo in modo di non lacerare il tessuto.

NB: Le caratteristiche di protezione sono valide solo se

l'indumento è correttamente indossato, Bertozzi Srl non si assume alcuna responsabilità per uso improprio degli indumenti.

AVVERTENZE

Verificare che la taglia sia corrispondente alla persona che indossa il capo. Non effettuare modifiche al capo. Controllare che il capo sia integro ed esente da difetti (fori, scuciture, ...). L'indumento monouso deve essere sostituito dopo ogni intervento. Abbandonare subito la zona di lavoro in caso di strappi o scuciture dell'indumento. L'indumento di protezione non deve essere aperto o rimosso in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante l'uso di sostanze infiammabili o esplosive.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se non contaminato può essere equiparato a un rifiuto urbano. Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore.

DURATA

Si consiglia l'utilizzo entro 5 anni dalla data di produzione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il dispositivo è classificato in I[^] Cat. Marcatura CE rispondente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425

TAGLIA	CIRC. TORACE	ALTEZZA
S	86 - 94	164 - 172
M	94 - 102	172 - 180
L	102 - 110	180 - 188
XL	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 126	196 - 204
XXXL	126 - 134	204 - 212

Nota informativa REF. 16787 ED. 1 Rev. 03_Dicembre 2019

La Dichiarazione di conformità UE è scaricabile dal sito www.ajsia.com alla sezione download della pagina del prodotto.