

KIT KOMETA ME 600

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME600 – completo di compressore ME700 con regolatore di flusso e materassino ad elementi intercambiabili **cm 12 H** completo di rivestimento bielastico impermeabile, traspirante.

CODICE ISO: 04.33.06.018

CODICE CND: Y033399

Repertorio DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. **615948/R**

Cod. Prodotto: 855762

DESCRIZIONE

Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione, favorisce un massaggio continuo – alternato al paziente allettato, favorendo una riduzione della pressione ed una buona circolazione dell'aria.

Costituito da tubolari trasversali, mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo, anche nella fase di massimo gonfiaggio dei tubolari.

Tutti gli elementi (tubolari) sono collegati ad un compressore in grado di assicurarne il gonfiaggio di alcuni ed il contestuale sgonfiaggio di altri, in modo regolare, alternato, della durata di ca. 10 minuti, e programmabile in relazione al peso dell'utilizzatore, grazie al compressore munito di regolazione del sistema di gonfiaggio.

Il materasso è dotato di due flaps (testa – piedi) che vanno rimboccati sotto il materasso.

La dimensione dei tubolari del materasso è di **12 cm H (gonfiato)**.

Il materasso viene fornito completo di un rivestimento bielastico impermeabile, traspirante, fire retardant.



Compressore Kometa ME700 cod. 855782

- **Tensione e frequenza:** 230 V / 50 Hz.
- **Potenza assorbita :** < 10W
- **Aria in uscita:** 6 lt
- **Ciclo:** 10 minuti ca.
- **Range pressione:** 40 – 110 mmHg (Nr. 10 possibilità di regolazione, secondo peso paziente)
- **Peso apparecchio:** Kg 1,2
- **Rumorosità:** < 30 dB
- **Cavo di alimentazione:** si (3 m)
- **Dimensioni:** cm 10,5 x 22,5 x 10 ca.
- Velocità di sgonfiaggio inferiore a 30 secondi
- Allarme acustico in caso di malfunzionamento e/o gonfiaggio insufficiente

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Materasso Kometa ME600 a tubi intercambiabili cod. 855766

- **Materiale** : In Nylon e TPU termo-saldato, con trattamento antibatterico, atossico
- **Dimensioni**: cm 200 x 90 x **12 cm H** gonfiato
- **Portata massima**: Kg 130
- **Numero elementi**: 18

Rivestimento per materassino a tubi intercambiabili cod. 855768

- **Materiale**: Nylon/PVC impermeabile – traspirante – fire retardant

DISINFEZIONE - LAVAGGIO

Disinfettare asciugando la superficie con un detergente delicato o una soluzione di ipoclorito
In lavatrice a 95°C e asciugare fino a 95°C (riferito solo alla fodera)

Non usare candeggina, detersivi abrasivi aggressivi o fenolo

Non usare ferro da stiro, non torcere o strizzare

In caso di lavaggio a secco, non utilizzare soluzione di percloroetano

CONFORMITA':

Marchio CE - Conforme alla direttiva MDD (Medical Device Directive) 93/42/EEC – 14 Giugno 1993, DL. 46 del 24/02/1997 e modificato secondo direttiva 2007/47/EC. Il prodotto rientra tra quelli della CLASSE I, non invasivi.

Rispettano le seguenti normative Europee armonizzate:

EN 12182:2012 – EN 60601-1-2 - EN 61000-3-2 - EN61000-3-3: 2008

10/19

