

CL8-100



CL8-200



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico toglie ogni responsabilità al fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. creme in caso di applicazioni asettate il tempo di completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO


DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

INDICAZIONI: caviglia dolorosa; versamento intrarticolare tibio tarsico; instabilità acute e croniche di caviglia; esito protesti caviglia; recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica; tendinopatie.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire tutte le chiusure a strappo, calzare il tutore (fig. 1).
2. Chiudere la chiusura posteriore (fig. 2).
3. Tendere il tirante elastico mediale, portarlo sul lato opposto del tutore e infine chiuderlo sulla zona di ancoraggio (fig. 3).
4. Per posizionare l'altro tirante elastico laterale, portarlo sul lato opposto del tutore e infine chiuderlo sulla zona di ancoraggio (fig. 4).

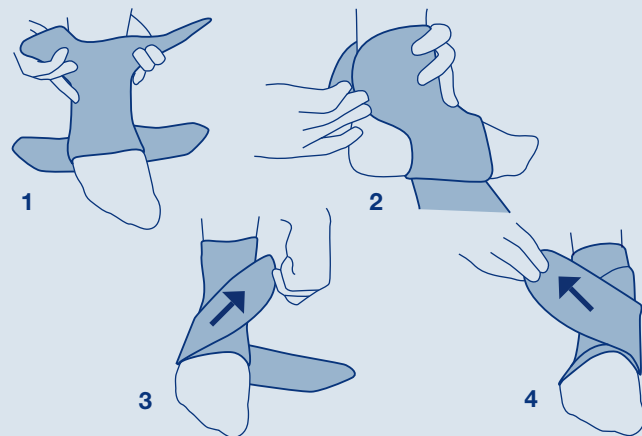

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata posteriormente

NOTE

- disponibile in colore nero e skin

Codice d'ordine: **CL8-100 nero**; **CL8-200 skin**






MISURE

Taglie Ø Collo del piede

S	24–28 cm
M	28–33 cm
L	33–38 cm



MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni e quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta FGP Srl indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare una e-mail a fgp@fgpsrl.it. - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.