

- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Utilizzare su pelle sana

AVVERTENZE D'USO

Al momento nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

• trattamento del piede ciondolante

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 7 - 04/20




FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

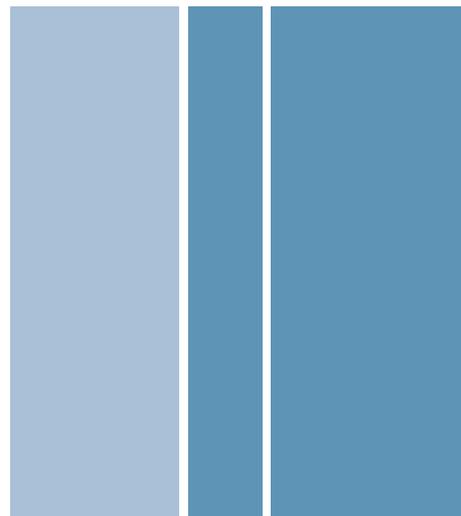


CVO-400

Tutore per caviglia e piede ciondolante

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Calzare il tutore seguendo l'esempio della figura 1 rispettando il modello destro/sinistro.
2. Successivamente stringere su se stessa l'imbottitura presente sul polpaccio (fig. 2).
3. Far passare il cinturino con chiusura a strappo attraverso la fibbia (fig. 3) e chiudere definitivamente come in (fig. 4).

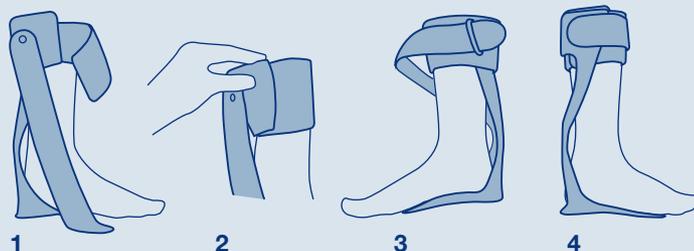

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

- Inserire l'ortesi nella scarpa.
- Calzare la scarpa con l'ortesi inserita.
- Stingere su se stessa l'imbottitura del polpaccio
- Chiudere il cinturino a strappo del polpaccio.

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Se necessario, è possibile ritagliare la sezione del piede, come desiderato, in modo da adattare l'ortesi alla scarpa e al piede. Fare attenzione arrotondare gli eventuali spigoli creati.

STRUTTURA

- in polietilene flessibile con imbottitura sul polpaccio

CHIUSURA

- a strappo mediante cinturino

NOTA

- il materiale può essere ritagliato a misura e modellato

MISURE (DX/SX)

Uomo - Altezza 34 cm

Donna - Altezza 31 cm

Codice d'ordine: CVO-400

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.