

AVVERTENZE D'USO



- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 Kg

Non usare dopo o durante l'edema.

Fratture tibiali prossimali e fibulari instabili.

CONTROINDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone,
- fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc,
- di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

INDICAZIONI



CVO 720 BOOTY® SHORT



CVO 750 BOOTY®



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev.7 - 04/20

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



CVO 750 BOOTY®
CVO 720 BOOTY® SHORT

Tutore walker per tibio-tarsica fisso a 0°


PER IL TECNICO ORTOPEDICO

ISTRUZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE

1. Aprire tutti i nastri a strappo delle cinghie (fig. 1).
2. Staccare lo stivaletto dalla base e aprire la chiusura frontale dello stivaletto. Chiedere al paziente di inserire il piede e il polpaccio nello stivaletto (fig. 2).
3. Chiudere la chiusura frontale dello stivaletto (fig. 3).
4. Chiedere al paziente di posizionare il piede nella base del tutore tra le due stecche. Il piede va posizionato in modo tale che le due aste siano centrate sulla linea mediana della gamba (fig. 4).
5. In dotazione ci sono dei comodi cuscinetti in materiale espanso che possono essere posizionati per aumentare il comfort oppure rimossi per aumentare l'ampiezza mediolaterale tra le aste. Togliere le protezioni in plastica dalle aste così il nastro a strappo all'interno delle aste aderirà allo stivaletto.
6. Chiudere i nastri a strappo del piede e successivamente chiudere i cinturini della gamba, procedendo dal basso verso l'alto.

Chiedere al paziente di camminare con l'ortesi per accertarsi che essa sia stata applicata e funzioni correttamente.

⚠ La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

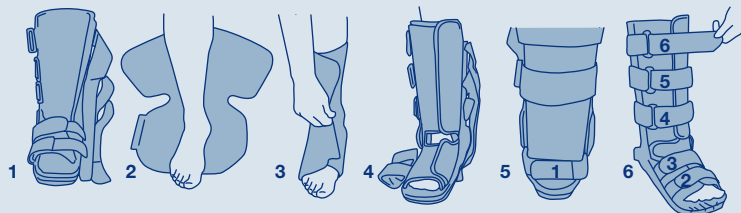

⚠ CONSIGLI PER IL PAZIENTE

Se al paziente è consentito rimuovere l'ortesi durante la convalescenza, o se l'ortesi viene rimossa durante una visita medica, è possibile togliere l'ortesi semplicemente aprendo le cinghie e la chiusura frontale dello stivaletto. In tal modo, il paziente potrà riapplicare lo stivaletto e l'ortesi con l'adeguato allineamento della gamba.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio (per CVO-750)
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio (per CVO-720)

Se è necessario irrigidire ulteriormente il tutore e posizionare le due plastiche incluse nella confezione come segue:

Plastica sottile: posizionare sull'imbottitura, nella zona tibiale.

Plastica spessa: posizionare sull'imbottitura, nella zona del polpaccio, con la parte larga verso l'alto.

Utilizzo del tris d'imbottiture: nei pazienti con gambe molto sottili, per recuperare lo spazio rimanente tra gamba e tutore, sotto la cintura, nella dimensione più adatta per migliorare il comfort.

MISURE (ambidestro)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza CVO-750
S	32-38	39 cm
M	38-43	42 cm
L	43-48	44 cm






Altezza CVO-720: 35 cm



Codice d'ordine:

CVO-750 normale; CVO-720 short

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgpr@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.