MANUTENZIONE

SIGNIFICATO	SIMBOLO
Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente	
Non candeggiare	\overline{X}
Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo	Ø
Strare over stirate	\bowtie
Mon lavare a secco	\bowtie





da tonti di calore

non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere zione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Smaltimento: femperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposi-CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a

smaltito con i rifiuti domestici.

relazionabili al MD, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente. di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, a fgp@fgpsrl.it. - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso FGP Srl indicandone i motivi al numero di teletono 045 8600867 oppure inviare una e-mail curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute







nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore. DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante

epitisari; post operatorio di fratture di radio e ulna distali (nel caso di DTX-04K). ed estensori; esiti fratture del polso; esiti fratture legno verde; esiti distacchi INDICAZIONI: traumi distorsivi moderati e severi del polso; tendiniti flessori

secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione,

ortopedico, non dà luogo a controindicazioni.

pressione locale o la compressione di nervi e vasi sanguigni. CONSIGELI D'USO: non stringere in modo eccessivo per non generare

OSU'G BYNERTENZE D'USO

Utilizzare su cute integra. Utilizzare sotto la supervisione dei genitori o adulti

La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico. Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche. Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.

dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo La modifica/alferazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante. Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata

sul MD in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto. e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide. Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico

necessario al loro completo assorbimento). Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con attri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo

STECCATURA

palmare in alluminio modellabile

rinforzi laterali in polietilene

ARUTTURTS

morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno

completamente apribile

CHIUSURA

ulteriore tascia sul polso per una maggiore stabilità il materiale in eccesso mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando

dell'articolazione

NOTE

DT3-03 (nel caso di DTX-03K) o DTX-06 (nel caso di DTX-04K). Per circonferenza polso superiore a taglia 4º vedere prodotto codice








ISTRUZIONI D'USO

- 1. Sganciare tutti i nastri a strappo e inserire la mano nel tutore facendo passare il pollice attraverso l'apertura.
- 2. Le chiusure dei nastri a strappo si troveranno nella parte superiore del polso.
- 3. Il palmo deve aderire perfettamente alla stecca in alluminio precedentemente modellata.
- 4. Chiudere i nastri a strappo rispettando la sequenza indicata.
- 5. Chiudere infine il nastro 5 per ottenere così una migliore aderenza del tutore.
- 6. Per rimuovere il supporto aprire tutti i nastri a strappo.

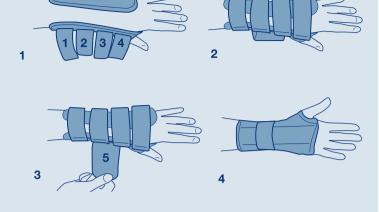

PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Estrarre la stecca modellabile, adattarla al paziente e quindi reinserirla.

Se necessario, accorciare opportunamente la lunghezza dei nastri.

MANUTENZIONE

Togliere la stecca palmare e chiudere i nastri a strappo prima del lavaggio.

DTX-03K

POLSIERA STECCATA PEDIATRICA

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	h
1°	10-11 cm	13 cm
2°	11-13 cm	14 cm
3°	13,5-14,5 cm	15 cm
4°	oltre 15 cm	16 cm



Codice d'ordine: DTX-03 K

DTX-04K

POLSIERA STECCATA PEDIATRICA LUNGA

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	h
1°	10-11 cm	16 cm
2°	11-13 cm	18 cm
3°	13,5-14,5 cm	20 cm
4°	oltre 15 cm	22 cm



Codice d'ordine: DTX-04 K