

## AVVERTENZE D'USO

- Utilizzare su pelle sana
  - Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Al momento nessuna nota.  
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

### CONTROINDICAZIONI

- trattamento delle contratture muscolari del polpaccio (FFP-200)
- coadiuvante nel trattamento degli stramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

### POLPACCIERA

- trattamento delle contratture muscolari della coscia (FFC-100)
- coadiuvante nel trattamento degli stramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

### COSCIALE

### INDICAZIONI



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment




AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 04/20

FGP srl  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

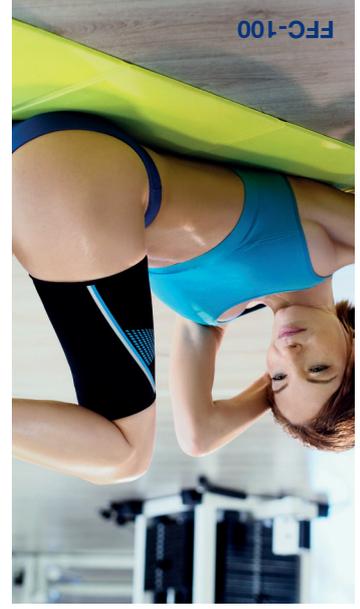

FFC-100



FFP-200

**FULLFIT®**  
FFC-100, FFP-200

Supporti per coscia e polpaccio

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicando i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it). L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.

### NOTA

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.

Conservare in ambiente secco da fonti di calore

### CONSERVAZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non strare
	Non lavare a secco

### MANUTENZIONE

Dal tessuto **FullFit®** nasce oggi l'innovativa gamma di supporti elastici ideata e realizzata da FGP per il benessere dei fasci muscolari e l'ottimizzazione delle prestazioni sportive. La leggerezza dei materiali, le cuciture piatte e le dimensioni contenute donano ai prodotti una grande vestibilità. Dal design, ai materiali, alle soluzioni tecniche, alle scelte tecnologiche, la gamma è frutto della ricerca e dell'innovazione FGP, dedicata a chi vive il movimento come un'occasione per rinnovare il benessere, ritrovare equilibrio mentale, esprimere se stesso con l'attività fisica.

### DESCRIZIONE

- Il piacere del movimento garantito in ogni momento;
- Il design essenziale dona discrezione
- le cuciture piatte ed elastiche aumentano il comfort
- il tessuto sottile offre vestibilità

# COSCIALE FFC-100



## STRUTTURA

- soft in tessuto Double-Layer FGP FullFit®.
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

## NOTE

Il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio della pelle. Gli ioni d'argento al suo interno aiutano a ridurre la flora batterica in eccesso, causa principale dei cattivi odori sul dispositivo.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare e posizionare il tutore sulla coscia fino alla zona inguinale interna, come da immagine.

**Codice d'ordine:** FFC-100

## MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	40-45 cm
S	45-50 cm
M	50-56 cm
L	56-62 cm
XL	62-68 cm



**Altezza anteriore** 23 cm

# POLPACCERA FFP-200



## STRUTTURA

- soft in tessuto Double-Layer FGP FullFit® anatomica.

## NOTE

Il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio della pelle. Gli ioni d'argento al suo interno aiutano a ridurre la flora batterica in eccesso, causa principale dei cattivi odori sul dispositivo.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare il tutore sulla gamba fin sotto alla zona rotulea, a totale protezione del polpaccio, come da immagine.

**Codice d'ordine:** FFP-200

## MISURE

Taglie	Ø Polpaccio
S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-44 cm
XL	44-48 cm



**Altezza posteriore** 29 cm