



- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico toglie ogni responsabilità al fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri **MD** (p.es. creme in caso di applicazioni aspettate il tempo di completo assorbimento).

AVVERTENZE D'USO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

INDICAZIONI: rizoartrosi; tendinopatie del pollice; distorsioni metacarpo-falangee.

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 5 - 05/21

 FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP


Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FINGER CAP

Tutore morbido per pollice

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore come se fosse un guanto inserendo il pollice nell'apposita sede (fig. 1).
2. Chiudere il tutore all'altezza del polso mediante l'apposita chiusura a strappo (fig. 2).
3. Ruotare il cinturino sul polso verso destra o verso sinistra, per il raggiungimento della posizione ottimale, fino ad avvertire sollievo dal dolore (fig. 3).

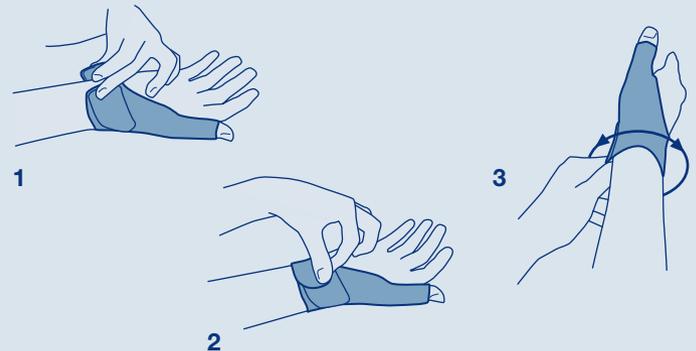

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con silicone interno

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Polso

S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine
FIN-101

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. **Smaltimento: non disperdere nell'ambiente. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni e quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta FGP Srl indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare una e-mail a fgp@fgpsrl.it. - L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.