

- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato
- Utilizzare su pelle sana



Al momento, nessuna nota.
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

CONTROINDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lievi distorsioni di ginocchio
- idratro o ematro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borste sovrarotulea

INDICAZIONI



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 04/20




FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
[facebook.com/fgpsrl](https://www.facebook.com/fgpsrl)



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

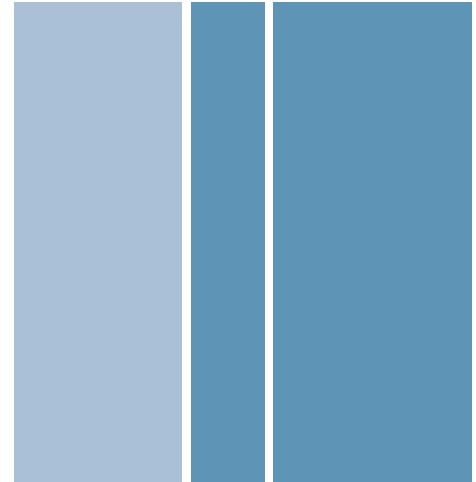


FILAMED® 501

Ginocchiera in neoprene
con stabilizzatore laterale a "J"

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sganciare i nastri a strappo A - B e indossare la ginocchiera. Portare in posizione di lavoro l'ortesi in modo che il foro di centraggio rotuleo sia posizionato esattamente sulla rotula.
2. Tirare verso l'alto il nastro a strappo A e chiudere, tirare in basso il nastro a strappo B e chiudere. Posizionare le fasce in modo tale che si avverta una sensazione di compressione, ma non di disagio.

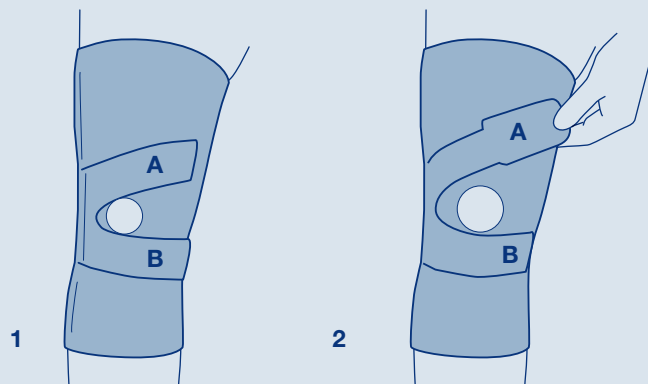

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e fascia a Y per la trazione rotulea

SNODO/ASTE

- stecche a spirale mediali e laterali
- disponibile su richiesta J superiore o J inferiore

STABILIZZATORE ROTULEO

- in gomma tubolare a forma di J posizionata lateralmente e tensionabile con due fasce a Y in neoprene a strappo

CHIUSURA

- nessuna

Disponibile su richiesta J superiore o J inferiore

Codice d'ordine: FILAMED 501 "J"

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm



ALTEZZA
32 cm

MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.