



- INDICAZIONI**
- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
  - trattamento conservativo lussazioni acromion claveari

**CONTROINDICAZIONI**  
 Al momento, nessuna nota.  
 La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni!

⚠ **Si consiglia di non utilizzare il dispositivo a diretto contatto con la pelle.**



AZIENDA CERTIFICATA  
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 4 - 02/20


FGP srl  
 Via Alessandro Volta 3  
 I-37062 Dossobuono VR  
 T +39 0458600867  
 F +39 0458600835  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it) - [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
 [facebook.com/fgpsrl](https://facebook.com/fgpsrl)



Orthopedic  
 & Rehabilitation  
 Equipment



Orthopedic  
 & Rehabilitation  
 Equipment

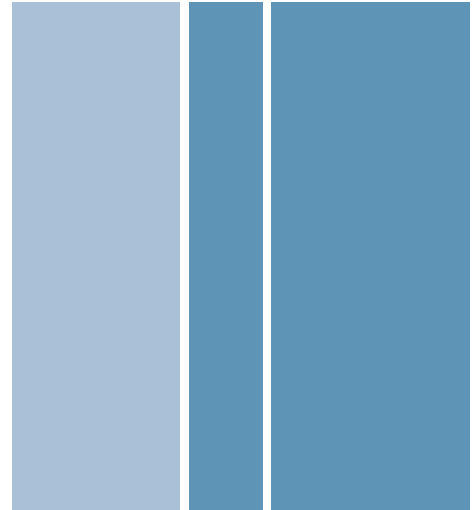

**RDS-200 CLAVIO®**

Immobilizzatore clavicolare


# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sganciare uno dei due nastri a strappo superiori, destro o sinistro. Posizionare l'immobilizzatore nella zona interscapolare. Far passare il tirante A nella zona ascellare e infilarlo nella fibbia, quindi rigirarlo su se stesso facendo aderire la zona a strappo (fig. 1).
2. Mantenendo in posizione l'immobilizzatore portare i tiranti A e B alla tensione desiderata (fig. 2).

## AVVERTENZA

La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

⚠ Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

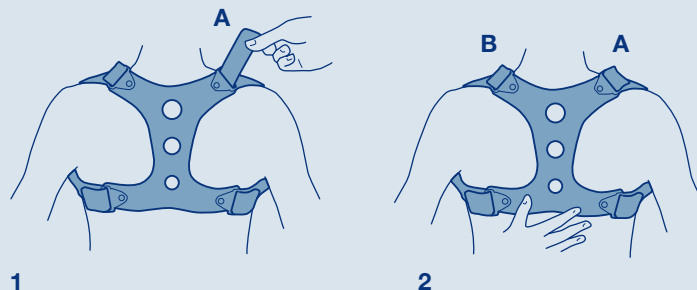

## STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore termosaldada realizzata in materiale traspirante alveolare a contatto con la pelle e vellutino nella parte esterna
- i cinghiaggi delle spalle sono realizzati in monospugna all'interno e vellutino all'esterno con tubolari di protezione e agganciati con fibbie alla struttura posteriore

## MISURE

Taglie      Ø Torace

S	65-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-120 cm



Codice d'ordine: RDS-200

## MANUTENZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. Non disperdere nell'ambiente.



## NOTA

Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l'utilizzo solamente dietro consultazione del tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. Per ogni problema nato dopo l'uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P indicandone i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente.