

PRESSOTERAPIA

Procedura bracciali



STEP 1



STEP 2



STEP 3

- Step 1. Chiudere il sostegno ad X sul petto
- Step 2. Chiudere il bracciale facendo attenzione che il sostegno nero aderisca bene sul velcro interno
- Step 3. Chiudere completamente il bracciale
- Step 4. Ripetere i punto 2 - 3 - 4 per l'altro braccio

PRESSOTERAPIA

Posizionamento gambali e addome



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4

- Step 1.** Posizionare i gambali e LA VENTRIERA aperti sul lettino. Inserire il piede nello stivale.
- Step 2.** Chiudere il gambale posizionando la prolunga sull'inguine.
- Step 3.** Ripetere il punto 2 per l'altra gamba.
- Step 4.** Chiudere la ventriera intorno all'addome, assicurandosi che il velcro interno sia a contatto con la prolunga posizionata sull'inguine.