


AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Intermed srl non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE E INDICAZIONI

Il kit antidecubito Libra II Plus (compressore e sovra-materasso) è indicato per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

FUNZIONI DEL PRODOTTO

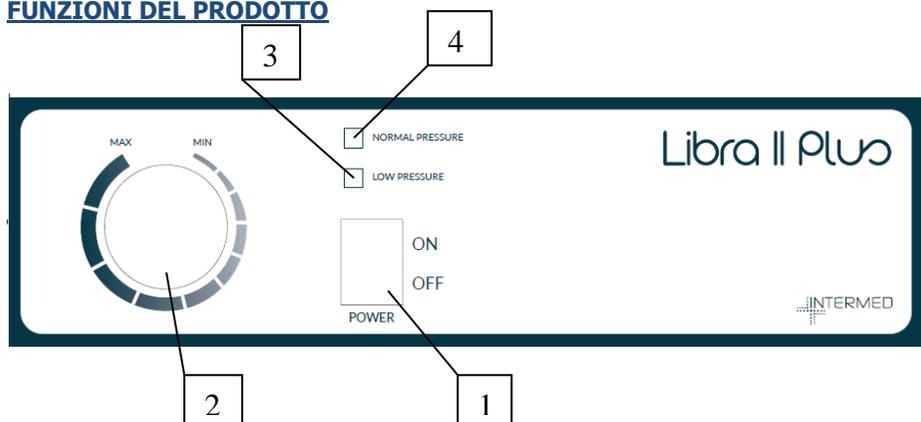

Tasto di accensione (1) [Power]

- Premendo il tasto ON/OFF e il pulsante di alimentazione sul pannello, il compressore si avvia o si arresta.

Regolatore della pressione di lavoro (2)

- Ruotare il regolatore per impostare il livello di pressione desiderato.

Indicatore bassa pressione (3)

- Un indicatore rosso avverte quando il valore di pressione risulta essere al di sotto del livello impostato.

Indicatore guasto alimentazione (4)

- Un indicatore rosso avverte quando il compressore non è alimentato.

MODALITA' D'IMPIEGO

1. Posizionare il compressore su un piano orizzontale o ancorato al letto.
2. Aprire il materasso sul letto e fissarlo allo stesso con i lembi (flaps) dedicati.
3. Collegare i tubi di ingresso aria al compressore, assicurandosi che gli stessi non siano attorcigliati.
4. Collegare il compressore a una fonte di alimentazione elettrica adatta e accendere. L'indicatore dell'interruttore dovrebbe ora illuminarsi.
5. Attendere 20 minuti affinché il materasso sia completamente gonfio.
6. Coprire con un lenzuolo adatto.
7. Utilizzare la manopola per regolare la pressione e garantire il massimo comfort del paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore - Codice: AK-806PC	Materasso - Codice: AK-806M
Tensione di alimentazione: 220 V - 50 Hz, 1 A	Dimensioni: 190 x 88 x 11 cm
Portata d'aria: 8 litri al minuto	Fodera: Nylon/PU con bottoni
Pressione: 40-100 mmHg	Elementi: Nylon/PVC
Ciclo lavoro: 12 minuti	Base: Nylon/PVC
Allarme: bassa pressione	Connettori rapidi
Potenza assorbita: 7W	18 elementi
Luce normale/bassa pressione	Portata massima 130 kg
Dimensioni: 28 x 15 x 9 cm	Tubi a 2 vie
Peso: 1,4 kg	

PULIZIA DEL MATERASSO

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Dispositivo non autoclavabile.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

Coupon da completare da parte dell'acquirente

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Codice postale:

Città: Tel.....

Coupon da compilare da parte del rivenditore

Prodotto:

Data di acquisto:

Tombro del rivenditore


Da inviare con lo strumento reso per la riparazione.



ISTRUZIONI PER L'USO

Revisione 02, 19 giugno 2019

KIT ANTIDECUBITO LIBRA II PLUS COMPRESSORE CON REGOLATORE E SOVRA-MATERASSO A ELEMENTI INTERCAMBIABILI AK-806P

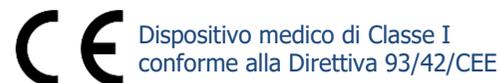

Made in China



via Ludovico d'Aragona, 11 - 20132 - Milano (MI) Italy
Tel. +39 02 98 24 80 16 - Fax +39 02 98 24 73 61
www.intermeditalia.it - info@intermeditalia.it