

## Misurazione delle dita con EasyAngle

Con EasyAngle è semplice eseguire precise misurazioni delle piccole articolazioni del corpo, come ad esempio le dita. L'accorgimento consiste nell'utilizzare la linea nera sulla barra di allineamento come mostrato sotto.

Per prima cosa, assicuratevi che il paziente sia in una posizione comoda per la misurazione e usate la vostra mano libera per stabilizzare o sostenere il paziente. Eseguite poi la misurazione come mostrato qui sotto.



**Flessione metacarpo falangea**



**Estensione metacarpo falangea**



**Flessione interfalangea prossimale**



**Abduzione interfalangea prossimale**



Distributore esclusivo per l'Italia:

**Chinesport spa** • Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy • [www.chinesport.it](http://www.chinesport.it)  
Tel. +39 0432 621 621 • Fax +39 0432 621 620 • [chinesport@chinesport.it](mailto:chinesport@chinesport.it)