

PACKAGING



CONFEZIONE SINGOLA

- 1 Practi-Man Advance
- 1 Manuale e FAQ
- 5 Polmoni
- 2 Valvole
- 1 Borsa di trasporto



MULTI PACK

- 4 Practi-Man Advance
- 4 Manuale e FAQ
- 20 Polmoni
- 8 Valvole
- 1 Borsa di trasporto per 4 unità

CERTIFICATO DI GARANZIA



Questo prodotto ha passato con successo i più rigorosi controlli di qualità prima di lasciare la fabbrica. Ad ogni modo, in caso di malfunzionamenti dovuti all'assemblaggio o ai componenti, leggere le condizioni di garanzia e contattare il distributore autorizzato più vicino.

ENFAVI, S.L. garantisce questo prodotto come privo di difetti nei materiali o di produzione dalla data di fatturazione per una durata di due anni.

Se durante il periodo di garanzia, si presentasse un difetto attribuibile ai processi di produzione o dei materiali, il cliente dovrà informare il distributore ufficiale entro dieci giorni dalla prima comparsa del difetto, e, a discrezione del distributore ufficiale, il prodotto verrà riparato o sostituito.

CONDIZIONI DI GARANZIA:

Dettagli e Documentazione: E' necessaria una copia della fattura d'acquisto per usufruire della garanzia. Oltre alle specifiche del prodotto acquistato la fattura DEVE contenere anche il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Esclusioni:

- Questa garanzia esclude specificatamente:
- Dannie/o difetti del prodotto risultanti da uso scorretto, negligenza dell'utilizzatore, incluso l'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
 - Dannie/o difetti causati dall'uso di agenti esterni quali lime o altri agenti chimici corrosive.
 - Dannie/o difetti dovuti alla manutenzione impropria o alla mancata pulizia.
 - Dannie/o difetti dovuti all'utilizzo parti non originali del manichino.

Copertura geografica: La garanzia è estesa a tutti i paesi in cui questo prodotto è venduto da un distributore, ENFAVI, S.L. o autorizzato da ENFAVI, S.L.

Cancellazione della garanzia:

- La garanzia del prodotto è cancellata:
- In caso di danni causati da riparazioni eseguite da personale diverso da quello autorizzato dagli agenti della ENFAVI S.L. e/o se sono state utilizzate parti o accessori non originali o non prodotti da ENFAVI S.L.
 - Cambiando la data sulla fattura, ricevuta di vendita o imballaggio.


CPR MANIKIN PRACTI-MAN Advance

CARATTERISTICHE E FUNZIONI PRINCIPALI



➤ SIMULATORE 2 IN 1

Simulatore pediatrico e adulto in un solo prodotto.

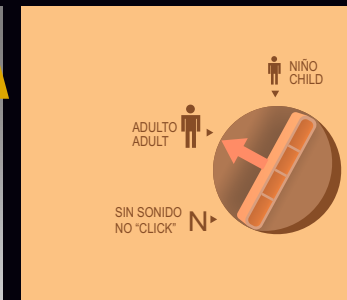

➤ ESCLUSIVO SELETTORE A 3 POSIZIONI

Adulto, bambino e posizione test (no click)



➤ FUNZIONE RESPIRAZIONE: SISTEMA REALISTICO

Sistema respiratorio esclusivo, che comprende un naso realmente funzionante.



➤ IPERESTENSIONE DELLE VIE AEREE



➤ FORMAZIONE DAE

L'utilizzo di elettrodi non lascia residui sulla pelle.



➤ ULTRA-IGIENICO

Aiuta a prevenire la contaminazione incrociata durante la pratica.

COME MONTARE IL PRACTI-MAN ADVANCE



1 Rimuovere la copertura del torace.



2 Rimuovere la copertura del volto.



3 Assicurarsi che la testa sia correttamente attaccata ai due apposite agganci sul torso.




4 Far passare il polmone sotto la mascella.



5 Collegare la valvola al polmone.



6 Assicurarsi che la valvola sia correttamente collegata a la testa.

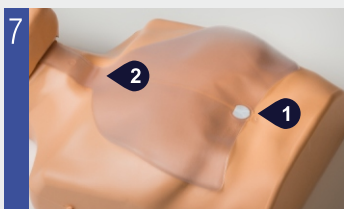

7 Assicurarsi che il polmone:
1. Sia posizionato correttamente come indicato dai segni adesivi.
2. Sia appoggiato morbidamente sul collo.



8 Posizionare la copertura del volto e assicurarsi che il naso, la bocca e che la linguetta superiore combacino correttamente.



9 Posizionare la copertura del torace e fissarla agli appositi ganci.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE



Per garantire le migliori condizioni igieniche, il produttore consiglia di pulire il Practi-Man Advance dopo ogni utilizzo seguendo le istruzioni di seguito riportate:



È necessario pulire il manichino disinfettando le labbra ed il viso, separando la copertura del volto dalla testa dopo ogni esercitazione realizzata dagli alunni.




Per una disinfezione più completa, immergere la copertura del volto in un recipiente che contenga una soluzione disinfettante, pulire accuratamente e mantenerla asciutta per un utilizzo corretto.

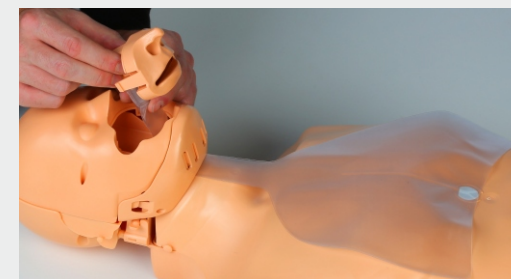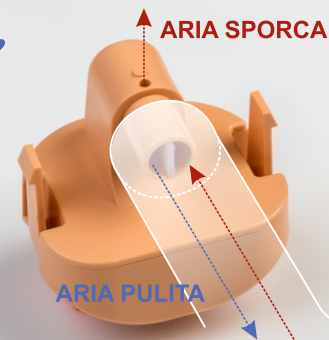

Il polmone del Practi-Man Advance è semi-riutilizzabile ed è adatto per l'esecuzione di una sessione didattica per un gruppo di varie persone senza doverlo cambiare. Se durante l'esercitazione il petto smette di sollevarsi, verificare che il polmone non sia umido, in tal caso, dovrà essere sostituito con uno nuovo.

Dopo ogni utilizzo, la valvola del Practi-Man Advance deve essere disinfettata e lasciata ad asciugare per un funzionamento corretto.

PEZZI DI RICAMBIO DEL PRACTI-MAN ADVANCE

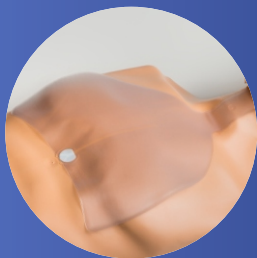

POLMONE
(Ref. SP-001 (AD))



VALVOLA
(Ref. SP-002 (AD))



COPERTURA DEL VOLTO
(Ref. Face-MB (AD))



COPERTURA DEL TORACE
(Ref. Chest-MB)

PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELLA RCP



La protezione durante la formazione viene integrata con l'utilizzo di maschere di respirazione protettive.



Dispenser da 100 unità

Per garantire una pulizia corretta del manichino, utilizzare le salviette disinfettanti.