



GIMA

DISPOSITIVO CRIOCHIRURGICO CRYOCLEAR con cartuccia 16 g

Codice: 30587
Categoria: Crioterapia
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A



EAN13: 0850077006487

Descrizione: CryoClear® con cartuccia 16 g - non ricaricabile

CryoClear® utilizza anidride carbonica, che congela a -79°C a una profondità non superiore a 2 mm nella cute, trattando in modo sicuro e clinicamente efficace lesioni cutanee superficiali.

L'efficacia superiore al 95%, combinata con una minore distruzione del tessuto sano, lo rende perfetto per trattare macchie dell'età, macchie dovute al sole e fibromi penduli. Offre una crioterapia eccellente e rapida, anche come trattamento combinato con esfoliazione chimica, trattamenti per il viso, microneedling o dermaplaining. Dispositivo senza contatto (0,5 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti. Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 60 trattamenti di 5 secondi). Consigliato per saloni di bellezza e cosmesi.

Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).

Made in USA.

Caratteristiche tecniche: Tempo di congelamento consigliato in letteratura
Acne (cisti e cicatrici): 5-10 sec.
Cheratosi attinica (macchie sole): 5-10 sec.
Angioma: 5-10 sec.
Angioma - angioma stellato: 5-10 sec.
Cheratosi pilare (milia): 5 sec.
Lentigo (macchie dell'età): 5-10 sec.
Iperplasia sebacea: 5 sec.
Fibroma pendulo: 5-10 sec.
Teleangectasie: Nessun consiglio