



# GIMA

## DISPOSITIVO CRIOCHIRURGICO CRYOMEGA con cartuccia 16 g

**Codice:** 30586  
**Categoria:** Crioterapia  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A



**EAN13:** 0850077006005

**Descrizione:** CryOmega® con cartuccia 16 g - non ricaricabile

CryOmega® distribuisce protossido di azoto liquido (-89°C), il criogeno portatile più freddo, ed è utilizzato per 16 lesioni comuni, tra cui verruche, fibromi penduli e cheratosi seborroiche.

Strumento portatile di criochirurgia, ideale per studi medici, offre praticità e ottimi risultati con un solo trattamento.

Fornisce un congelamento clinicamente efficace ed estremamente preciso.

Dispositivo senza contatto (1 cm di distanza) utilizzabile su più pazienti.

Fino a 300 secondi di trattamento per dispositivo (circa 30 trattamenti di 10 secondi).

Per uso professionale.

Confezione e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, PL, FI).

Made in USA.

**Caratteristiche tecniche:** Tempo di congelamento consigliato in letteratura

Verruca volgare: 10-20 sec.

Verruca plantare: 10-20 sec.

Mollusco contagioso: 3-10 sec.

Fibroma pendulo: 5-10 sec.

Lentigo: 2-5 sec.

Cheratosi attinica: 5 sec.

Verruca piana: 5-15 sec.

Cheratosi seborroica: 5-10 sec.

Lesioni genitali: 5-12 sec.