

KIT ANTIDECUBITO ARIES PLUS

Ref. AK-206



Descrizione

Kit antidecubito *Aries Plus* composto da compressore con regolatore di pressione del ciclo alternato, 2 sovrasmaterassi, sovrapposti con termosaldatura, a bolle d'aria con lembi di fissaggio, tubi connettori per il gonfiaggio e set di riparazione. La differenza di pressione tra file di bolle alternate consente la movimentazione costante della superficie corporea a contatto e concorre, in questo modo, alla prevenzione delle lesioni da decubito.

Destinazione d'uso

Kit per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, di I livello, per pazienti allettati, allo scopo di distribuire meglio le pressioni nei punti di contatto del corpo.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Ref. AK-206 (Assemblato) Ref. AK-206M Ref. PR-100.725	- Y033306 Y033399
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. AK-206 (Assemblato) Ref. AK-206M Ref. PR-100.725	1142606/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche – Sovra-materasso AK-206M

Dimensioni inclusi i lembi	300 cm x 90 cm x 12 cm
Dimensioni utili	200 cm x 90 cm
Materiali	PVC a bassa tossicità - UNI EN 71-3
Valvola CPR	No
Funzione cuscino	No
Tipologia connettori	A tubo
Portata massima	130 kg
Fodera	Integrale

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.



Tubi di raccordo compressore




Fodera integrale

Caratteristiche Tecniche – Compressore PR-100.725

Dimensioni	24 cm x 12 cm x 9,5 cm
Peso	1,6 kg
Alimentazione	220 V / 50 Hz, 1 A
Potenza assorbita	8 W
Flusso d'aria	4,5 l/min
Rumorosità	≤30DB
Range di pressione	40 mmHg – 100 mmHg
Regolazione della pressione	Tramite manopola
Ciclo di lavoro	10 minuti

Funzioni del compressore

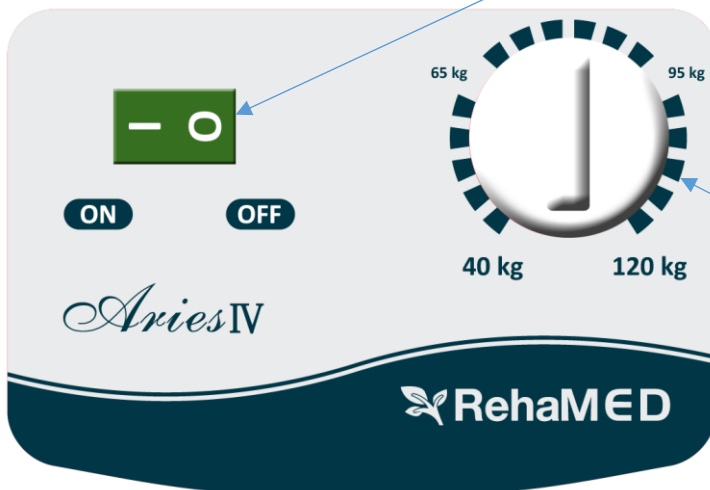

Tasto di accensione

Regolatore della pressione

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del kit e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Il dispositivo è lavabile in autoclave.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AK-206	Kit antidecubito <i>Aries Plus</i> , con sovramaterasso a bolle, fodera e compressore.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	18/10/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
0.1	19/06/2019	Aggiornamento dati tecnici kit

