

## PANCA DA BAGNO TRANSFER

### Manuale d'uso

Attenzione: Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione

#### Fasi di montaggio:

1. Componenti all'interno della confezione
2. Installare lo schienale attraverso i due tubi a fissaggio immediato e scorrevole posizionati sotto lo schienale. I tubi presentano un foro di fissaggio per installare fermamente lo schienale garantendo la massima sicurezza dell'utente, provvedere pertanto a bloccare all'interno dei fori gli appositi pulsanti con molla. Per smontare lo schienale è sufficiente premere i due pulsanti presenti sui fori e far scorrere lo schienale sui tubi.
3. Installare i supporti laterali attraverso i due tubi a fissaggio rapido presenti sul telaio della panca e bloccando all'interno dei fori i pulsanti con molla.
4. Installare le gambe della sedia da doccia bloccandole in sicurezza attraverso i fori di fissaggio inserendo all'interno i pulsanti con molla.



1



2



3



4

