

MANUALE D'USO (cod TR SMALASS-TMG 6400) **ASSE DI TRASFERIMENTO CON FONDO ANTISCIVOLO**



Asse per trasferimenti rettangolare con doppia impugnatura per le mani. La superficie superiore è liscia per agevolare lo spostamento attraverso lo scivolamento dell'utente, la base inferiore dell'asse presenta due fasce in materiale antiscivolo che favoriscono il grip tra l'ausilio ed il punto d'appoggio della carrozzina, del divano, del letto, del wc o della seduta dell'auto. Leggera e facilmente trasportabile grazie allo spessore di soli 6 millimetri.

Dimensioni	60 cm x 33 cm
Altezza	5 mm
Peso	1 kg
Portata	135 kg



Qualsiasi manovra deve essere eseguita lentamente per ridurre il carico fisico per l'operatore e, nel contempo, garantire una movimentazione priva di rischi per il paziente.

Prima di eseguire qualsiasi manovra **si raccomanda di prendere in esame i fattori ambientali** (arredi attrezzature, letti, spazi di manovra, tipo di ausilio ecc.) le caratteristiche del paziente (peso, corporatura, condizioni mediche, grado di collaborazione, capacità di comprensione delle istruzioni), il tipo di movimentazione (trasferimento, mobilizzazione, riposizionamento, ecc.), le capacità individuali degli operatori di assistenza.

Si raccomanda di **non eseguire manovre che richiedano sforzi superiori alle proprie capacità**.
Verificare che il prodotto sia integro, non presenti danneggiamenti e sia pronto all'uso prima di effettuare i trasferimenti.

In caso di utilizzo da parte di più operatori, sincerarsi che tutti i soggetti coinvolti abbiano letto

queste note.