

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'Uplift Elettrico


Grazie per aver acquistato l'ausilio per il sollevamento Uplift Elettrico. Progettato per fornire all'utente il massimo del confort e della comodità. Tenendo con cura il prodotto, si potrà utilizzare per anni questo assistente per il sollevamento e la mobilità.

Per le istruzioni sul corretto assemblaggio ed un uso efficace del vostro Uplift Elettrico, si prega di leggere interamente questo manuale di utilizzo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il vostro Uplift Elettrico è fornito di una chiave di sicurezza per bambini per prevenirne l'utilizzo. Il prodotto infatti è inattivo quando la chiave di sicurezza è rimossa.

ATTENZIONE: RIMUOVERE LA CHIAVE DI SICUREZZA QUANDO IL PRODOTTO NON è IN USO E CONSERVARLA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

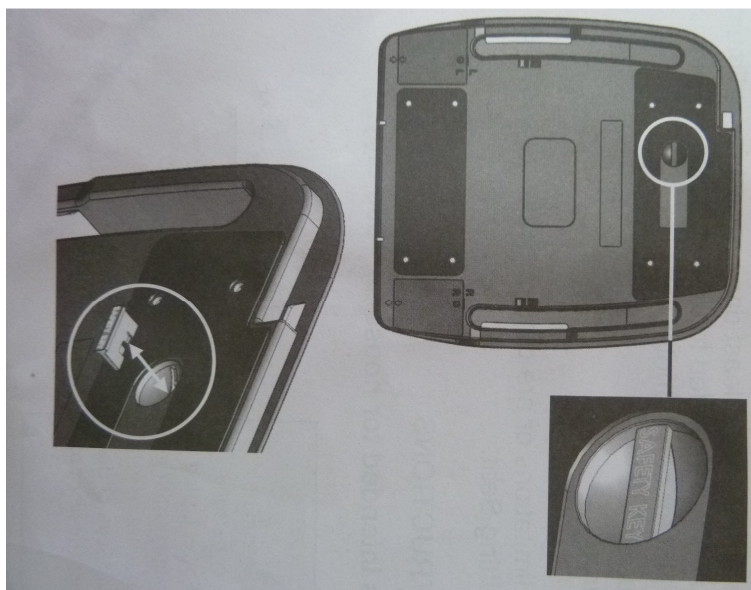

VITE DI SICUREZZA

Attenzione: questo apparecchio è dotato di una vite di sicurezza che impedisce la rimozione della copertura esterna. Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non tentare di rimuovere la copertura esterna. Il prodotto non contiene all'interno parti riparabili dall'utente.

Le riparazioni dovrebbero essere effettuate soltanto dal personale autorizzato. Nota: se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito dal personale qualificato.

Quando non utilizzato, staccare l'Uplift elettrico dalla presa di corrente e/o rimuovere la chiave di sicurezza in caso ci sia il rischio di utilizzo da parte di bambini. Conservare il prodotto nella confezione originale.

INDICAZIONI PER L'USO

Indicato per le persone che hanno perso la capacità di sollevarsi autonomamente dalla posizione seduta, ciò può esser dovuto alle seguenti cause:

- Distrofia muscolare
- Morbo di Lou Gehrig/sclerosi laterale
- Condizione post-operatoria
- Malattia degenerativa
- Artrite
- Morbo di Parkinson

BENEFICI PER L'UTENTE

- Aiuta a mantenere le persone attive ed indipendenti
- Fornisce assistenza per il sollevamento prevenendo incidenti, cadute
- Allevia stress, tensioni sulle articolazioni
- Effettua il sollevamento del 100% del peso corporeo, consentendo agli utenti di conservare la forza muscolare

DATI TECNICI

Approvato CSA C/US CE

US Patent #6,702,383 e #5,316,370.

In attesa di brevetto Us, Europeo ed Internazionale

Dimensioni seduta

Larghezza:	48,9 cm
Profondità:	45 cm
Peso:	5,9 kg
Fodera:	100% poliestere impermeabile

Altezza della seduta

Sollevato:	26,7 cm
Minima:	10,8 cm
Carico massimo:	per utenti fino a 136 kg
Potenza:	100-240 V 50-60 Hz 0.8 A
Lunghezza cavo:	3,7 m



PRIMA DI UTILIZZARE L'UPLIFT ELETTRICO

1. Controllare che la confezione contenga tutti i componenti e che questi siano in buono stato (si veda figura)
2. Verificare che l'Uplift Elettrico sia correttamente funzionante

Contenuto della confezione

L'Uplift elettrico è consegnato con i seguenti componenti:

- Seduta del prodotto (nella posizione piana) con cavo di alimentazione
- Fodera con zip impermeabile
- Manuale di istruzioni
- Carta di registrazione per garanzia
- Chiave di sicurezza (installata nella base inferiore dell'Uplift)

Verificare che tutte le componenti siano incluse nella confezione. Contattare il vostro venditore nel caso in cui alcune parti del prodotto risultino mancanti o danneggiate. Inviare oggi la Carta di registrazione per garanzia con i vostri dati per poter essere correttamente registrati.

Assemblaggio e Verifica

Per un funzionamento corretto, ed evitare scosse elettriche, seguite queste istruzioni di assemblaggio.

1. posizionate il vostro Uplift elettrico su una sedia adeguata
2. assicuratevi che il comando sia sul vostro lato destro e in posizione adeguata per poter azionare il sedile elettrico
3. inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica
4. verificare che il sedile elettrico sia correttamente funzionante prima di utilizzare (sedersi) sullo stesso

NOTA: il vostro Uplift Elettrico si fermerà una volta raggiunta la massima altezza oppure quando la sua altezza è al minimo. È possibile fermare la seduta elettrica a qualsiasi altezza spostando il cursore presente sul comando in posizione centrale (intermedia).

UTILIZZARE IL SEDILE ELETTRICO

Questa sezione presenta come utilizzare in sicurezza il vostro Uplift Elettrico.

Scelta della sedia

L'Uplift può essere utilizzato su ma sempre accanto a dei braccioli. Questo garantisce la vostra stabilità quanto utilizzate il prodotto. Raccomandiamo inoltre che la sedia o il sofa che state utilizzando sia posizionato su una superficie stabile, piana.

Impostazioni per l'uso

Quando siete seduti sul prodotto all'interno di una sedia/sofà, il comando dell'Uplift Elettrico deve essere di fronte a voi, sulla vostra mano destra e libero da ostacoli.

Assicurarsi che il cavo elettrico non sia sotto la base della seduta per prevenire danni o che si stacchi dalla presa di corrente. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in posizione tale da evitare che altre persone inciampino o possano cadere a causa del cavo stesso.

Utilizzando l'Uplift Elettrico, quando sarete sul sedile elettrico l'altezza della vostra seduta sulla sedia, il sofà aumenterà di circa 10 cm (vale a dire l'altezza del sedile nella posizione più bassa).

Allo scopo di utilizzare il prodotto in sicurezza, è necessario tenere sempre entrambi i piedi sul pavimento.





Ci sono tre modi che consentono di tenere sempre i piedi sul pavimento durante l'uso dell'Uplift Elettrico:

- (1) fermare il sedile elettrico e controllare l'altezza. Spostare l'interruttore del comando nella posizione centrale per fermarvi in un punto dove siete in grado di lasciare la sedia comodamente con entrambi i piedi sul pavimento. Quando siete seduti, l'Uplift Elettrico sarà così posizionato all'altezza perfetta per voi.
- (2) Se il cuscino/seduta della vostra sedia/sofà è rimovibile, provate ad utilizzare il vostro Uplift Elettrico senza tale cuscino/seduta oppure sostituite quest'ultimo con un cuscino più basso
- (3) Ridurre l'altezza della sedia/sofà regolando le gambe della stessa in modo che i piedi possano toccare il pavimento quando siete seduti sull'Uplift Elettrico

Una volta collocato il vostro Uplift Elettrico su una sedia o un sofa, spostate delicatamente l'interruttore del comando lasciando che la seduta raggiunga l'altezza che vi consenta di tenere entrambi i piedi sul pavimento.

È possibile fermare all'altezza desiderata il sedile spostando delicatamente l'interruttore del comando nella posizione centrale oppure lasciare che la seduta arrivi sino all'altezza massima.

Ora il vostro Uplift Elettrico è pronto per l'utilizzo!

Nota: se utilizzando l'Uplift Elettrico intendete raggiungere una determinata altezza ma in realtà questa si rivela troppo alta; potete semplicemente abbassare il sedile elettrico così che possiate sedere ad un'altezza più bassa tenendo entrambi i piedi sul pavimento.

ISTRUZIONI D'USO

Quando utilizzate il vostro Uplift elettrico, tenere almeno una mano sul bracciolo della sedia o del sofa per assicurare una maggiore stabilità.

Nota: la seduta deve essere nella posizione rialzata

Abbassarsi in posizione seduta

Posizionare le mani sul(i) bracciolo(i) della sedia o del sofa

- posizionarsi sul sedile sollevato, tenendo entrambi i piedi sul pavimento
- spostare l'interruttore del comando per abbassarsi e raggiungere la posizione seduta, il movimento del sedile si arresterà una volta toccato il punto più basso (posizione piatta)
- durante lo spostamento, è possibile fermare il movimento all'altezza preferita portando l'interruttore del comando alla posizione centrale



Abbassare il sedile

Per abbassare il sedile da seduti, spostare delicatamente l'interruttore del comando. Il sedile si bloccherà quando avrete raggiunto l'altezza minima oppure spostando l'interruttore nella posizione centrale.



Rialzarsi dalla posizione seduta

- Posizionare le mani sui braccioli della sedia o del sofa tenendo entrambi i piedi sul pavimento
- Spostare l'interruttore del comando per rialzarsi grazie al sedile elettrico scegliendo l'altezza desiderata altrimenti la seduta si bloccherà nella posizione più alta

Sollevarsi il sedile

Per rialzarsi dalla posizione seduta, spostare delicatamente l'interruttore del comando. Il sedile si bloccherà quando avrete raggiunto la massima altezza oppure spostando l'interruttore nella posizione centrale.

CURA E MANUTENZIONE

Allo scopo di assicurare un'adeguata cura e la manutenzione del vostro Uplift elettrico, si prega di leggere attentamente queste istruzioni.

Il vostro Uplift Elettrico è fornito con una fodera impermeabile lavabile in lavatrice. La superficie del sedile, con 3 strati in memory foam (multi strato confort) ha un rivestimento resistente all'acqua per una semplice manutenzione.

Per un'adeguata cura, si prega di seguire queste istruzioni:

- ripulire immediatamente qualsiasi versamento sulla fodera
- rimuovere la fodera con zip per il lavaggio oppure per pulire la superficie del cuscino
- lavaggio della fodera a freddo, appendere ed asciugare
- pulire la superficie del cuscino con una spugna umida (si raccomanda l'utilizzo di detersivi delicati)



Ispezione dei componenti elettrici

Si raccomanda di controllare periodicamente il funzionamento del prodotto ai fini di un utilizzo senza problemi. Controllare il cavo di alimentazione osservando se è usurato o presenta incrinature.

Nel caso in cui si riscontri un problema con un componente del sistema elettrico, contattate il vostro rivenditore autorizzato.

Non tentare di riparare un problema elettrico.

Nota: il tentativo di risolvere problemi elettrici può causare lesioni e renderà non valida la garanzia

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cosa fare se l'Uplift Elettrico non si muove quando aziono la leva di comando?


- Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa di corrente
- Se il tentativo precedente non è risolutivo, controllate il vostro interruttore come ultimo passo prima di concludere che c'è un problema con il prodotto

Dov'è il numero di seriale dell'Uplift?

Il numero di seriale è composto da 10 cifre su una targhetta bianca, posizionata sulla base del sedile.


Cosa fare se ho difficoltà ad utilizzare l'Uplift?

Per prima cosa, leggete attentamente tutte le istruzioni per esser sicuro d'aver impostato correttamente l'Uplift. Se avete ancora difficoltà, o non riuscite ad usare il prodotto in sicurezza, contattate il rivenditore autorizzato per una adeguata assistenza.

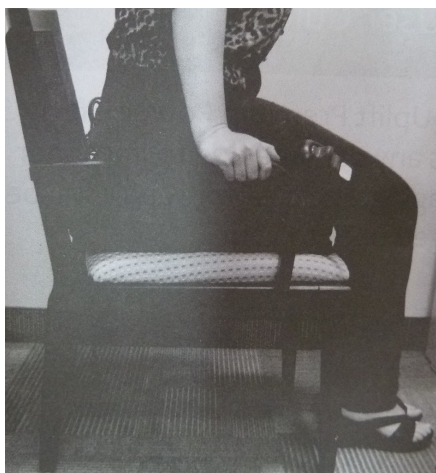


Utilizzo corretto: entrambi i piedi sul pavimento

Prima di sedervi, assicuratevi che il sedile sia posizionato all'altezza ideale per la vostra seduta in modo che entrambi i piedi tocchino il pavimento. Utilizzare come supporto per almeno una delle due mani il bracciolo della sedia durante l'abbassamento o l'alzata del sedile dell'Uplift elettrico.

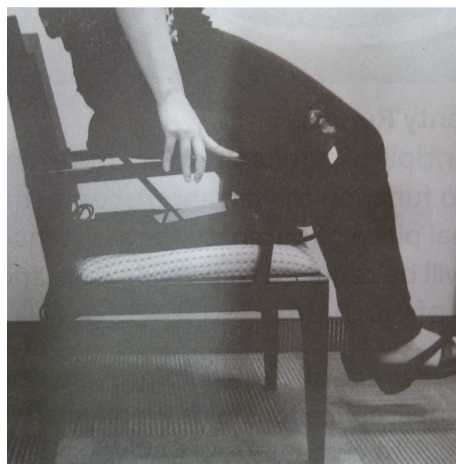

Utilizzo non corretto: sedile troppo alto

Se il vostro Uplift elettrico presenta il sedile eccessivamente alto, avrete difficoltà nel sedervi senza saltellare sul sedile stesso. Per mantenere la stabilità e ridurre il rischio di caduta, abbassare l'altezza del sedile in modo che entrambi i piedi siano a contatto col pavimento.

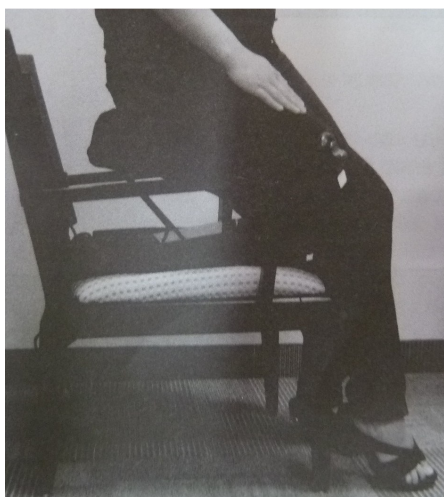

Utilizzo non corretto: seduta asimmetrica

Se il vostro Uplift elettrico è correttamente posizionato, sedersi al centro del sedile tenendo entrambi i piedi sul pavimento (tutta la pianta del piede deve toccare terra). Se scivolte lateralmente rispetto al sedile, questi è troppo alto per voi con il rischio di cadere o danneggiare il prodotto. In questo caso, abbassare il sedile per trovare l'altezza corretta.



Utilizzo non corretto: forza eccessiva sulla leva di comando

Il comando dell'Uplift richiede uno sforzo minimo per movimentare l'interruttore. Esercitare una forza eccessiva sul comando non è necessario e potrebbe causare una rottura dello stesso

RESO IN GARANZIA

Se l'Uplift elettrico non funziona correttamente, contattate il venditore per l'assistenza. Vi sarà richiesto di fornire la data e la prova dell'acquisto (conservare quindi tale documentazione).

NOTA: i resi non saranno accettati senza un numero di autorizzazione al reso. Contattate il venditore per ottenere questa numerazione.

Si raccomanda di utilizzare la confezione originale per tutti i resi in garanzia. Questi imballi sono progettati per resistere al processo di spedizione.

Nel caso in cui l'Uplift elettrico subisca dei danni a causa dell'imballaggio insufficiente, i costi per la riparazione saranno a carico dell'utente.

Garanzia

La garanzia su questo prodotto è riconosciuta in caso di difetti di fabbricazione entro un anno dalla data di acquisto. I danni causati da un utilizzo non appropriato o negligenza non sono garantiti. Questa garanzia non è trasferibile.

Se il vostro Uplift Elettrico presenta difetti di fabbrica o di lavorazione, il produttore potrà a sua discrezione riparare o sostituire il prodotto, il reclamo dovrà pervenire entro un anno dall'acquisto e non presenta spese se non quelle di consegna.

La garanzia è nulla se il prodotto è stato modificato con parti o accessori non autorizzati.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PERICOLO - per ridurre il rischio di scossa elettrica:

Staccare sempre il cavo di alimentazione dell'Uplift Elettrico dalla presa di corrente prima della pulizia.

AVVERTENZA - per ridurre i rischi di ustioni, incendi, scossa elettrica o danni alle persone:

1. staccare dalla presa di corrente prima di inserire o rimuovere parti del prodotto
2. è necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto è utilizzato da bambini o vicino a bambini
3. è necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto è utilizzato vicino ad animali (domestici o no)
4. utilizzare il prodotto soltanto per gli scopi indicati nel manuale di utilizzo
5. non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore
6. non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina elettrica sono danneggiati, se l'Uplift non funziona correttamente, se è caduto e danneggiato, se è caduto in acqua
7. tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore
8. non inserire corpi estranei nelle aperture del prodotto
9. non utilizzare all'aperto
10. non utilizzare con o vicino all'acqua
11. per lo spegnimento, portare il comando in posizione off, quindi staccare la spina dalla presa di corrente
12. per scollegare dalla presa di corrente non tirare il cavo di alimentazione ma staccare la spina dalla presa.
13. staccare la spina dalla presa di corrente quando il prodotto non è in uso e prima della manutenzione o pulizia
14. Utilizzare il prodotto soltanto con sedie o sofa con braccioli per un'ottimale stabilità durante la seduta ed il sollevamento. L'Uplift elettrico non è progettato per l'utilizzo su sedie a dondolo, carrozzine, sedie da ufficio o qualsiasi sedia con ruote. Non utilizzare su veicoli.
15. Tenere le dita distanti dal meccanismo di salita/discesa quando in uso
16. Non lasciare a diretto contatto con qualsiasi sorgente di calore
17. Non utilizzare in bagno
18. Consultare il proprio medico per valutare se ci sono limitazioni fisiche o altre ragioni mediche che possono essere in contrasto con un utilizzo in sicurezza del prodotto

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

L'Uplift elettrico è progettato per un utilizzo domestico