



Telino ad alto SCORRIMENTO guida all'uso



Telo sottile in nylon ad alta scorrevolezza, utilizzabile in molteplici situazioni sia singolarmente che in coppia.

ATTENZIONE: NON E' UN AUSILIO PER IL SOLLEVAMENTO!

Usare l'ausilio secondo le indicazioni del terapeuta.

Le istruzioni che seguono sono una introduzione all'uso.

GIRARE L'UTENTE SUL LETTO



Piegare il telo in due mentre i caregiver devono posizionarsi da entrambi i lati del letto. Girare leggermente il paziente sul lato sinistro.

Posizionare il telo sul letto e sistemarlo tra la spalla e l'anca del paziente, è necessario che almeno un terzo del telo piegato sia sistemato tra le spalle e l'anca. A questo punto girare il paziente sulla sua schiena e lentamente "spingere" fuori il telo (verso il caregiver che tira il telo) così che il paziente si trovi nel mezzo del telo. Posizionare la testa, le braccia e le gambe del paziente in modo da girarlo a sinistra.

Il caregiver alla destra dell'utente mantiene le maniglie sul bordo vicino alla spalla e all'anca del paziente.

Questo caregiver piegandosi in ginocchio girerà il paziente trasferendo il suo peso dalla gamba frontale alla gamba posteriore, mentre tiene ben stretto il telo. Rimuovere il telo facendo scivolare lentamente la parte bassa del telo sotto il paziente

N.B. Se per qualche ragione il telo non potesse toccare la pelle del paziente, si può posizionare sul telo un lenzuolo del letto. Non usare lenzuola rovinate o deboli.

Non usare le lenzuola del letto senza il telo apposito per muovere il paziente.

AIUTARE UN UTENTE AD USCIRE DAL LETTO



Prendere il bordo del telo senza maniglie e piegarlo per un terzo sotto l'utente. Due assistenti faranno la manovra da entrambi i lati del letto.

Girare il paziente sul lato e posizionare il telo piegato nella parte piegata sotto le anche del paziente, il lato non piegato deve essere lungo tutte le gambe. Far sedere il paziente tramite tecniche approvate.

Mentre un caregiver assiste il paziente nel mantenere l'equilibrio l'altro sostiene le gambe del paziente con il telo. Il caregiver che sostiene il telo pian piano si sposta dal fondo del letto al lato, mantenendo una buona postura mentre il paziente abbassa le gambe. **NON SOLLEVARE LE GAMBE DEL PAZIENTE.**

Il paziente con l'aiuto del caregiver può scivolare verso il bordo del letto, finché i piedi toccano il pavimento. IL CAREGIVER NON DEVE ALLONTANARSI DAL PAZIENTE IN QUESTA FASE. Il caregiver (posizionato sul lato opposto all'utente) lentamente estrae lo strato piegato del telo da sotto il paziente, lasciando solo lo strato singolo del telo (resta uno strato sotto l'utente). Ora il paziente è pronto per alzarsi o essere spostato tramite ausili adeguati.

Se una parte del telo tocca dal bordo letto il pavimento va posizionato sotto il letto in modo che nè il paziente nè il caregiver possano scivolare sopra.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Lavare a massimo 60°C e non utilizzare asciugatrici.

CONTROLLO DELLO STATO DEL TELINO ad ALTO SCORRIMENTO

Regolarmente controllare lo stato del telo, non usarlo se presenta segni di cedimento.