



MOPEDIA®

MA P0400x_P0400G-XL_P0401x_P0403x_P0405x_P0410x_P03415R_P0420x_P0425x_P0430x 01 A_ITA_01 2024

POLTRONE ELEVABILI

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI	PAG.3
2. INTRODUZIONE	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO	PAG.4
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.4
5. AVVERTENZE GENERALI	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA	PAG.5
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.6
7.1 Vista ed elenco delle parti	pag. 6
8. MONTAGGIO	PAG.6
8.1 Montaggio per tutti i modelli (tranne PO403-xx modello Chloe)	pag. 6
8.2 Montaggio PO403-xx (modello Chloe)	pag. 6
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO	PAG.7
10. MODALITÀ D'USO	PAG.8
11. MANUTENZIONE	PAG.9
12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.10
13. PULIZIA	PAG.10
14. CURA DEL SISTEMA ELETTRONICO	PAG.11
15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	PAG.12
15.1 Condizioni di smaltimento generali.....	pag. 12
15.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE:	pag. 12
16. DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA	PAG.12
17. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.15
17.1 Dimensioni e pesi*.....	pag. 15
17.2 Specifiche tecniche	pag. 16
17.3 Specifiche tecniche generali	pag. 18
17.4 Specifiche tessuti.....	pag. 18
18. ACCESSORI	PAG.18
18.1 Istruzioni per installazione Roller System	pag. 18
19. GARANZIA	PAG.20
20. RIPARAZIONI	PAG.20
20.1 Riparazione in garanzia.....	pag. 20
20.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag. 20
20.3 Prodotti non difettosi	pag. 20
21. RICAMBI	PAG.20
22. CLAUSOLE ESONERATIVE	PAG.20

CE Dispositivo medico di classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

PO400B	Poltrona Ninfea senza Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Blu chiaro
PO400G-XL	Poltrona Ninfea senza Roller System versione XL - Tessuto FRANCIA CORTA Grigio
PO400R	Poltrona Ninfea senza Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Rosso corallo
PO400S	Poltrona Ninfea senza Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Sabbia
PO401B	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Blu
PO401R	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Rosso Corallo
PO401S	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Sabbia
PO401M	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Terracotta
PO401T	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Tortora
PO401G	Poltrona Ninfea con Roller System - Tessuto FRANCIA CORTA Grigio
PO403G	Poltrona Chloe senza Roller System - Tessuto INCANTO Grigio Perla
PO403R	Poltrona Chloe senza Roller System - Tessuto INCANTO Rosa Antico
PO405G	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Grigio
PO405S	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Sabbia
PO405R	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Rosa Antico
PO405T	Poltrona Dafne con Roller System - Tessuto INCANTO Tortora
PO410B	Poltrona Agave con Roller System - Tessuto LUX Blu
PO410R	Poltrona Agave con Roller System - Tessuto LUX Rosso
PO410S	Poltrona Agave con Roller System - Tessuto LUX Sabbia
PO420S	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Sabbia
PO420B	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Blu
PO420G	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Grigio
PO420R	Poltrona Myrtho con 4 ruote - Tessuto LUX Rosso
PO425G	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Grigio
PO425B	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Blu
PO425R	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Rosso
PO425S	Poltrona Myrtho Class con 4 ruote - Versione letto - Tessuto LUX Sabbia
PO430G	Poltrona Clyzia Zero Gravity - Tessuto INCANTO Grigio
PO430R	Poltrona Clyzia Zero Gravity - Tessuto INCANTO Rosa Antico
PO430T	Poltrona Clyzia Zero Gravity - Tessuto INCANTO Tortora

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una Poltrona Elevabile della linea MOPEDIA by Moretti. Le poltrone elevabili MOPEDIA by Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la poltrona da voi acquistata. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

NOTA: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

ATTENZIONE!



È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale. Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

3. DESTINAZIONE D'USO

Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia POLTRONE ELEVABILI MEDICALI sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE!

Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e non oltre i 10 anni
- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di bambini.
- Si declina qualsiasi responsabilità del costruttore e del rivenditore per i danni causati a persone, animali o cose, derivanti, da interventi di personale non autorizzato e dall'inosservanza del presente libretto di istruzioni.
























ATTENZIONE!

Si consiglia di prestare la massima attenzione alle regole di comportamento e sicurezza ivi elencate, onde evitare spiacevoli incidenti.

- Non usare le poltrone in ambienti umidi.
- Non fumare, non usare fiamme libere, oggetti incandescenti ed apparecchiature che diano luogo a scintille pericolose, non depositare materiali combustibili sul e/o in prossimità del prodotto: **pericolo d'incendio.**
- Posizionare le poltrone su pavimenti livellanti e non cedevoli.
- Utilizzare accessori e/o componenti originali.
- Disinserire immediatamente il cavo elettrico dalla rete, qualora si riscontrino irregolarità di funzionamento e controllare eventuali dispersioni elettriche.
- Non utilizzare prolunghe elettriche e/o connessioni mobili.
- Non idonee all'utilizzo da parte di più persone simultaneamente.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il filo alla presa.
- Non staccare o inserire la presa con le mani bagnate.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.


6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Peso max supportato
	Condizioni di smaltimento
	Attenzione
	Data di produzione
	Smaltimento prodotto secondo la direttiva CE/19/2012
IP54	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
	Parte applicata di tipo B
	Classe Isolamento
	Lavaggio 30°
	Non candeggiare
	Lavare a secco
	Non asciugare mediante tamburo rotativo
	Lavaggio a mano
	Non stirare
	Asciugatura su superficie piana all'ombra

7. DESCRIZIONE GENERALE

Poltrone elevabili, pensate per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto in poliestere. Montano due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, permettendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. Le poltrone inoltre sono dotate della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare.

7.1 Vista ed elenco delle parti

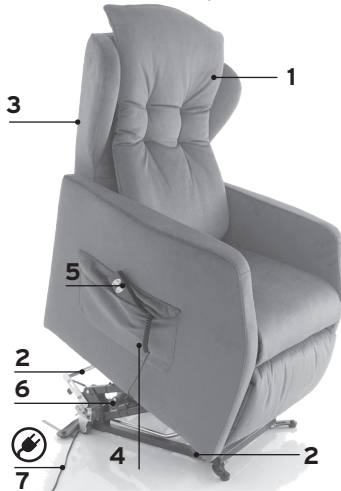

1. Poltrona
2. Ruote anteriori, piedini o roller system
3. Schienale reclinabile
4. Tasca porta oggetti
5. Telecomando
6. 2 motori per movimentazioni indipendenti
7. Cavo elettrico

Immagine a scopo illustrativo

8. MONTAGGIO

8.1 Montaggio per tutti i modelli (tranne PO403-xx modello Chloe)

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità delle varie componenti della poltrona, controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate. In caso di danneggiamento non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore. Per il collegamento alla rete di alimentazione elettrica utilizzare il cavo con la spina uscente dalla poltrona e collegarla alla presa elettrica. Non appoggiare oggetti o camminare sul cavo di alimentazione.

8.2 Montaggio PO403-xx (modello Chloe)

La poltrona PO403 viene spedita con lo schienale da montare (Fig.1)

1. Rimuovere la protezione del supporto su cui verrà alloggiato lo schienale della poltrona (Fig.2)
2. Controllare che il supporto su cui andrà alloggiato lo schienale sul lato posteriore della poltrona sia orientato verso l'esterno (Fig. 3)
3. Inserire lo schienale andando a far combaciare i 2 incastri fino a completare lo scorrimento. (Fig.4)
4. Per lo smontaggio dello schienale è necessario munirsi del cacciavite per facilitare lo sgancio dal supporto d'incastro posto sulla poltrona. (Fig.5)



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

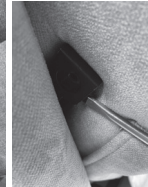


Fig. 5

Nota: Verificare che la tensione della presa di corrente sia identica a quella riportata sull'etichetta del motore.

Nota: Gli interventi elettrici anche di lieve entità richiedono l'opera di personale professionalmente qualificato.

ATTENZIONE!


- Ogni danno derivante dalla mancata osservanza delle sopra indicate disposizioni non sarà addebitabile al costruttore e potrà causare la decadenza della garanzia.
- Quando si azionano i comandi si deve essere in grado di visualizzare l'area circostante al fine di impedire che persone, animali o cose rimangano sotto le parti in movimento.
- La poltrona deve essere montata su un piano orizzontale. Evitare piani cedevoli o sconnessi.
- Prima dell'utilizzo controllare che i cavi elettrici di alimentazione non interferiscano con la movimentazione delle sezioni, che non siano di intralcio e che non si intersechino con cavi di alimentazione di altri apparecchi e dispositivi.

- Posizionare la poltrona in luoghi ampi, distante da sorgenti di calore (caminetti, stufe, lampade alogene, etc.)
- Assicurarsi che il movimento della pediera e dello schienale non sia ostacolato in alcun modo.
- La poltrona deve avere una distanza minima di 60 cm da qualsiasi ostacolo (muro, tavola, etc.)
- La poltrona viene fornita già montata e pronta all'uso, fatta eccezione per il modello PO403x (CHLOE); l'utente dovrà solo connetterla alla rete elettrica.

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Collegare il cavo direttamente alla presa elettrica, non sostituirla e non usare una prolunga.
- Non appoggiare oggetti, camminare o posizionare il cavo di alimentazione vicino a superfici calde o fonti di calore.
- Avere premura di inserire correttamente la presa in un attacco singolo e disinserirla, senza tirare il cavo, ma dallo spinotto quando si eseguono delle movimentazioni o manutenzioni.
- Non maneggiare i cavi con mani o indumenti bagnati e assicurarsi che il voltaggio utilizzato sia congruente con quanto scritto sull'etichetta
- Non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione e non utilizzarli in caso lo siano.
- Prima di sedersi sulla poltrona accertarsi che il telecomando ed il relativo filo non siano d'intralcio
- Quando non è in uso lasciare la poltrona con la pediera chiusa.
- Assicurarsi di posizionare sempre la poltrona su delle superfici completamente piane, sia durante l'utilizzo che non, per garantirne la stabilità e il corretto funzionamento.
- Non sedersi mai sul poggiatesta ed in generale non sedersi in modo violento sulla poltrona.
- Evitare di saltare o salire in piedi sul dispositivo.
- Assicurarsi che la persona si sieda centrando il proprio peso sul cuscino imbottito, indipendentemente dalla reclinatura o meno della poltrona.
- Per spostare la poltrona assicurarsi che non sia reclinata e alzare la pediera di almeno 5 cm.
- Non permettere l'uso improprio da parte dei bambini del dispositivo e assicurarsi che, se i suddetti o delle persone non autosufficienti ne facciano uso vi sia sempre una supervisione adeguata
- La poltrona è destinata a persone di sana costituzione fisica e psichica (non fare uso di alcool e sostanze stupefacenti, non essere affetto da patologie mentali o altre malattie che provochino allucinazioni, disequilibri o simili)
- Allontanare mani e piedi dai punti di aggancio come i meccanismi della poltrona e della pediera, tra gli interstizi dello schienale o del poggiatesta.


ATTENZIONE!

Pericolo schiacciamento mani

- Non utilizzare il dispositivo se risultano lacerati gli eventuali rivestimenti con conseguente fuoriuscita delle apparecchiature interne.
- Non utilizzare telefoni cellulari o portatili vicino alla poltrona.
- Prestare attenzione alle piccole componenti che potrebbero essere ingerite.
- Si raccomanda l'utilizzo di accessori originali.

- È importante che venga utilizzato il telecomando solo con la persona seduta sulla poltrona
- Non usare in ambienti molto umidi come bagni o all'esterno
- Non esporre la poltrona alla luce diretta del sole (UV) per un periodo di tempo prolungato.
- Il rivestimento del prodotto non è progettato per essere ignifugo.
- Non fumare sopra o nei dintorni della poltrona.

**ATTENZIONE!**

Rischio di cortocircuito o incendio, scosse, lesioni e incidenti.

10. MODALITÀ D'USO

Nota: Fare riferimento alle avvertenze di questo manuale istruzioni

**ATTENZIONE!**

Non appoggiarsi né applicare forza verso il basso quando lo schienale è inclinato. Rischio di ribaltamento e lesioni.

**ATTENZIONE!**

Non utilizzare mai la poltrona quando le ruote o il roller system sono sbloccati e liberi di ruotare

**ATTENZIONE!**

La poltrona non è progettata per spostare l'utilizzatore. Spostare e muovere la poltrona solo quando non vi è nessuno sopra.

**ATTENZIONE!**

Il corretto funzionamento della poltrona prevede che venga utilizzata solo con la persona seduta ed in posizione corretta.



Posizionare la poltrona a 60 cm dal muro



Non sedersi sulla pediera



NO



SI

Sedersi correttamente con la schiena appoggiata allo schienale




NO



SI

Terminato l'utilizzo della poltrona, prima di alzarsi, riposizionare lo schienale eretto e chiudere la pediera

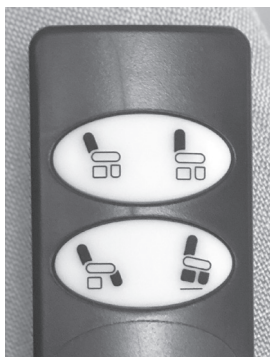

Dalla posizione naturale si passa alla posizione con lo schienale abbassato



Partendo dalla posizione messa in piedi posiziona la poltrona in posizione naturale; partendo invece dalla posizione naturale fa estrarre la pediera.



Dalla posizione con lo schienale abbassato la poltrona ritorna in posizione naturale.




Dalla posizione naturale porta la poltrona in posizione messa in piedi; partendo invece dalla posizione pediera estratta fa rientrare la pediera nella sua sede.

(immagine a scopo illustrativo)


ATTENZIONE!

Il modello di telecomando può variare in base alle disponibilità, le funzioni rimangono invariate

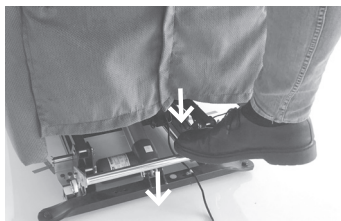10.1 Roller System


Il roller system è installato di serie sulle poltrone PO401x - PO405x - PO410x - PO430x. E' disponibile come accessorio per il modello PO400x. Per inserire il roller system spingere con il piede la barra (Fig.1) verso il basso. Per disinserire il roller system tirare la barra verso l'alto con il piede.

Fig. 7


ATTENZIONE!

Non utilizzare il roller system con la persona seduta sulla poltrona! Non superare scalini superiori a 1 cm!

11. MANUTENZIONE

I prodotti della linea MOPEDIA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali. È estremamente importante che il dispositivo sia controllato al primo utilizzo. In particolare si prega di controllare:


ATTENZIONE!

- Gli interventi di regolazione o di riparazione possono essere eseguiti solo da un tecnico qualificato.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o di pulizia della poltrona, scollegare l'alimentazione elettrica.

- Che tutte le viti e bulloni siano ben stretti.
- Che le parti meccaniche del dispositivo siano in grado di muoversi correttamente (schienale, poggia gambe, braccioli, ruote, ecc...).
- Verificare i freni delle ruote per un corretto funzionamento *(se presenti).
- Controllare che il telaio della poltrona non emetta cigolii o rumori sospetti. Se necessario, lubrificare i punti di articolazione sul telaio.
- Le parti meccaniche (cerniere e perni) devono essere verificate mensilmente e lubrificate con un goccio di olio al fine di favorire la scorrevolezza e la resistenza all'usura.
- Verificare l'integrità del cavo di alimentazione.
- Verificare periodicamente l'efficienza dei motori elettrici.
- Accertarsi che le parti elettromeccaniche restino libere e ben funzionanti.
- Controllare che le parti metalliche di movimento della pediera non siano ostacolate da nessun oggetto.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
LA POLTRONA NON ESEGUE GLI SPOSTAMENTI RICHIESTI PER PROBLEMI MECCANICI	SPAZIO INSUFFICIENTE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLA POLTRONA	RIMUOVERE GLI OGGETTI CHE NE OSTACOLANO IL MOVIMENTO O ALLONTANARLA DAL MURO
	OGGETTO BLOCCATO NEL MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE	CERCARE DI RIMUOVERE L'OGGETTO SENZA PROCURARSI FERITE O LESIONI, IN CASO SIA CONSIDERATO UN COMPORTAMENTO AD ALTO RISCHIO CONTATTARE IL RIVENDITORE
PROBLEMI AL TELECOMANDO	PROBLEMI CON IL TELECOMANDO CON "CLICK" DURANTE LO SCHIACCIAMENTO DEL PULSANTE	IL PROBLEMA RIGUARDA LA PARTE ELETTRONICA IL TELECOMANDO FUNZIONA NORMALMENTE
	PROBLEMI CON IL TELECOMANDO SENZA "CLICK" DURANTE LO SCHIACCIAMENTO DEL PULSANTE	IL PROBLEMA RIGUARDA IL TELECOMANDO E DOVRÀ ESSERE SOSTITUITO
PROBLEMI ALLA MOVIMENTAZIONE A CAUSA DEL SISTEMA ELETTRICO	SPINA ELETTRICA NON COLLEGATA O NON COLLEGATA CORRETTAMENTE	COLLEGARE LA SPINA ALLA PRESA ELETTRICA
	CAVO O SPINA DANNEGGIATI	RIVOLGERSI AL PROPRIO RIVENDITORE
	COMPONENTI ELETTRICI NON COLLEGATI CORRETTAMENTE	CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEI COMPONENTI ELETTRICI

13. PULIZIA

**ATTENZIONE!**

Le poltrone cui si fa riferimento nel presente manuale non sono sfoderabili.

Per effettuare la pulizia scollegare dalla rete elettrica staccando la spina dalla presa. La pulizia si può effettuare mediante l'uso frequente dell'aspirapolvere. In caso di sporco ostinato ricorrere a detersivi specifici per tessuti applicabili mediante spazzola morbida. Pulire regolarmente i componenti meccanici per limitare l'accumulo di polvere nel telaio.

Simboli per lavaggio PO400x; PO401x (tessuto FRANCIA CORTA 315gr/mq)



Lavaggio 30°



Non candeggiare



Lavare a secco



Non asciugare mediante tamburo rotativo

Simboli per lavaggio PO410x; PO420x; PO425x (tessuto LUX 467 gr/mq)


Lavaggio a mano



Non candeggiare



Non stirare



Asciugatura su superficie piana all'ombra



Non asciugare mediante tamburo rotativo



Lavare a secco

Simboli per lavaggio PO403x; PO405x; PO430x (tessuto INCANTO 400 gr/mq)


Lavaggio 30°



Non candeggiare



Non asciugare mediante tamburo rotativo



Lavare a secco


ATTENZIONE!

Solo i tessuti INCANTO e LUX Sono Idrorepellenti.

13.1 Rimozione delle macchie più comuni

- Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni.
- Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito
- Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbe danneggiare il materiale.


ATTENZIONE!

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.


ATTENZIONE!

I prodotti sanificanti sono corrosivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto accidentale, lavare la parte interessata abbondantemente con acqua calda e consultare immediatamente un medico.

14. CURA DEL SISTEMA ELETTRONICO

- Verificare che nessun cavo della poltrona sia tagliato o in qualsivoglia modo danneggiato.
- In caso di danni (a prescindere dall'entità) contattare il proprio rivenditore.
- Mantenere i circuiti elettronici lontano da umidità e temperature elevate

15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

15.1 Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.



15.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

16. DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo POLTRONA ELEVABILE è progettato per essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato nelle tabelle che seguono. L'utilizzatore del dispositivo POLTRONA ELEVABILE deve assicurarsi che venga effettivamente utilizzato nelle condizioni specificate.

Tabella 1

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE		
IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE NELL' AMBIENTE ELETTROMAGNETICO SOTTO SPECIFICATO. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DEL DISPOSITIVO DEVE GARANTIRE CHE ESSO VENGA USATO IN TALE AMBIENTE.		
PROVE DI EMISSIONE	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO-GUIDA
EMISSIONI RF CISPR 11	GRUPPO 1	IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE UTILIZZA ENERGIA RF SOLO PER IL SUO FUNZIONAMENTO INTERNO E PER LA RICARICA DELLA BATTERIA. PERCIÒ LE SUE EMISSIONI RF SONO MOLTO BASSE E VEROSIMILMENTE NON CAUSANO NESSUNA INTERFERENZA NEGLI APPARECCHI ELETTRONICI VICINI.
EMISSIONI RF CISPR 11	CLASSE B	IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È ADATTO PER L'USO IN TUTTI GLI EDIFICI, COMPRESI GLI EDIFICI DOMESTICI E QUELLI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE CHE ALIMENTA EDIFICI DESTINATI AD USI DOMESTICI.
EMISSIONI ARMONICHE EN 61000-3-2	CONFORME	
EMISSIONI DI FLUTTUAZIONI DI TENSIONE/FLICKER EN 61000-3-3	CONFORME	

Tabella 2

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE			
IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE NELL' AMBIENTE ELETTROMAGNETICO SOTTO SPECIFICATO. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DEL DISPOSITIVO DEVE GARANTIRE CHE ESSO VENGA USATO IN TALE AMBIENTE.			
PROVE DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO-GUIDA
SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV A CONTATTO ± 8 KV IN ARIA	± 4 KV A CONTATTO ± 8 KV IN ARIA	INFORMAZIONI VALIDE PER L'USO DEL DISPOSITIVO. I PAVIMENTI DEVONO ESSERE IN LEGNO, CALCESTRUZZO O IN CERAMICA. SE I PAVIMENTI SONO RICOPERTI DI MATERIALE SINTETICO, L'UMIDITÀ RELATIVA DOVREBBE ESSERE ALMENO DEL 30%.
BURST E TRANSITORI VELOCI EN61000-4-4	1KV - 5KHZ ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE, 2000V - 5KHZ ACCOPPIAMENTO PARALLELO	1KV - 5KHZ ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE, 2000V - 5KHZ ACCOPPIAMENTO PARALLELO	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE, PER LA RICARICA DELLA BATTERIA, DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO
TENSIONI DI IMPULSO EN 61000-4-5	2KV ACCOPPIAMENTO PARALLELO; 1KV ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE	2KV ACCOPPIAMENTO PARALLELO; 1KV ACCOPPIAMENTO INDIVIDUALE	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE, PER LA RICARICA DELLA BATTERIA, DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO
BUCHI DI TENSIONE, BREVI INTERRUZIONI E VARIAZIONI DELLA TENSIONE SULLE LINEE DI INGRESSO DELL'ALIMENTAZIONE. EN 61000-4-11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO.
EMISSIONI CONDOTTE A RADIOFREQUENZA EN55011	0,15 ± 0,5 MHZ 79 DB±V 0,5 ± 30 MHZ 73 DB ± V	0,15 ± 0,5 MHZ 79 DB ± V 0,5 ± 30 MHZ 73 DB ± V	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO.
EMISSIONI RADIATE A RADIOFREQUENZA EN55011	CLASSE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M) CLASSE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	CLASSE B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M) CLASSE A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	LA QUALITÀ DELLA TENSIONE DI RETE PER LA RICARICA DELLA BATTERIA DOVREBBE ESSERE QUELLA DI UN TIPICO AMBIENTE COMMERCIALE O OSPEDALIERO.

Tabella 3


GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE			
IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE NELL' AMBIENTE ELETTROMAGNETICO SOTTO SPECIFICATO. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DEL DISPOSITIVO DOVREBBE ASSICURARSI CHE ESSO VENGA UTILIZZATO IN TALE AMBIENTE.			
PROVE DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC 60601	LIVELLO DI CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO-GUIDA
DISTURBI CONDOTTI, INDOTTI DA CAMPI A RADIO FREQUENZA 61000-4-6	3 V EFF. DA 150 KHZ A 80 MHZ	3 V EFF. DA 150 KHZ A 80MHZ	<p>GLI APPARECCHI DI COMUNICAZIONE A RF PORTATILI E MOBILI NON DOVREBBERO ESSERE USATI VICINO A NESSUNA PARTE DELLA POLTRONA ELEVABILE, COMPRESI I CAVI, ECCETTO QUANDO RISPETTANO LE DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE CALCOLATE DALL'EQUAZIONE APPLICABILE ALLA FREQUENZA DEL TRASMETTITORE</p> <p>DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE $D = 1,2\sqrt{P}$ DA 80 MHZ A 800 MHZ</p> <p>$D = 2,3\sqrt{P}$ DA 800 MHZ A 2,5 GHZ</p> <p>OVE "P" È LA POTENZA MASSIMA NOMINALE D'USCITA DEL TRASMETTITORE IN WATT (W) SECONDO IL COSTRUTTORE DEL TRASMETTITORE E "D" È LA DISTANZA DI SEPARAZIONE RACCOMANDATA IN METRI (M). L'INTENSITÀ DEL CAMPO DEI TRASMETTITORI A RF FISSI, COME DETERMINATO IN UN'INDAGINE ELETTROMAGNETICA DEL SITO, POTREBBE ESSERE MINORE DEL LIVELLO DI CONFORMITÀ IN CIASUN INTERVALLO DI FREQUENZA. SI PUÒ VERIFICARE INTERFERENZA IN PROSSIMITÀ DI APPARECCHI CONTRASSEGNAI DAL SEGUENTE SIMBOLO:</p> 
DISTURBI A RADIO FREQUENZA EN 6100-4-3	3 V/M DA 80 MHZ A 2,5 GHZ	3 V/M DA 80 MHZ A 2.5 GHZ	
<p>NOTA 1: A 80 MHZ E 800 MHZ SI APPLICA LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER L'INTERVALLO DI FREQUENZA PIÙ ALTA.</p> <p>NOTA 2: QUESTE LINEE GUIDA POTREBBERO NON APPLICARSI IN TUTTE LE SITUAZIONI. LA PROPAGAZIONE ELETTROMAGNETICA È INFLUENZATA DALL'ASSORBIMENTO E DALLA RIFLESSIONE DI STRUTTURE, OGGETTI E PERSONE.</p>			
<p>^A LE INTENSITÀ DI CAMPO PER TRASMETTITORI FISSI, COME LE STAZIONI DI BASE PER I RADIOTELEFONI (CELLULARI E CORDLESS) E RADIOMOBILI TERRESTRI, APPARECCHI PER RADIOAMATORI, TRASMETTITORI RADIO IN AM E FM ED TRASMETTITORI TV NON POSSONO ESSERE PREVISTE TEORICAMENTE CON PRECISIONE. PER STABILIRE UN AMBIENTE ELETTROMAGNETICO CAUSATO DA TRASMETTITORI A RF FISSI SI DOVREBBE CONSIDERARE UN'INDAGINE ELETTROMAGNETICA SUL SITO. SE L'INTENSITÀ DI CAMPO MISURATA NEL LUOGO IN CUI SI USA LA POLTRONA ELEVABILE SUPERA IL LIVELLO DI CONFORMITÀ APPLICABILE ALLA RF DI CUI SOPRA, SI DOVREBBE PORRE SOTTO OSSERVAZIONE IL FUNZIONAMENTO NORMALE DELLA POLTRONA ELEVABILE. SE SI NOTANO PRESTAZIONI ANORMALI, POSSONO ESSERE NECESSARIE MISURE AGGIUNTIVE, COME UN DIVERSO ORIENTAMENTO O POSIZIONE DELLA POLTRONA ELEVABILE.</p> <p>^B LE INTENSITÀ DI CAMPO SU UN INTERVALLO DI FREQUENZE DA 150 KHZ A 80 MHZ DOVREBBERO ESSERE INFERIORI A 3 V/M.</p>			

Tabella 4













DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE TRA APPARECCHI DI RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E POLTRONA ELEVABILE

IL DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE È PREVISTO PER FUNZIONARE IN UN AMBIENTE ELETTROMAGNETICO IN CUI SONO SOTTO CONTROLLO I DISTURBI IRRADIATI RF. IL CLIENTE O L'UTILIZZATORE DI POLTRONA ELEVABILE PUÒ CONTRIBUIRE A PREVENIRE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE ASSICURANDO UNA DISTANZA MINIMA FRA GLI APPARECCHI DI COMUNICAZIONE MOBILI E PORTATILI A RF (TRASMETTITORI) ED IL CARICA BATTERIE DI POLTRONA ELEVABILE DURANTE LA FASE DI CARICA E L'INTERO DISPOSITIVO POLTRONA ELEVABILE DURANTE IL SUO FUNZIONAMENTO COME SOTTO RACCOMANDATO, IN RELAZIONE ALLA POTENZA DI USCITA MASSIMA DEGLI APPARECCHI DI RADIOCOMUNICAZIONE

PROVE			
POTENZA NOMINALE DI USCITA MASSIMA DEL TRASMETTITORE W	DURANTE L'UTILIZZO DELLA POLTRONA ELEVABILE	DURANTE L'UTILIZZO DELLA POLTRONA ELEVABILE	DURANTE L'UTILIZZO DELLA POLTRONA ELEVABILE
	DA 150 KHZ A 80 MHZ D = 1,2VP	DA 80 KHZ A 800 MHZ D = 1,2VP	DA 800 KHZ A 2,5 GHZ D = 1,2VP
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

PER I TRASMETTITORI CON POTENZA NOMINALE MASSIMA DI USCITA NON RIPORTATA, LA DISTANZA DI SEPARAZIONE RACCOMANDATA D, IN METRI (M), PUÒ ESSERE CALCOLATA USANDO L'EQUAZIONE APPLICABILE ALLA FREQUENZA DEL TRASMETTITORE, OVE P È LA MASSIMA POTENZA NOMINALE D'USCITA DEL TRASMETTITORE, IN WATT (W), SECONDO IL FABBRICANTE DEL TRASMETTITORE.
 NOTA 1: A 80 MHZ E 800 MHZ SI APPLICA LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER L'INTERVALLO DI FREQUENZA PIÙ ALTO.
 NOTA 2: QUESTE LINEE GUIDA POTREBBERO NON APPLICARSI IN TUTTE LE SITUAZIONI. LA PROPAGAZIONE ELETTROMAGNETICA È INFLUENZATA DALL'ASSORBIMENTO E DALLA RIFLESSIONE DI STRUTTURE, OGGETTI E PERSONE

17. CARATTERISTICHE TECNICHE
17.1 Dimensioni e pesi*
Dimensione e peso

Codici												
PO400x	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52
PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55
PO401x	52	48	50	77	85	61	107	160	150	-	130	52
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55
PO420x	52	48	41	71	90	61	112	162	153	-	130	58
PO425x	52	48	41	71	90	61	112	175	153	10	130	58
PO430x	52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58

*Le dimensioni sono espresse in cm e possono differire di ± 1 cm. Trattandosi di prodotto imbottito, le misure possono variare di qualche cm

17.2 Specifiche tecniche



PO400x - PO400G-XL - PO401x (NINFEA Tessuto FRANCIA CORTA)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto antimacchia;
- Copripoltrona e copribraccioli compresi
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- 2 piedini frontali;
- Roller system (di serie solo per PO401x) 4 ruote da Ø 50 mm;

PO403x (CHLOE Tessuto INCANTO)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi - Vertical lift di circa 7 cm;
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- Ruotini di cortesia nella parte posteriore e piedi in PVC nella parte anteriore ;

PO405x (DAFNE Tessuto INCANTO)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Copripoltrona e copribraccioli compresi
- Cuscino in in poliuretano sagomato rivestito con falda di ovatta di circa 6 cm
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 40 Kg/m³);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzione alzainpiedi;
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- 2 piedini frontali;
- Roller system 4 ruote da Ø 50 mm;

PO410x (AGAVE tessuto LUX)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m³, pediera 18 Kg/m³, seduta 35 Kg/m³, braccioli 35 Kg/m³);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi;
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;
- 2 piedini frontali;
- Roller system 4 ruote da Ø 50 mm;

PO420x (MYRTHO Tessuto LUX)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno;
- Tessuto idrorepellente e antimacchia;
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida);
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m3, pediera 18 Kg/m3, seduta 35 Kg/m3, braccioli 40 Kg/m3);
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Schienale con cuscini sfoderabili e sostituibili;
- Seduta in poliuretano espanso rivestito con 2 cm di viscoelastico;
- Braccioli estraibili, con possibilità di inserire tavolino;
- Orecchie estraibili;
- 4 ruote da Ø 75 mm, di cui 2 con freno;
- Maniglione di spinta;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi;
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;


PO425x (MYRTHO CLASS tessuto LUX)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno
- Tessuto idrorepellente e antimacchia
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida)
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m3, pediera 18 Kg/m3, seduta 35 Kg/m3, braccioli 40 Kg/m3);
- Seduta in poliuretano espanso rivestito con 2 cm di viscoelastico;
- Pediera regolabile in più posizioni;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Schienale con cuscini sfoderabili e sostituibili;
- Braccioli estraibili con possibilità di inserire tavolino;
- Orecchie estraibili;
- Seduta con 2 cm di viscoelastico;
- 4 ruote da Ø 75 mm, di cui 2 con freno;
- Maniglione di spinta;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi - Vertical lift 10cm - Letto a 180°
- 2 motori indipendenti;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;

PO430X (CLYZIA Tessuto INCANTO)

- Telaio in acciaio verniciato a polveri e legno
- Tessuto idrorepellente e antimacchia
- Schienale in fiocco siliconato in poliestere anallergico con 3 densità differenziate (zona testa, più morbido - zona tronco e zona lombare, più rigida);
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata (schienale 18-22 Kg/m3, pediera 18 Kg/m3, seduta 35 Kg/m3, braccioli 40 Kg/m3);
- Doppia pediera che permette un allungamento di 11 cm;
- Braccioli estraibili con possibilità di inserire tavolino;
- Schienale regolabile in più posizioni;
- Funzioni: Total relax - TV - Metti in piedi - Vertical lift 10cm - Letto circa 180° - Zero Gravity
- Roller system 4 ruote da Ø 50 mm;
- Posizione culla; Posizione cardio
- 2 motori indipendenti con funzione Zero Gravity;
- Telecomando a 4 pulsanti con filo interno alla tasca;

17.3 Specifiche tecniche generali

- 230V - 110W;
- Temperatura dell'ambiente operativo -20°C / + 60°C;
- Conservazione consigliata: conservare in luogo fresco ed asciutto e comunque sempre lontano da fonti dirette di calore come la luce solare (temperatura consigliata tra -10°C e + 40°C);
- In caso di stoccaggio per lungo periodo è necessario scollegare la fonte di alimentazione elettrica e provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito a deposito di polvere.

17.4 Specifiche tessuti

Tutti i tessuti delle poltrone sono:



ANTI-ACARO



ANTIMACCHIA



ANTI-MICROBICI
E ANTI-BATTERICI



TRASPIRANTI

18. ACCESSORI

- Roller system (SOLO PER PO400x)
- Kit copri poltrona (SOLO PER PO403x, PO410x, PO420x, PO425x, PO430x)
- Tavolino (SOLO PER PO420x, PO425x, PO430x)
- Kit batteria portatile

Nota: La lista degli accessori è in continuo aggiornamento. Consigliamo di contattare i rivenditori per conoscere novità, disponibilità e maggiori informazioni.

18.1 Istruzioni per installazione Roller System



ATTENZIONE!

Le operazioni di installazione devono essere effettuate da personale autorizzato.



ATTENZIONE!

Si declina ogni responsabilità circa malfunzionamenti o danni derivanti da cattiva installazione e messa in opera da personale non abilitato.

Per installare l'accessorio roller system (POA3xx) sulla poltrona è necessario seguire con attenzione i seguenti passaggi:

- Mettere la poltrona in funzione e portarla completamente in posizione lift;
- Scollegare la presa elettrica;
- Smontare, dove presenti, le due ruote anteriori utilizzando una comune chiave da 10 mm;
- Ribaltare la poltrona in avanti;

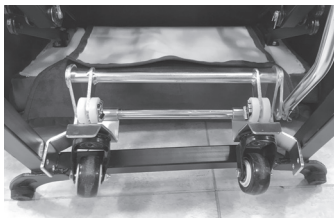


Fig.8

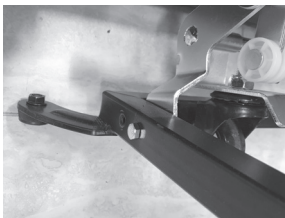


Fig.9

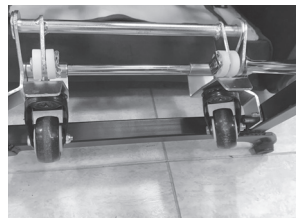


Fig.10

- Inserire il roller system (fornito già parzialmente assemblato) all'interno della base in acciaio della poltrona (fig. 8);
- Far combaciare i 4 fori presenti sulla parte anteriore della base del telaio della poltrona con quelli presenti sui supporti del roller system e bloccare tutto con le 4 viti e dadi a disposizione (fig. 9,10);



Fig.11

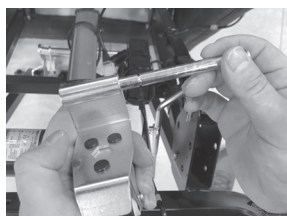


Fig.12

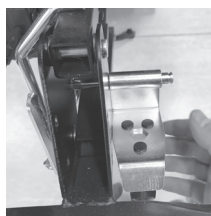


Fig.13



Fig.14

- Prendere i componenti mostrati in fig.11;
- Inserire il perno lungo nel supporto della ruota (fig. 12);
- Inserire perno e ruota nella piastra posteriore destra del telaio (fig.13,14);
- Inserire il fermo sul perno lato esterno del telaio;
- Inserire la rondella sul perno dal lato interno del telaio;



Fig.15



Fig.16

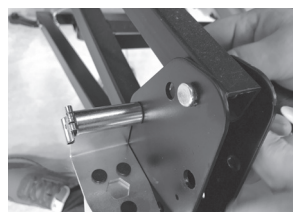


Fig.17

- Assemblare sul perno l'asta del roller system precedentemente installato (fig. 15) ed inserire il fermo anche sul lato interno;
- Prendere i componenti mostrati in fig.16;
- Inserire il perno corto nel supporto della ruota;
- Inserire perno e ruota nella piastra posteriore sinistra del telaio (fig.17);
- Inserire la rondella sul perno dal lato interno del telaio;
- Inserire i fermi ad entrambi gli estremi del perno;



Fig.18

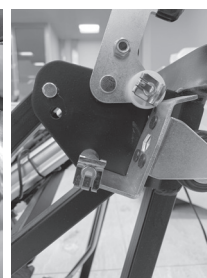


Fig.19

- Prendere la barra di acciaio con i 2 perni rimasti e avvicinarla alle piastre del telaio girandola in modo che i puntali in gomma nera siano rivolti verso il basso;
- Inserire l'asta curva di destra del roller system all'interno dell'asola presente sulla barra (fig.18);
- Inserire i perni per bloccare la barra alle piastre del telaio della poltrona;
- Inserire i fermi su entrambi i perni (fig.19);
- Ribaltare la poltrona in posizione normale;
- Collegare la poltrona alla corrente e riportarla in posizione naturale.

19. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

Qualunque uso improprio della poltrona, non previsto nel presente manuale, fa decadere la responsabilità e la garanzia del fabbricante in caso di incidente o danni.

20. RIPARAZIONI

20.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

20.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

20.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

21. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio. Per la lista di ricambi disponibili fare riferimento esclusivamente al catalogo moretti.

22. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**PRODOTTO IN ALBANIA**

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com